

バストバンド・デラックス

Bustband-DX

胸部固定帯
Rib Fixer Band

取扱説明書

- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、商品の特性を十分に理解してからご使用ください。
- 常にこの取扱説明書をお手元に置き、必要に応じてお読みください。

お客様相談室 ☎ 0120-770-175




www.alcare.co.jp

使用上のご注意

- この製品は天然ゴムを使用しています。

使用方法

- ① 伸びない部分を患部にあて、息を吐いた状態で伸びる部分を適度な強さで引っ張り固定してください。
- ② 男性用は伸縮部が二分割にセパレートされておりますので、上・下の圧迫強度を自由に調節することができます。
- ③ 女性用は右・左用がございます。右の肋骨を固定する場合は右用、左の肋骨を固定する場合は左用をお使いください。

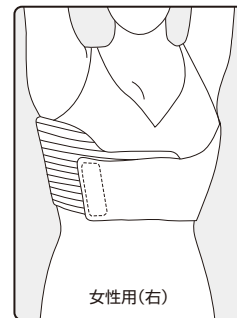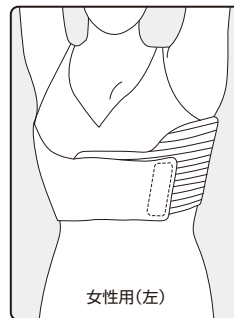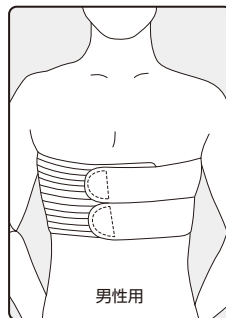

取扱方法

- 洗濯は中性洗剤を使用し、軽く押し洗いしてください。
- アイロン、漂白剤、ドライクリーニングは避けてください。

種類と規格

| 種類 | 商品コードNo. | 規格 | | | 1箱入数 |
|--------|----------|----------|-----------------|--|------|
| | | 胸囲 | 長さ×幅(背部)×幅(前部) | | |
| 男性用 | 10541 | 65~110cm | 100cm×17cm×17cm | | 1コ |
| 女性用(左) | 10551 | 65~110cm | 100cm×17cm×11cm | | 1コ |
| 女性用(右) | 10561 | 65~110cm | 100cm×17cm×11cm | | 1コ |

ALCARE

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013

TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825

www.alcare.co.jp