

類別及び一般的名称：機械器具（03）医療用消毒器/温水低温殺菌装置  
一般医療機器（JMDNコード：44555000）

## 販売名：HM煮沸消毒器

### 【禁忌・禁止】

- ・本製品は消毒を目的に使用し、すべての微生物を対象として、それらをすべて殺滅または除去する滅菌としては使用しないこと。

### 【形状・構造及び原理】

#### 1. 原材料/材料

本体：SUS304ステンレス

樹脂部：ベークライト

電熱部：パイプヒーター（定格電圧AC100V）

#### 2. 形状・構造



（携帯用）

型式	大きさ	出力	品目仕様
携帯用 24cm	24×9×5.5cm		
携帯用 27cm	27×12×6.5cm		
携帯用 27cm	27×12×6.5cm	500W	パイプヒーター
AUTO型 30cm	30×15×10cm	800W	空焚き防止安全装置付き
AUTO型 36cm	36×18×12cm	1000w	空焚き防止安全装置付き
AUTO型 40cm	40×20×15cm	1200w	空焚き防止安全装置付き

本添付文書に該当する製品の製品名、サイズ等については包装表示ラベルに記載されているので確認すること。

#### 3. 作動・動作原理

本製品は消毒用に水を加温するための水槽である。

#### 【使用目的、効能又は効果】

本器は器具類を加温水槽の中の煮沸及び熱水により消毒するための器械である。この方法が適しているのは完全に滅菌する必要のないものに限られる。

#### 【操作方法又は使用方法等】

1. 消毒する器械・器具類は洗浄してから消毒すること。
2. 消毒物品が完全に水中に浸っている状態にすること。
3. 消毒時間は、金属製の器械・器具類は約20分、熱に対して弱い製品は注意すること。
4. ガラス器具類は、破損しないよう低温のうちに入れること。
5. 消毒後は、器械・器具類を長時間放置すると腐食の原因となるため、速やかに乾燥すること。

6. 別紙取り扱い説明書を確認すること。

#### 【使用上の注意】

1. 使用中・使用後は高温となるため、樹脂部分を持ち、本体（ステンレス部）は絶対さわらないこと。
2. 熱湯の取り扱いには充分注意すること。
3. 水不足による空焚きや吹きこぼれないよう、水量には充分注意し、目を離さないように注意すること。
4. 消毒を行う際消毒する器具が直接タンク底部にさわると、器具の変型や破損の原因になるため、本体に付属している内部の棚板を必ず使用すること。  
（パイプヒータータイプ）
  1. 空焚きをすると、ヒーターを破損したり火災の原因になるので注意すること。
  2. ショートの原因となるので、電源コードをひっぱったり、ねじったりしないこと。
  3. 感電、漏電の原因となるので、電源部に直接水をかけたり丸洗いはしないこと。
  4. 使用中は、感電防止のためアースをすること。
  5. 使用後は必ずコンセントを抜くこと。

#### 【貯蔵・保管方法】

1. 槽内は常に清潔に保ち、湯垢、さび等が付着しないよう注意すること。
2. 長期保管又は使用後は、腐食防止のため槽内は水をぬぎ、乾燥させること。

#### 【保守・点検】

1. 変形や部品等など、充分点検を行うこと。
2. しばらく使用しなかった機器を再使用するときは、使用前に必ず機器が正常に、かつ安全に作動することを確認すること。
3. 修理や調整はお買い上げ販売店にご依頼して下さい。

#### 【包装】

本製品は製品毎に1台単位、製品箱包装。

#### 【製造業者】

松本製器株式会社

千葉県市川市原木 1-1-22