

# クロスメディカルスクリーン (抗菌・防臭カーテン)


## 組立説明書 (連結タイプ)

このたびは、当社製品をお買い求めいただきまして、ありがとうございます。ご使用前に説明書をよくお読みの上、正しくご使用下さい。また、説明書は大切に保管して下さい。

■型番 (この説明書は、下図の○で囲んだスクリーンの組立に適用します。)


AM-632-(CL)  
VM-632  
その他

2連

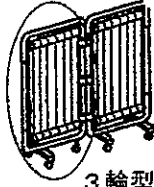

3輪型


F66-2  
V-22

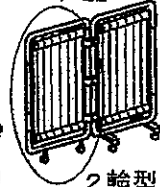

2輪型


AM-633-(CL)  
VM-633  
その他

3連

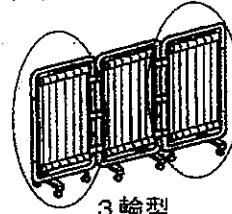

3輪型

F69-3  
V-23

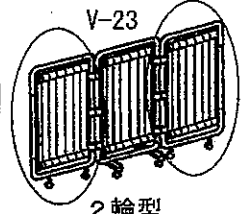


2輪型

### ■梱包内容


| 名称       | 形状 | 詳細                                       | 数量 | 名称        | 形状 | 詳細      | 数量 |
|----------|----|--|----|-----------|----|---------|----|
| A 上部フレーム |    | 上部パイプ<br>カーテン棒付                          | 1組 | C サイドフレーム |    | 丸パイプ    | 2本 |
| B 下部フレーム |    | 下部パイプ<br>カーテン棒付<br>脚ベース (1個)<br>キャスター3個付 | 1組 | D クロス     |    | カーテン布   | 1枚 |
|          |    | 下部パイプ<br>カーテン棒付<br>キャスター2個付              |    | E ジョイナー   |    | 樹脂製連結部品 | 3個 |

■組立手順 (説明図は、主に3輪型ですが、2輪型も同様に組立てて下さい。)


- ① ●連結タイプを組立てる前に別梱包の基本タイプを組立てて下さい。  
●保護用のポリ袋に入っている場合は、それらを全部取り除いて下さい。  
●[3輪型のみ]…下部フレームの脚ベースをフレームに対して90°回転して自立させて下さい。(3輪型のみ)  
(脚ベースは90°回転ストッパー付です。また、反対方向には、回転しません。)  
●下部フレームにサイドフレームを差込んで下さい。(2本)  
●サイドフレームに上部フレームを差込んで下さい。

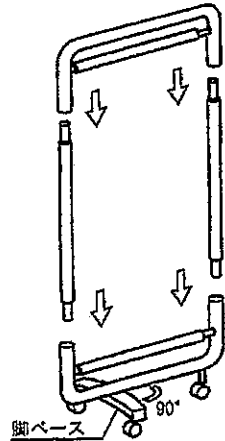

- ② ●[3輪型]…図の様にキャスター脚が基本タイプ側になる様、方向に注意してジョイナー(3個)で基本タイプと連結して下さい。  
●[2輪型]…図の様にせまい側が基本タイプの側に寄る様、方向に注意してジョイナー(3個)で基本タイプと連結して下さい。  
●逆方向に連結すると折りたたみが出来ません。  
●ジョイナーは図の位置に取付けて下さい。

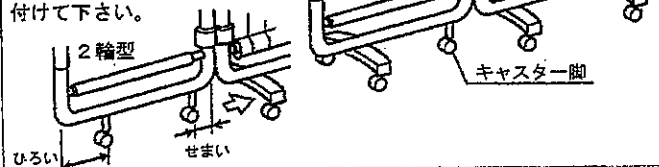

- ③ ●上下のフレームからカーテン棒(2本)を取外して下さい。(カーテン棒はバネ式で、「長い内パイプ」側にスライドさせると取外せます。)  
●上部のカーテン棒をクロスの縫製部を通して、再び上部フレームに取付けて下さい。(クロスには上下はありません。)  
(カーテン棒は「長い内パイプ」の方から先にフレームの穴に取付けて下さい。)  
●同様に下部のカーテン棒にクロスを通して、再び下部フレームに取付けて下さい。

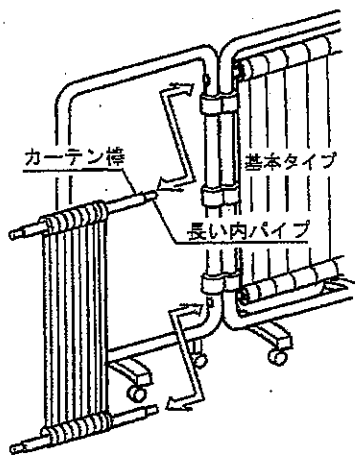

- ④ ●脚ベースのネジがゆるんでいる場合は、基本タイプに付属のレンチで締付けて下さい。  
●クロスの日ダを均等にそろえて完成です。  
(3連型は、2組の連結タイプを組立てて、それぞれ、方向に注意して基本タイプと連結して下さい。)

