

取扱説明書


Instruction Manual

トイレ椅子CHIBI

HT2097 0-6622-11

この度は本製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。
ご使用前に、本取扱説明書をよくお読みになり、末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。
また、お読み頂きました後も大切に保管してください。

外観図

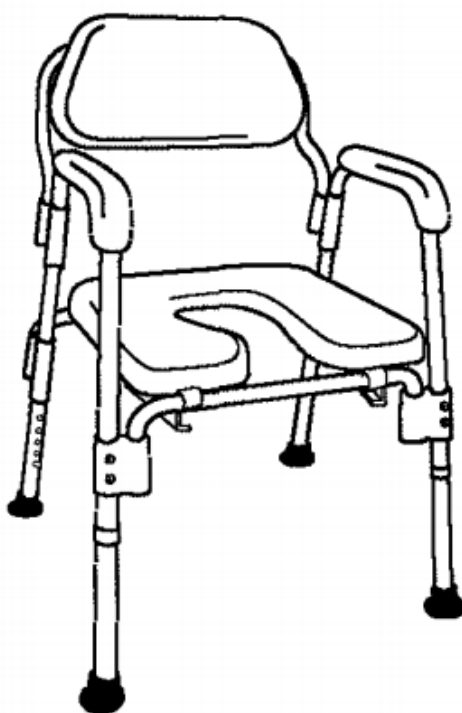


ご注意

- 本品はトイレ、および浴室用の椅子です。それ以外の用途では仕様しないでください。
- 座面以外の部分に腰をかけないでください。転倒してケガをすることがあります。
- 誤った使用方法や無理な荷重は変形・損傷の原因になりますのでおやめください。
- 使用中に変形やネジのゆるみによりガタツキが生じた場合はすぐに使用を中止してください。そのまま使用されますとケガの原因となります。


組立方法

1

折りたたんだ状態

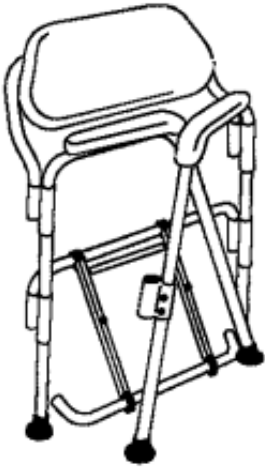


2

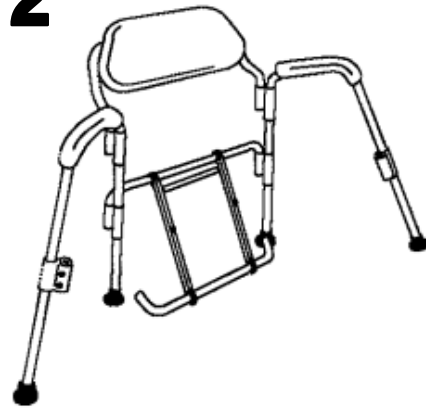

肘掛(脚)部を開きます。

3

シート部分を上にあげます

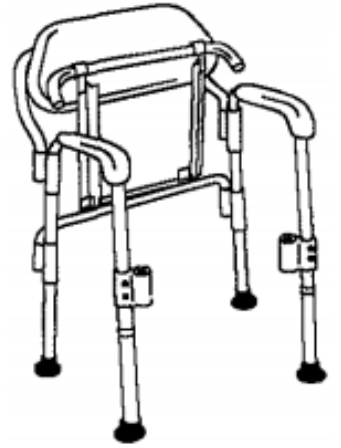


4

脚の前方にあるブラケットに座面支えを差し込みます。



5

座をフレームに取付けます。

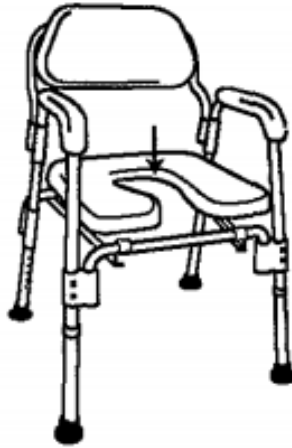

6


完成です。



トイレパンの差し込み方



高さ調節の方法

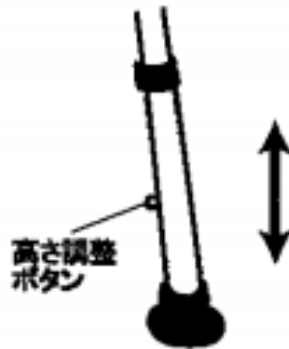

高さ調節ボタンを押し込み4本とも同じ高さに合わせてください。

仕様

商品名	トイレ椅子 CHIBI	
品番	0-6622-11	
型番	HT2097	
材質	座部・背もたれ・肘掛／ポリウレタンフォーム パイプ／アルミニウム	
サイズ	座面／410×410mm 座面の高さ／400～500mm 5段階調節可能(25mmピッチ)	
重量	5.8kg	
パイプ先端径	Φ28mm	
オプション品	交換用先端ゴム	HS9010(0-6629-11)
	交換用バケツ	HT0020(0-8128-11)

Made in Taiwan

保証規定	保証書																
<ol style="list-style-type: none"> 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。 <ul style="list-style-type: none"> ・誤使用、不当な修理・改造による故障。 ・本品納入後の移動や輸送或いは落下等による故障。 ・火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。 ・接続している他の機器が原因による故障。 ・車両・船舶等での使用による故障。 ・消耗部品、付属部品の交換。 ・本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。 ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。 本保証書は日本国内においてのみ有効です。 	<p>本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に左記保証規定1に基づく正常な使用状態での故障の際は左記保証規定により修理いたします。</p> <table border="1"> <tr> <td>品名</td> <td>トイレ椅子 CHIBI</td> </tr> <tr> <td>品番</td> <td>0-6622-11</td> </tr> <tr> <td>保証期間</td> <td>お買い上げ日より1年間</td> </tr> <tr> <td>お買い上げ日</td> <td>年 月 日</td> </tr> <tr> <td>お名前</td> <td>様</td> </tr> <tr> <td>ご住所</td> <td>TEL.</td> </tr> <tr> <td>取り扱い店名</td> <td>担当者印</td> </tr> <tr> <td>住所</td> <td>TEL.</td> </tr> </table>	品名	トイレ椅子 CHIBI	品番	0-6622-11	保証期間	お買い上げ日より1年間	お買い上げ日	年 月 日	お名前	様	ご住所	TEL.	取り扱い店名	担当者印	住所	TEL.
品名	トイレ椅子 CHIBI																
品番	0-6622-11																
保証期間	お買い上げ日より1年間																
お買い上げ日	年 月 日																
お名前	様																
ご住所	TEL.																
取り扱い店名	担当者印																
住所	TEL.																

 **アズワン株式会社**

商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

TEL 0120-711-875
FAX 0120-700-763
問合せ専用URL <https://help.as-1.co.jp/q>

修理・校正についてのお問い合わせは

修理窓口

TEL 0120-788-535
FAX 0120-788-763
問合せ専用E-mail repair@so.as-1.co.jp

受付時間：午前9時～午後5時30分まで
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用いただけません