

ニチバンの極低刺激性テープ
SKINERGATE™

スキナゲート™は「安全」「安心」「快適」に貢献する、肌へのやさしさを追求したニチバンの医療用巻絆創膏の総称です。

“安全”… 肌にやさしい粘着剤ではがす時の痛みをおさえます。

“安心”… 高い皮膚粘着力で固定がしっかり行えます。

“快適”… 通気性が高く、肌のムレをおさえます。

極低刺激性テープ

スキナゲート™

SKINERGATE™

医家向け




かぶれにくさと固定力。ふたつの性能が
新しい固定テープを生み出しました。

柔軟性の高いポリオレフィン系の
フィルム基材により皮膚の動きにフィット

皮膚に優しい粘着剤により はく離刺激を軽減


透湿性の高い基材と
アクリル系粘着剤によりムレにくい

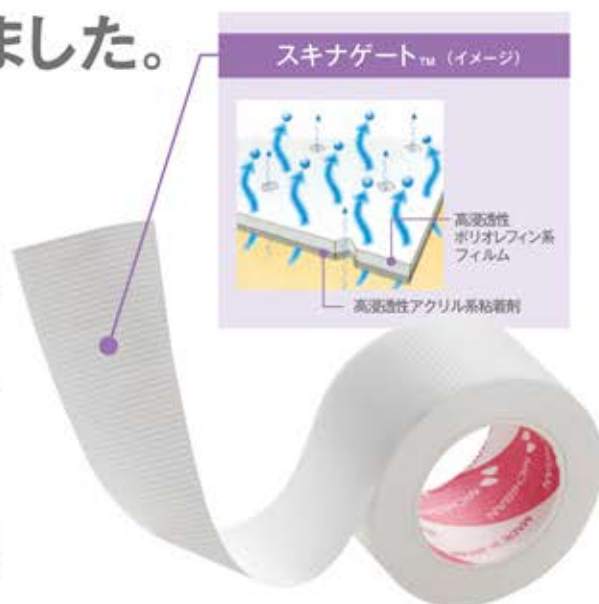

① 皮膚の動きにフィット

追従性が高く、皮膚へのストレスを緩和

テープ基材に柔軟性の高いポリオレフィン系フィルムを採用しました。グラフに示すように、小さな力でもよく伸び、肌と一体になって皮膚の小さな動きに追従します。

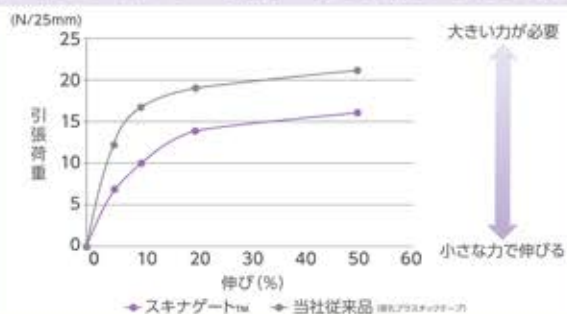

② はく離刺激の軽減

皮膚にやさしい粘着力と、ムレにくい構造で角質を保護し、はがす時の痛みも軽減


長時間貼っていても皮膚の浸軟化が起こりにくく、図に示すようにテープ粘着面の角質はく離量は、わずかです。このため、はく離時の痛みが軽減されるとともに、皮膚のバリア機能を守り、かぶれを抑えます。



③ ムレにくい

高い透湿性がムレを防ぎ、皮膚刺激を抑えます

粘着剤・テープ基材、どちらも高い透湿性があるため、グラフに示すように長時間貼っていても水分の貯留はごくわずかです。このためスキナゲート™はムレを防ぎ、かぶれにくさを実現しています。

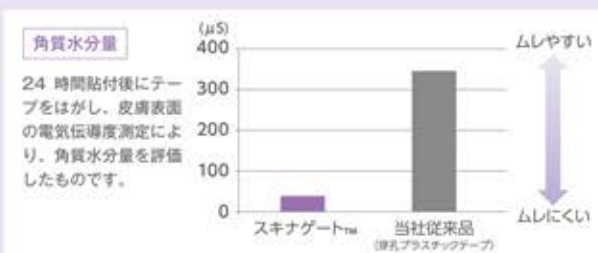

用途

- 脆弱な皮膚の患者さんの
- ガーゼ固定
- カテーテル、チューブ固定
- 透析時の回路固定

使用上の注意

- 伸ばした状態で貼付すると皮膚刺激の原因となります。
テープは伸ばさずに貼ってください。
- 傷口には直接貼らないでください。
- 体動が激しい場合やテープに負担がかかり過ぎると剥がれることがあります。
- 使用中は、固定のズレやテープの剥がれについて十分観察し、必要に応じて補強してください。
- 使用中に、発疹・発赤、かゆみ等の症状があらわれた場合は使用を中止してください。
- はがす時は、皮膚を傷めないよう体毛の流れに沿ってゆっくりはがしてください。

保管上の注意

- 水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所を避けて、室温で遮光保管してください。

<規格>

品番	サイズ	1箱	JANコード
SG12	12mm×7m	24巻	4987167039257
SG25	25mm×7m	12巻	4987167037901
SG50	50mm×7m	6巻	4987167039264

<スモールパック>

品番	サイズ	1箱	JANコード
SG12H	12mm×7m	12巻	4987167092818
SG25H	25mm×7m	6巻	4987167092825

TMIは商標です。

日本製
MADE IN JAPAN

ニチバン株式会社

〒112-8663 東京都文京区関口 2-3-3 ホームページ <http://www.nichiban.co.jp/>

お問い合わせ先 ニチバン株式会社 お客様相談室 TEL 03-5978-5622
受付時間 9:00~12:00、13:00~17:00(土、日、祝日を除く)