

■トラブルシューティング

ご使用中もしくは点検の際に何らかの異常や変化・疑問を感じたときは、以下の事を確認してください。
 それでも原因が不明なときは、故障や部品破損の可能性があります。
 お買い上げの販売店または、弊社カスタマー相談センターまでご相談ください。

こんなとき	対処のしかた
電源スイッチが「ON」にならない	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグがコンセントに接続されているか確認してください。 ●ヒューズが破損していないか確認してください。
圧力レベルを上げてしばらく経っても、圧力低下インジケーターが消えない	<ul style="list-style-type: none"> ●ホースとポンプが確実に接続されているか確認してください。 ●エアセルをつなぐチューブが確実に接続されているか確認してください。 ●CPRバルブが外れていないか確認してください。 ●エアセルが空気漏れを起こしていないか確認してください。
底付きを起こす	<ul style="list-style-type: none"> ●マットの圧力設定が低すぎる可能性があります。圧力レベルを上げ、しばらく様子を見てください。 ●ポンプが作動しているか、電源スイッチを確認してください。 ●ホース・チューブが外れていたり、曲がっていないか確認してください。
マットがずれる	<ul style="list-style-type: none"> ●マットのスナップボタンがしっかり止まっているか確認してください。 ●マットの巻き込み部がベッドのマットレスや敷布団の下に巻き込まれているか確認してください。
片方のホースに空気が流れていない	<ul style="list-style-type: none"> ●空気の流れが交互に切り替わりますので、問題ありません。
ポンプの音が異常に大きい	<ul style="list-style-type: none"> ●ポンプの上に物が載っていたり、他の物に触れている場合は取り除いてください。 ●ポンプを水平で安定した場所においてください。