

取扱説明書

Instruction Manual

松葉杖 (0-9843-43 ~ 45)

NST801S, NST801M, NST801L

この度は弊社製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
 本製品をより安全に、また良好な状態でご使用頂くために「取扱説明書」を必ず
 お読みになって正しくお使いください。
 「取扱説明書」をお読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に
 大切に保管してください。また本製品を譲渡、あるいは貸与される時は新しく
 使用される方が安全で正しい使用方法を知るために本書を製品本体の目立つ場所に
 添付してください。

本製品の耐用年数は **4** 年* です。

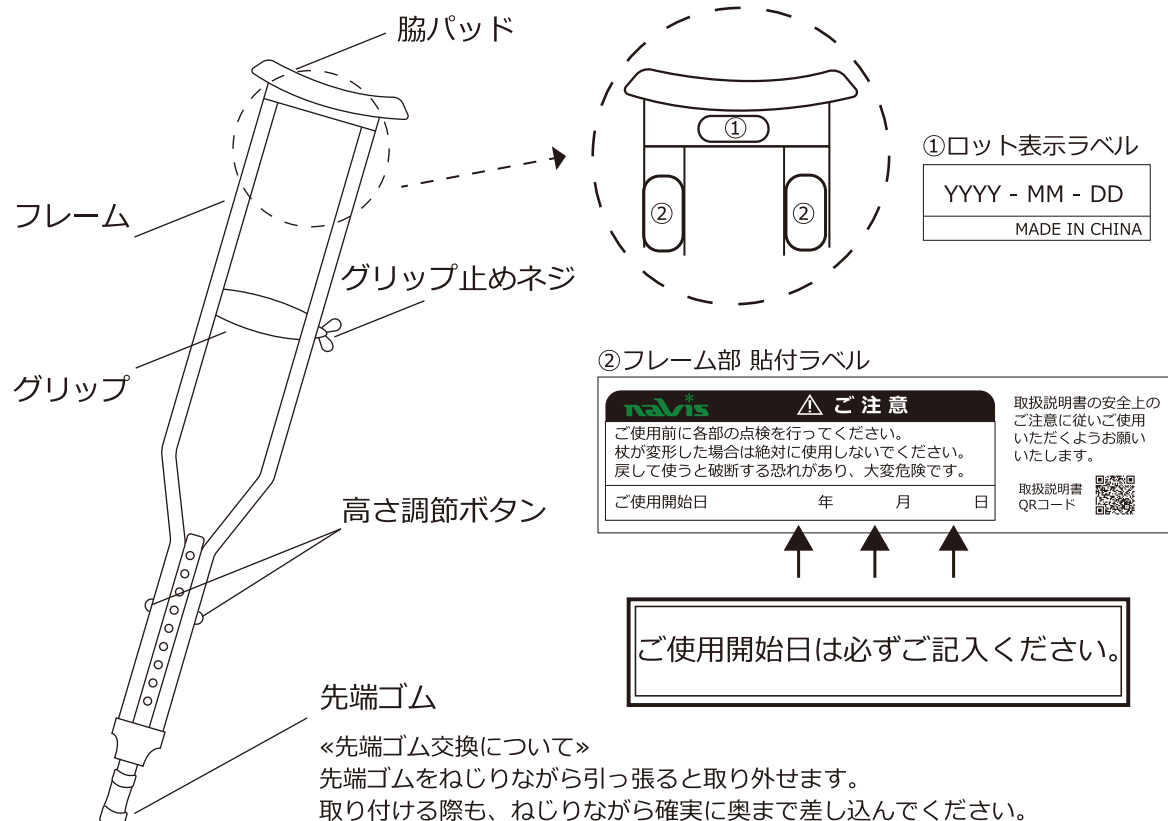
*(厚生労働省の補装具としての軽金属松葉杖の耐用年数です。)

ご使用から4年経過した場合、構成部品の劣化などから事故や破損が起こる
 可能性が高くなります。ご使用者様の安全のため、新しい製品への買い替えを
 推奨致します。

※耐用年数は消耗部品を除き、通常のご使用で修理不能となるまでの予測年数を
 示したものです。保証期間とは異なり、期間中の使用を保証するものではありません。

※耐用年数に満たない場合であっても、外観上明らかな異常(変形など)が見られた
 時は直ちに使用を中止してください。





製品概要



安全上のご注意

本取扱説明書では製品を安全に正しくご使用いただき、事故や損害を未然に防ぐため、安全上特に注意すべき事項についての情報を、その重要度や危険度によって下記のような警告表示で定義しますので、これらの指示に従って安全にご使用いただくようお願い致します。

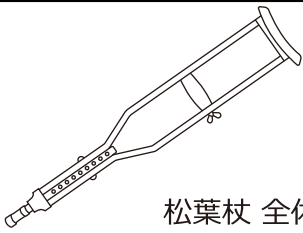

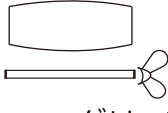
警告表示とその意味

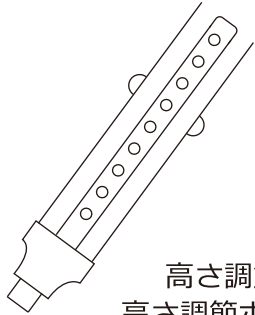
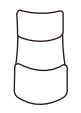
 危険	誤った取扱いをすると、死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される場合。
 警告	誤った取扱いをすると、死亡または重傷を負う危険性が想定される場合。
 注意	誤った取扱いをすると、傷害を負う危険および物的損害のみの発生が想定される場合。
 お願い	安全を確保するために注意が必要な事項。

警告


- 本製品は必ず専門の医師や指導員の指示に従って正しくご使用ください。
- ご使用前に各部のネジを点検し、異常がないことを確認してください。
- 脇パッド、グリップ、先端ゴムは使用状況あるいは時間経過と共に摩耗、劣化します。ご使用前に機能が保持されていることを確認してください。摩耗、劣化した状態で使用されますと転倒の原因となる恐れがあります。
- 定期的に（少なくとも1ヶ月に一度）は各部に割れや破損がないことを点検してください。
- フレームが変形した場合、錆びやひび割れが見られた場合は絶対に使用しないでください。突然破断するなど、大怪我につながる恐れがあります。

点検確認項目

 松葉杖 全体	ご使用開始日が記入されているか、4年以上経過していないか
	フレーム等に曲がりや変形・歪みが発生していないか
	フレーム等に著しい傷・亀裂・凹みなどが発生していないか
	がたつき・異音がないか
 脇パッド部	脇パッド取付部（本体）に亀裂、損傷、破損がないか
	脇パッドを取り付けた状態で緩み等がないか
	脇パッドに亀裂、損傷がないか
 グリップ グリップ止めネジ	グリップに亀裂、損傷等がないか
	グリップ止めネジは緩みなくしっかりととまるか
	グリップ位置固定後、グリップのがたつき、緩みがないか

 <p>高さ調節 高さ調節ボタン</p>	高さ調節ボタンがスムーズに動くか (押し込み / 飛び出し)
	高さ調節機能 (シャフト) スムーズに伸縮できるか
	任意位置に固定後、調整ボタンがしっかりと飛び出しているか
	高さ調節ボタンにヤサビ、損傷が発生していないか
	高さ調節穴に変形やサビ、損傷が発生していないか
 <p>先端ゴム</p>	フレーム側面のネジがついているか、緩み・がたつきはないか
	先端ゴムに亀裂、損傷が発生していないか
	先端ゴムは摩耗していないか
	本体にきっちりと奥まで刺し込み固定できているか

日常的に、上記点検項目をご確認ください。
 * 貸出前、しばらく使用せず保管していた製品を使用する前には必ず製品の状態を確認し、安全にご使用ください。



注意

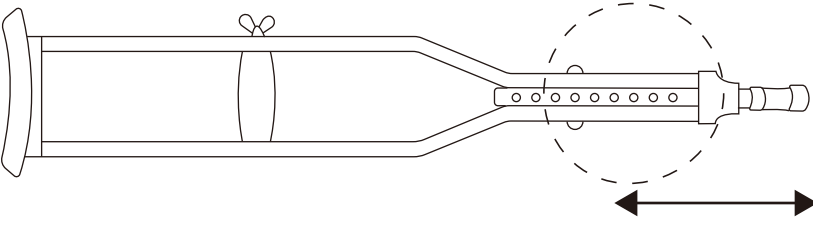
- 松葉杖は歩行補助として使用されるものです。椅子の代わり、護身用など用途以外の目的ではご使用しないでください。
- 使用時は周囲の状況に十分にご注意ください。(塗れた路面や段差のあるところ等) 周囲への注意を怠ると、思わぬ事故につながり怪我をする恐れがあります。
- 落としたり、物にぶついたり乱暴に扱わないでください。変形や破損の原因となります。
- 長さを調節する際は、本説明書の「調節方法」に従ってください。
- 本製品の寿命は使用頻度・使用状況により大きく左右されます。ただし、クラッチなどの劣化が見られた場合は、すぐに使用を止め、買い替えをご検討ください。


調節方法

※ 専門の医師や指導員に従って適切な長さに調節してください。

■ 全長調節方法

- (1) 高さ調節ボタンを押しながら先端を引っ張り、高さを調節します。
- (2) 直立した状態で脇パッドの高さが脇の下 3~5 cm が適切です。




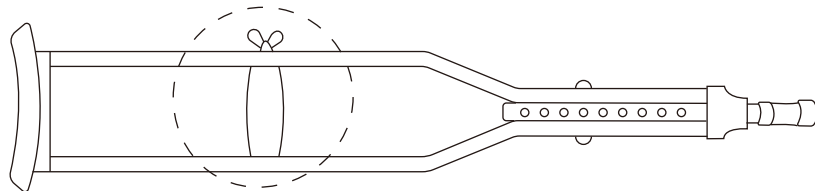


調節ボタン

調節ボタンを押し込み先端を伸縮してください
 * 指の挟み込みにご注意ください

■グリップ位置調節方法

- (1) グリップ止めネジを反時計方向に回し、取り外します。
- (2) グリップ内部の中芯（長ネジ）を抜き取り、グリップを移動させます。
※グリップを握った際に肘がやや曲がる程度が適切です。
- (3) 中芯（長ネジ）を挿入します。中芯の穴は長丸形状 [] となっていますので、穴の形に併せて中芯を最後まで押し込み回らない様にしてください。
- (4) ワッシャーを通した後に、グリップ止めネジを取り付け、しっかりと固定してください。
※がたつきが無いことを確認してから使用してください。



製品仕様

品番	0-9843-43	0-9843-44	0-9843-45
型番	NST801S	NST801M	NST801L
全長	940~1140mm	1140~1340mm	1340~1540mm
適応身長	137~157cm	157~178cm	178~198cm
脇あて～握り部	210~352mm	405~552mm	455~602mm
重量	約1.5kg/組	約1.6kg/組	約1.8kg/組
材質	フレーム / アルミニウム、 パッド・グリップ / TPR		
高さ調節	高さ / 約25mm間隔、脇下約38mm間隔		
シャフト先端径	Φ 22mm		
耐荷重	100kg / 本		
入数	2本/ 1組		

※改良のため仕様や外観を予告なく変更する場合があります。
※適応身長はあくまでも参考値としてお考えください。

■オプション

- 交換用パッド（1個）0-9843-51
- 交換用グリップ（1式）0-9843-52
セット内容：グリップ、中芯、止めネジ、ワッシャー
- 交換用先端ゴム（1個）0-6617-33

製品保証について

保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に右記保証規定（１）に基づく正常な使用状態での故障の節は右記保証規定により修理いたします。

品名	松葉杖
型番	NST801S, NST801M, NST801L
保証期間	お買い上げ日より1年間
お買い上げ日	年 月 日
お客様	様
ご住所	TEL :
取り扱い店名	担当者印
住所	TEL :

アズワン株式会社

〈保証規定〉

- (1) 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用された故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。
- (2) 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
 - ・ 誤使用、不当な修理・改造による故障。
 - ・ 本品納入後の移動や輸送あるいは落下等による故障。
 - ・ 火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
 - ・ 接続している他の機器が原因による故障。
 - ・ 車両・船舶等での使用による故障。
 - ・ 消耗部品、付属部品の交換。
 - ・ 本保証書の字句を訂正した場合購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- (3) ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
- (4) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

◎商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター
TEL 0120 - 711 - 875



スマートフォンから

 <https://help.as-1.co.jp/q>

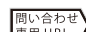
受付時間：午前9時～午後5時30分
土・日・祝日、および弊社休業日はご利用できません。

◎修理・校正についてのお問い合わせは

修理窓口
TEL 0120 - 788 - 535



スマートフォンから

 <https://www.as-1.co.jp/faq/support/>
(E-mail) repair@so.as-1.co.jp

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分
土・日・祝日、および弊社休業日はご利用できません。

2023年3月第3版 作成

Made in China