

## お手入れ方法

- ご使用後は、シャワーいすに付着した石けんやシャンプーを洗い流してください。
- 汚れのひどい時は薄めた中性洗剤で洗浄した後、洗剤を完全に洗い流してください。その後乾いた布で水分を拭き取り、自然乾燥させてください。
- お手入れの際には、各部の変形やネジのゆるみ、ガタツキ、脚ゴムの劣化・外れ、サビ、腐食などの異常がないか点検し、異常のある場合は使用を中止してください。破損してケガの原因になります。
- 直射日光があたらない、湿気のない場所で保管してください。

## &lt;注意&gt;

- 塩素系殺菌剤・消毒剤・漂白剤、シンナー、ベンジン、アルコール等は使用しないでください。劣化の原因になります。
- タワシや磨き粉等は使用しないでください。劣化の原因になります。
- 天日干しはしないでください。紫外線の影響で劣化の原因になります。

## 製品保証書

## 保証規定

- 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。
- 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
  - ・誤使用、不当な修理・改造による故障。
  - ・本品納入後の移動や輸送等による落下等による故障。
  - ・火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
  - ・接続している他の機器が原因による故障。
  - ・車両・船舶等での使用による故障。
  - ・消耗部品、付属部品の交換。
  - ・本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

## 保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に左記保証規定(1)に基づく正常な使用状態での故障の際は左記保証規定により修理いたします。

品名	
型式	
保証期間	お買い上げ日より1年間
お買い上げ日	年 月 日
お名前	様
ご住所	TEL.
取り扱い店名	担当者印
住所	TEL.

## ■商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター  
TEL 0120-711-875

問い合わせ  
専用URL

<https://help.as-1.co.jp/q>

受付時間：午前9時～午後5時30分

土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。

▲アズワン株式会社

2021年8月 第2版  
Made in China

取扱説明書  
Instruction Manual

## シャワー椅子

0-9847-31 NC352

この度は弊社製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。  
本製品をより安全に、また良好な状態でご使用頂くために「取扱説明書」をお読みになって正しくお使い下さい。  
「取扱説明書」をお読みになった後は、お使いになる方がいつでも見れる場所に大切に保管して下さい。また本製品を譲渡、あるいは貸与されるときには新しく使用される方が安全で正しい使用方法を知るために本書を製品本体の目立つ場所に添付して下さい。


## 製品概要

## ■各部材一覧

- |                 |                         |   |
|-----------------|-------------------------|---|
| ① 背もたれ          | ④ 脚部 (4本)               | ⑦ 丸頭ネジ+ワッシャ: 5セット<br>(背もたれパイプ用 4セット<br>脚部パイプ中央用 1セット) |
| ② 座面            | ⑤ 背もたれパイプ (2本)          |   |
| ③ 脚部パイプ<br>(2本) | ⑥ 皿ネジ: 脚部パイプ四方用<br>(4本) |   |



本体組立時

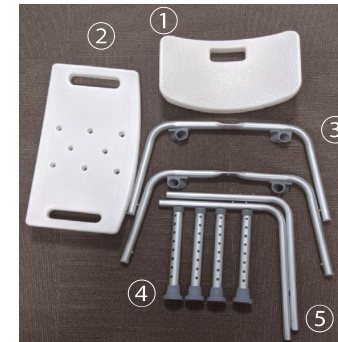

部材

## ■仕様



- サイズ：幅 500～560mm × 奥行 440～500mm × 高さ 680～860mm
- 材質：フレーム/アルミニウム、座面・背もたれ/PE (ポリエチレン)
- 座面サイズ：幅 490mm × 奥行 290mm
- 座面高さ (座面中央部)：約 335～510mm (25mm 間隔・8 段階調節)
- パイプ先端径：φ26.4mm
- 耐荷重：100kg
- 重量：約 3kg

※改良のため仕様や外観を予告なく変更する場合があります。

## 安全上のご注意

この取扱説明書では製品を安全に正しくご使用いただき、事故や損害を未然に防ぐため、安全上特に注意すべき事項についての情報を、その重要度や危険度によって下記のような警告表示で定義しますので、これらの指示に従って安全にご使用頂くようお願いいたします。

### 警告表示とその意味

 警告	誤った取扱いをすると、死亡または重傷を負う危険性が想定される場合。
 注意	誤った取扱いをすると、傷害を負う危険および物的損害のみの発生が想定される場合。

### 警告


- ご使用者が身体の安定を保てない場合は、必ず介助者が常時付き添って下さい。
- ご使用前に必ず点検を行って下さい。各部の変形やネジのゆるみ、ガタツキ、脚ゴムの劣化・外れ、サビ、腐食などの異常がないか点検し、異常のある場合は使用を中止して下さい。各部の異常は破損してケガの原因になります。
- 後方に大きくのけぞり、背もたれに体重をかけ過ぎないで下さい。転倒してケガの原因になります。
- 背もたれや座面の端を支えにして立ち上がったり、手すり代わりに使用したりしないで下さい。転倒してケガの原因になります。
- 踏み台代わりに座面の上で立たないで下さい。破損してケガの原因になります。
- 人が座った状態で本体を持ち上げたり、移動させたりしないで下さい。破損してケガの原因になります。
- 耐荷重100kgを超える方は使用しないで下さい。破損してケガの原因になります。
- 傾斜が無く、平らな床面に置いて使用して下さい。不安定な場所に置くと転倒してケガの原因になります。
- シャワー椅子以外の用途での使用や、分解や改造をしないで下さい。破損してケガの原因になります。
- 脚の高さが4ヶ所とも同じになるように調節して下さい。高さが合っていないと転倒してケガの原因になります。
- プッシュボタンがパイプの穴から完全に出た状態でロックされ、半掛かりになっていないことを確認して下さい。ロックが不完全な状態で使用すると転倒してケガの原因になります。
- 脚ゴムは4ヶ所とも取付けた状態で使用して下さい。脚ゴムが外れると座面の傾きや脚の滑りが生じ、転倒してケガの原因になります。脚ゴムが劣化している場合は、交換して下さい。脚ゴムの交換は4ヶ所同時に行ってください。  
※シャワー椅子交換用脚ゴム:0-9847-21 (1個入)

### 注意

- ご使用中に異常を感じた場合は、直ちに使用を中止して下さい。
- 浴槽の中など水中に沈めて使用しないで下さい。パイプが腐食し破損の原因になります。
- ご使用後はシャワー椅子に付着した石けんやシャンプーを洗い流して下さい。滑りやすくなり、転倒してケガの原因になります。
- 熱湯をかけたり、火気に近づけたりしないで下さい。変形や破損の原因になります。
- 塩素系殺菌剤・消毒剤・漂白剤、シンナー、ベンジン、アルコール、温泉水等は使用しないでください。劣化の原因になります。

## 組立方法

- 座面に脚部パイプの中間の凹凸を組み合わせ、皿ネジ4本で四方の4点を丸頭ネジ+ワッシャで中央を固定し写真①の状態に組み立てます。背もたれパイプが取り付けられる向きに取り付けて下さい。脚部の取り付け高さ調整方法は下記【座面高さ調整方法】を参照してください。

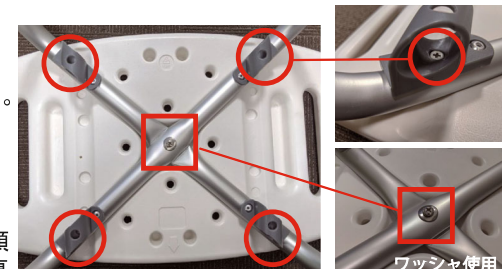


- 背もたれに背もたれパイプを、丸頭ネジ+ワッシャ4本で取り付け写真②の状態に組み立てます。

- 背もたれを座面に取り付けて下さい。(写真③)

写真①  
取付穴 (5ヶ所)  
○は皿ネジで固定  
□は丸頭ネジ+ワッシャで固定



写真②  
取付穴 (左右2ヶ所づつ)  
□は丸頭ネジ+ワッシャで固定

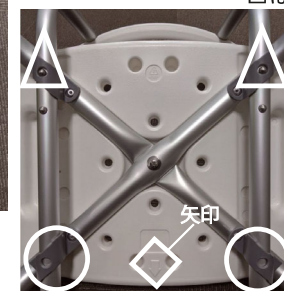

写真③  
座面裏4ヶ所(○、△)に背もたれを差し込み、△の2ヶ所はプッシュボタンで背もたれ位置を固定してください。座面裏に矢印が付いている方が背もたれと反対側です。

## 座面高さ調節方法

- 座面の高さは8段階に調節できます。
- 調節は、脚部にあるプッシュボタンを押しながら脚ゴム側のパイプをスライドし、脚の長さを調節してください。プッシュボタンが「カチッ」という音がして飛び出していることを確認してください。
- プッシュボタンが見えなくなった場合は、脚ゴム側のパイプを一度抜取り、プッシュボタンの位置を確認後、再度パイプを取り付けてください。

### <警告>

- 脚の高さが4ヶ所とも同じになるように調節してください。高さが揃っていないと転倒や事故の原因になります。
- プッシュボタンがパイプの穴から完全に出た状態でロックされ、半掛かりになっていないことを確認してください。ロックが不完全な状態で使用すると、転倒や事故の原因になります。
- 高さを調節する際は、指を挟まないように注意してください。

### <注意>

- ご使用前に、各部の変形やネジのゆるみ、ガタツキ、脚ゴムの劣化・外れ、サビ、腐食などの異常がないか点検し、異常のある場合は使用を中止してください。