

# 取扱説明書

Instruction Manual

navis\*

## 折りたたみ便器椅子

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠に有り難うございます。  
ご使用前に、本取扱説明書をよくお読みになり、末永くご愛用くださいますよう  
御願い申し上げます。  
また、本取扱説明書はお読みいただきました後も大切に保管してください。

### 外観図



### 安全上のご注意

- 本品はトイレ用の椅子です。それ以外の用途では使用しないでください。
- 設定された耐荷重（約100kg）以上の方には、ご使用しないでください。
- 座面以外の部分に腰をかけないでください。転倒してケガをすることがあります。
- 誤った使用方法や無理な荷重は、変形・損傷の原因になりますのでおやめください。
- 使用中にパイプの変形やネジのゆるみによりガタツキが生じた場合はすぐにご使用を中止して下さい。そのままご使用されますとケガの原因になります。

### 特長

- 手すり付きで快適にご使用できます。
- 簡単な操作で折りたたみが可能で、収納にも便利です。

## お手入れ方法

- 汚れのひどい時は薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを落とし、水を浸した布で洗剤液をよく拭き取ってください。その後乾いた布で軽く拭き、自然乾燥させてください。
- シンナーやベンジン、アルコールは絶対に使用しないでください。

## 組立方法

①折りたたんだ状態



②肘掛け（脚）部を開きます。



③両脇にあるパイプに、座面支えをしっかりとめ込みます。



④バケツおよびフタを取り付け、便座を下げます。



⑤高さ調整の方法

脚に付いている高さ調整ボタンを押しこみ、4本とも同じ高さにして、カチッと音のする位置で合わせてください。



⑥本体にぐらつきがないか、確認してください。

## 仕様

### 折りたたみ便器いす

品番	0-9853-21
型番	NC616
材質	便座・バケツ／PP 座面・背もたれ・アームレスト／PE パイプ／アルミニウム
サイズ	400×450×(390-490)mm
重量	約3.9kg
耐荷重	100kg
パイプ先端径	25mm
セット内容	折りたたみ便器椅子本体・バケツ・バケツフタ 各1個

### 交換バケツ

品番	0-9853-31
型番	交換用バケツ
材質	PP(ポリプロピレン)
耐熱温度	約100℃

### 先端ゴム足

品番	0-9853-32
型番	交換用脚ゴム

\*改良のため仕様および外観を予告なく変更することがあります。

Made in china

# 製品保証

## 保証規定

- (1) 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。
- (2) 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
  - ・誤使用、不当な修理・改造による故障。
  - ・本品納入後の移動や輸送或いは落下等による故障。
  - ・火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
  - ・接続している他の機器が原因による故障。
  - ・車両・船舶等での使用による故障。
  - ・消耗部品、付属部品の交換。
  - ・本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- (3) ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
- (4) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

## 保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に左記保証規定(1)に基づく正常な使用状態での故障の節は左記保証規定により修理いたします。

品名	
型式	
保証期間	お買い上げ日より1年間
お買い上げ日	年 月 日
お名前	様
ご住所	TEL.
取り扱い店名	担当者印
住所	TEL.

商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

フリーダイヤル ☎ 0120-711-875  
FAX 0120-700-763  
問合せ専用URL <https://help.as-1.co.jp/q>

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分

修理・校正についてのお問い合わせは

テクニカルセンター

フリーダイヤル ☎ 0120-788-535  
FAX 0120-788-763  
問合せ専用E-mail [repair@so.as-1.co.jp](mailto:repair@so.as-1.co.jp)

土・日・祝日及び弊社休業日は、ご利用できません

2015年11月 初版作成