

■汚染度チェック用キット

1-6182-01

■検査結果

タンパク質の
汚れが無い



綿棒の拭った部分
及び発色液に変化が
無い「陰性」

水分を多く含ん
だタンパク質の
場合、青色反応
が試薬に拡散



発色液が青色
「陽性」



発色液が緑色
アルコール残留
アルコール揮発後
再試験

タンパク質の残渣
(汚れ)が有る



綿球が青色
「陽性」



綿球が青色で
若干脱色
「陽性」



綿球が青色・青色の沈殿
または青色の斑点で発色
液は完全に脱色
「陽性」