

ラムダライン LINE シリーズ 装着方法

ラムダライン LINE

ラムダラインは、Λ(ラムダ)形になった保形テープが立体構造をしっかりキープするマスクの愛称。

■構成

- アジャスター (しめひも調節部)
- 鼻当て (内側クッション付)
- しめひも 上側
- しめひも 下側

使い捨て式防じんマスク

DD02-S2-2K	DS2
DD02V-S2-2K	DS2
DD02-S1-3	DS1

装着・外し方の動画はこちら

N95マスク

DD02-N95-2K	N95
DD02V-N95-2K	N95
DD01-N95-2K	N95
DD01V-N95-2K	N95



1 DD01シリーズは 1 からスタート

保形テープ アジャスター

しめひも 下側

しめひもをほどきます。

2 DD02シリーズは 2 からスタート

鼻当て

マスク内側

マスクを広げて鼻当て(---囲み部分)を平らにします。
DD01シリーズは、保形テープ(---囲み部分)の折りぐせを直します。

3

しめひも 下側

しめひも下側を首にかけます。

4

しめひも 上側

しめひも上側をマスクの外側にします。マスク両端を持ち、あごから口と鼻を覆います。

5

しめひも 上側

鼻当て

しめひも 下側

片手でマスクを押え、もう片方の手でしめひも上側を頭頂部にかけます。

6

アジャスター

アジャスターを持ち、しめひもを引っ張り、長さを調節します。上下のしめひも(○部分)の張り具合を調節します。

7

鼻当て

鼻当てを両手の指で押えて、鼻に合わせます。

8 密着性の確認 (シールチェック ユーザーシールチェック)

密着性の良否を確認する機器(マスク内圧・フィッティングテスター等)を用いる(定量法)か、次の方法(定性法)でご確認ください。

マスク全体を両手で覆い、

- 陽圧法** 息を吐きます。
- 陰圧法** すばやく息を吸います。

※排気弁付きは、陰圧法でシールチェックをしてください。

マスクと顔の間から空気の漏れがなければ、密着性は良好です。

正しく装着して漏れ込みを防ぎましょう!

漏れがある場合は、次を調節してください。

- マスクの位置
- 鼻当て
- しめひも