
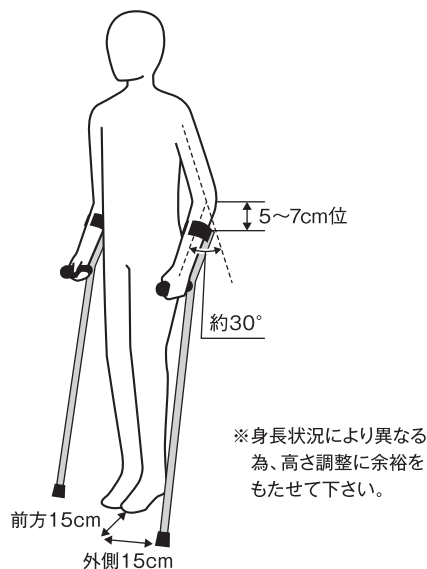


# ロフトランドクラッチ 取扱説明書

## 【高さの調整】

- 脚及びカフの高さ調整ボタンを押し込みながらパイプを出し入れし調整します。
- 握りの位置は肘がやや曲がるくらいに調整してください。
- 肘受けに支柱は、肘関節の運動の邪魔にならない範囲でできるだけ伸ばしてください。
- 高さは医師や専門のアドバイザーの指導にしたがって、正しく調整してください。

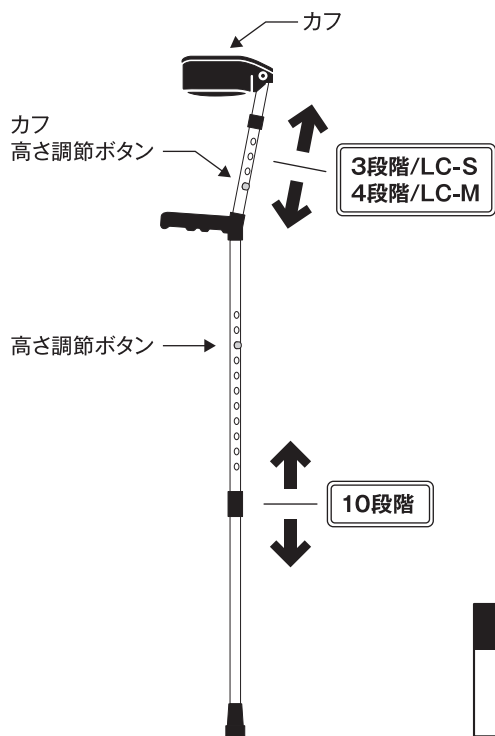

### 使用時は以下を確認・点検してください。

各高さ調整ボタンがしっかりと突き出して、固定されている先ゴムが正しく装着されている事を確認してください。

## 【使用上の注意】

- 使用の方向は上右図のとおりです。日ごろの点検を怠らないようにしてください。
- 滑りやすい場所では、歩幅を小さくして滑らないように注意してください。
- 先ゴムが磨減しているときは、新しい正しいサイズの前ゴムと交換してください。
- 使用に際しては医師や専門アドバイザーの指導に従って正しくご使用ください。
- 異常や不都合が発生した場合は速やかに使用を中止し、専門家に点検・復旧していただき、ご使用ください。
- 本来の目的以外のご使用はけがの原因になりますので、絶対に使用しないでください。
- 万が一商品が変形した場合は無理に曲げ戻して使用しないで、販売店にご相談ください。
- 高温の場所(ストーブ前・車内・日差しの強い場所)は変形の原因になるので避けてください。
- 製品のお手入れには柔らかい布と中性洗剤を水で溶かしたもので行ってください。

## 保証書

ご住所 〒

お名前

お買上げ日

<販売店>  
住所  
店名  
TEL

印

※保証期間はご購入後一年後です。※ご質問・お問い合わせは販売店へお願いいたします。

**MAKI** 株式会社 **マキテック** ライフテック事業部  
〒454-0984 愛知県名古屋市中川区供米田2-1001

お問合せ、ご相談はお客様サービスセンターへ  
**0120-865511** (フリーダイヤル)  
月曜日～金曜日 (年末年始/祝祭日を除く) 9:00～17:00