








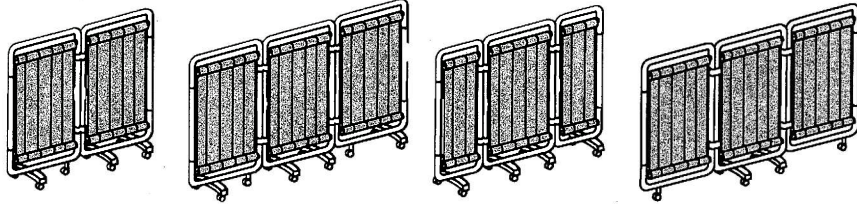


クロスメディカルスクリーン

組立説明書 (抗菌タイプ)

このたびは、当社製品をお買い求めいただきまして、ありがとうございます。ご使用前に説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。また、説明書は大切に保管してください。

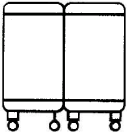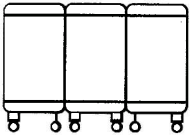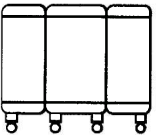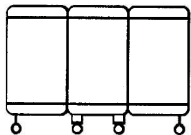


■付属部品表

型番	AM-632G-CL	AM-633G-CL	AM-63622G-CL	BMシリーズ (全機種)
本体	2連 	3連 	3連(中央幅広タイプ) 	
脚 	3個	4個	4個(2個は本体に取付済です)	2個
受部品 	3個	4個	4個(2個は本体に取付済です)	2個
ナット 	3個	4個	4個(2個は本体に取付済です)	2個
平座金 	3個	4個	4個(2個は本体に取付済です)	2個
レンチ 	1個	1個	1個	1個

■脚部の組立方法



- ① 組立て前に、部品を確認してください。
- ② 図の様に、脚をレンチで取付けてください。
(このとき、必ず受部品と平座金も取付けてください。)
(受部品は図の様に、凸部が内側になる様に取付けてください。)
(本体をたたんで、横にした状態で組立ててください。)

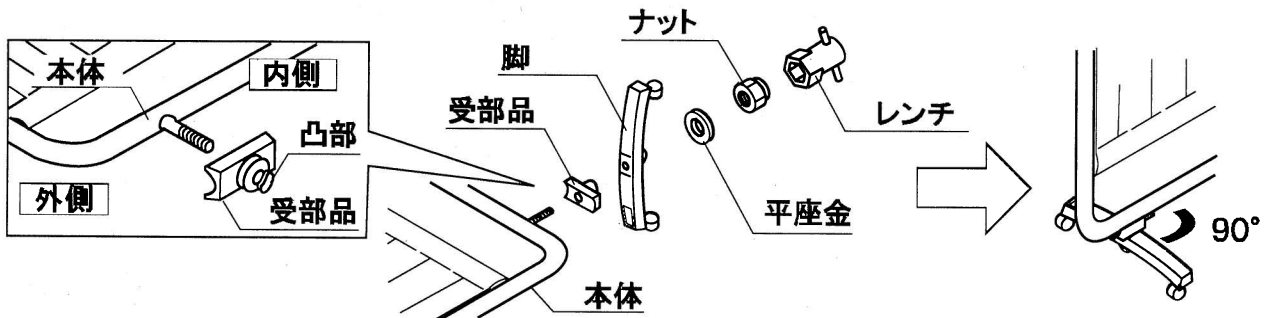

- ③ それぞれの脚を締付けて、本体に対して90°になる様にしてご使用ください。
(ネジ等が、ゆるんだまま使用しないでください。使用中にも点検してご使用ください。)

ご使用上の注意

- 屋内使用を目的としています。
屋外での使用は、強風で転倒したりして危険です。
また雨等がかかるとカーテンの変色やフレームの錆の原因になります。
- よりかかったり、強く押ししたりすることは避けてください。
転倒や破損の原因となり危険です。
- 本体に物を立てかけたり、吊るしたりすることは避けてください。
極度に重い物を立てかけたり吊るしたりした場合、本体の変形や転倒の原因となり危険です。
- 本体を水平に保つように調整して設置してください。
傾斜している場所での使用は転倒の原因になり危険です。
- 脚を本体に対して直角(右図参照)になるように設置してください。
脚の開き方が小さいと転倒の原因になり危険です。
- キャスターを使って移動する時は、ゆっくりと移動してください。
勢いを付けて移動しますと不安定になり転倒の原因になり危険です。
- 直射日光やストーブなどの熱が直接当たる場所や、湿気・乾燥の著しいところでは使用を避けてください。カーテンは“防災製品”ですが変色や変形の原因になります。また引火した場合、火災の原因になり危険です。
- 「ギヤジョイント式」の連結部にはギヤを内装しています。
分解したり、強い衝撃を加えないでください。
故障の原因になります。

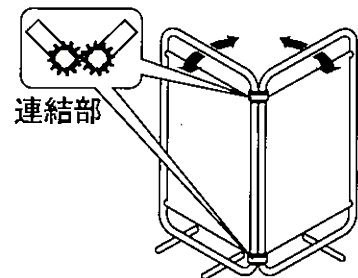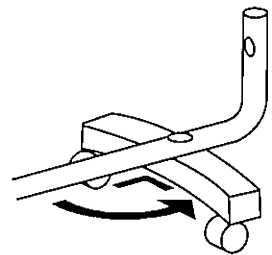

- ◎ “防災製品”とは、カーテン布地に難燃ポリエステルを使用し、火だねに触れても燃え広がりにくいいため、火事の媒体になりにくい製品をいいます。
- ◎ カーテン布地は“SEKマーク”製品です。
 - ・ SEKマーク（赤）について
繊維製品新機能評価協議会(JAFET)の基準をみたした
“繊維上の菌の増殖を抑制する”制菌加工繊維製品です。
黄色ブドウ球菌やMRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)などに対して増殖を抑制します。
また、ノンホルマリン加工剤により環境にも配慮しています。