

【注意事項】

バトルウィン 足裏プロテクター M サイズ 8 枚入

【使用上の注意】

- ・本品は治療が目的の製品ではない。
- ・キズぐち、皮ふ炎等には貼らない。
- ・皮ふ刺激や皮ふ剥がれ等の原因になるので過剰に引張って貼らない。
- ・皮ふを清潔にし、よく乾かしてから使用する。
- ・発疹・発赤、かゆみ等が生じた場合は使用を中止し、医師又は薬剤師に相談する。
- ・皮ふのダメージを減らすため、1 回あたり 12 時間以内を目安に使用する。ただし、かゆみ等は生じた場合は、直ちに使用を中止する。
- ・皮ふへのダメージが出やすくなるので、同じ場所に繰り返し貼る場合は、半日程度肌を休ませ、皮ふに赤み等の異常がないことを確認して使用する。
- ・水濡れ、高温、多湿、直射日光をさけ、小児の手の届かないところに保管する。
- ・はがす際はゆっくりはがしてください。ぬるま湯に浸すとはがしやすくなり、刺激が少ないです。
- ・粘着剤や糸が皮ふに残った場合は、ワセリンやハンドクリーム等を粘着剤になじませると取りやすくなります。

- ・ストッキングとテープが貼り付くことがあるため、ストッキングでのご使用には、
ご注意ください。

- ・靴下にのりが残った場合は、ぬるま湯に浸して洗剤で洗うと落ちやすいです。