

国立大学医学部と共同開発

ゆびサポくん

尺側偏位でお困りの方に！

正しい位置に指を固定し、動かしやすく



指を一本ずつ固定できる
でぶくろ型サポーター

意匠登録済

説明動画はコチラ



装着手順！

- ①手袋に手を入れます。
- ②手首の面ファスナーをしっ
かり止めてフィットさせま
す。
- ③人差し指を外側から内側
（親指方向）へ引っ張るよう
にバンド（面ファスナー）
を固定します。
- ④同様に中指、薬指、小指の
順に外から内側へバンド
（面ファスナー）を固定し
装着完了です。



固定強さの目安

- ・人差し指はきつく締め過ぎないようにご注意ください。
- ・うっ血する場合は人差し指は固定せず、中指、薬指、小指のみを固定し、装着下さい。
- ・各指の固定強さのバランスは右図のイメージをご参考下さい。



人差し指から小指に向かって徐々に強く締めていきます。

⚠ 使用上の注意

●本製品は右手、左手用があります。左右をご確認の上、ご使用下さい。●本製品は手指の固定、及び動作の補助を目的とするものであり、疾患を治療できるものではありません。●サイズをご確認の上、手にあったサイズの製品をご使用下さい。●装着部に傷、しびれ、腫れ、湿疹、かぶれなどの異常がある場合は使用を控えて下さい。●長時間装着する場合は、適宜装着し直してください。圧迫が強すぎる場合、皮膚障害や血行障害などを起こすおそれがあります。●本製品の使用中に次の異常が発生した場合、ただちに使用を中止し、担当医師に相談して下さい。（装着中の違和感、装着部にケガ、傷、痛み、しびれ、腫れ、湿疹、かぶれなどが発生した場合）●使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干しして下さい。●高温、多湿、直射日光の当たる場所を避けて常温で保管して下さい。●改良のため、仕様を予告なく変更することがあります。

洗濯方法



素材 ポリエステル
ナイロン、ポリウレタン

※仕様等は改良等の為、予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
※本カタログの記事、写真、イラストの無断複写・複製を禁じます。

製造販売元 ウインセス株式会社
〒761-1404 香川県高松市香南町横井464番地1
TEL：087-879-0880
※受付時間9:00～17:00（土日祝を除く）

2021年5月A