

一般医療機器

EOG EOG 滅菌済

Design Your Voice
HAKUZO **Hakuzo**

救急絆創膏 / カテーテル被覆保護材

ELEGUARD Series

エレガード シリーズ

創傷面の被覆保護、注射針・カテーテル等の穿刺部の固定及び被覆保護を目的とした、透湿性の良いフィルムドレッシングです。



フィルムタイプ



パッド付きタイプ



I.V. 用切り込み入りタイプ

ハクゾウメディカル株式会社

ELEGUARD Series

エレガード シリーズのこだわり


エレガードシリーズは、貼付時の作業性から管理のしやすさ、患者の快適性まで、医療現場の声をもとに設計されたフィルムドレッシングです、



01 操作性

使いやすさを追求した設計。


剥離紙が窓枠状になっており、貼付しやすくなっています。貼付時のフィルム同士の貼り付きや位置ずれを軽減し、処置時の作業性向上に配慮しました。

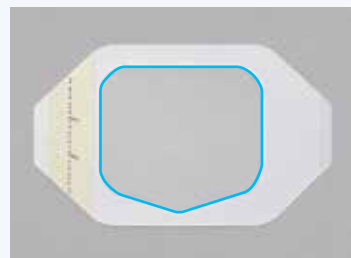

02 日付管理をスムーズに

記録・管理のしやすさをサポート。

date テープが付属しており、貼付日や交換日の記録・管理をスムーズに行うことができます。患者様ごとの処置管理や観察記録にも役立ち、スタッフ間での情報共有をサポートします。

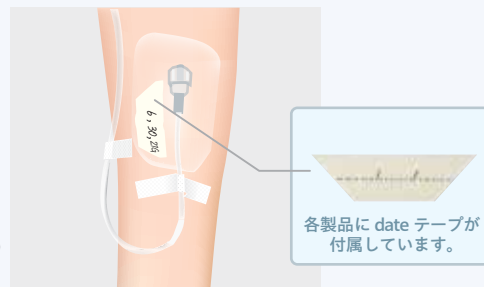

03 極薄フィルムで快適な貼り心地

肌へのやさしさと固定力を両立。

25 μ mの極薄ウレタンフィルムを採用。しなやかで丈夫な素材が肌にやさしくフィットし、貼付時の違和感を軽減します。身体の動きにもなじみやすく、長時間の貼付でも快適な使用感をサポートします。

04 防水性と快適性を両立

水に強く、快適な貼付環境を長くキープ。

水蒸気を適度に透過しながら、水滴は通しにくい防水設計。ムレを軽減しつつ、外部からの水分侵入を防ぎ、快適な貼付環境を維持します。また、優れた密着性により、長時間貼付でも脱落しにくくなっています。入浴時や日常動作の多い場面でも、安定した固定力をサポートします。

ELEGUARD FILM NATURAL





エレガードフィルム NATURAL 6×7cm/50 枚入

水蒸気透過性に優れたフィルムドレッシングです。



構成

- 剥離紙(表面:窓枠状)
- 粘着テープ
- 剥離紙(裏面:全面)

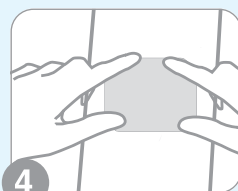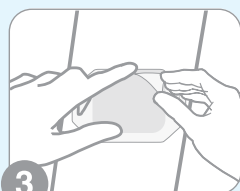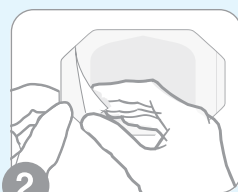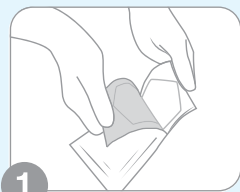

- 1) 開封し滅菌済みの本品を取り出してください。(図①)
- 2) 裏面の剥離紙をゆっくり剥がしてください。(図②)
- 3) 処置部等が粘着テープの中心にくるように軽く押さえながら確実に貼付し、表面の剥離紙をゆっくり剥ぎ取ってください。(図③)
- 4) 本品周囲を軽く押さえて馴染ませてください。(図④)
- 5) 使用後、本品を剥がす場合は、まわりの皮膚やカテーテルを押さえながらゆっくりと剥がしてください。剥がれにくい場合、及び粘着剤の残渣が見られる場合は医療用剥離剤を使用してください。

ELEGUARD FILM PAD





エレガードフィルム PAD 6×7cm(パッドサイズ: 3×4cm)/50 枚入

水蒸気透過性に優れた、パッド付のフィルムドレッシングです。



構成

- 剥離紙(表面:窓枠状)
- 粘着テープ
- 不織布シート
- ポリエチレンシート
- 剥離紙(裏面:全面)
- 非固着性パッド

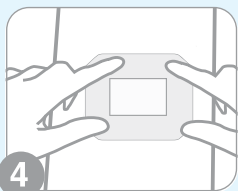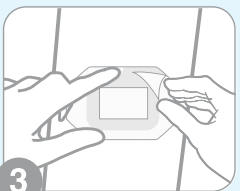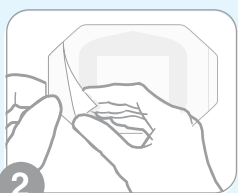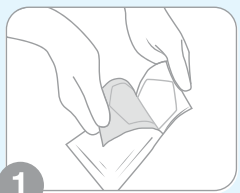

- 1) 開封し滅菌済みの本品を取り出してください。(図①)
- 2) 裏面の剥離紙をゆっくり剥がしてください。(図②)
- 3) 処置部等が非固着性パッドの中心にくるように軽く押さえながら確実に貼付し、表面の剥離紙をゆっくり剥ぎ取ってください。(図③)
- 4) 本品周囲を軽く押さえて馴染ませてください。(図④)
- 5) 使用後、本品を剥がす場合は、まわりの皮膚やカテーテルを押さえながらゆっくりと剥がしてください。剥がれにくい場合、及び粘着剤の残渣が見られる場合は医療用剥離剤を使用してください。

ELEGUARD FILM I.V.

エレガードフィルム I.V.


6×7.3cm/50 枚入

水蒸気透過性に優れたフィルムドレッシングです。(切り込み入り、不織布テープ付属)



構成

- 剥離紙(表面:窓枠状)
- 粘着テープ
- 剥離紙(裏面:全面)

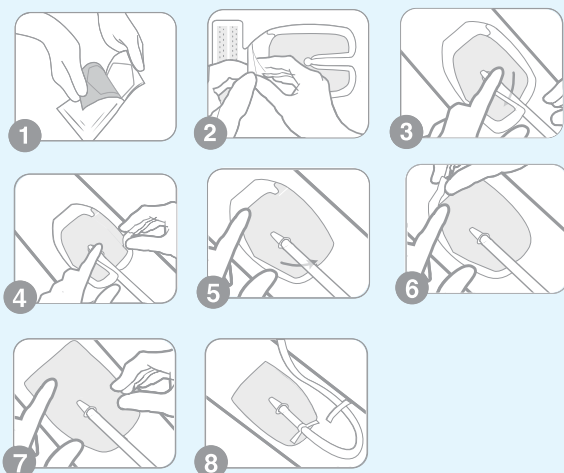

- 1) 開封し滅菌済みの本品を取り出してください。(図①)
- 2) 裏面の剥離紙をゆっくり剥がしてください。(図②)
- 3) カテーテル挿入部位が粘着テープの中心にくるように軽く押さえながら貼付し、切れ込みの右側をカテーテルの下に位置するように貼付してください。(図③)
- 4) 表面の短い剥離紙を剥がしてください。(図④)
- 5) 切れ込みの左側をカテーテルの下を通して重ね合わせるように貼付します。(図⑤)
- 6) 表面の長い剥離紙を剥がしてください。(図⑥)
- 7) 本品周囲を軽く押さえて馴染ませてください。(図⑦)
- 8) 必要であれば、付属の固定用テープで留置針等の固定やカテーテルのルート等の固定をしてください。(図⑧)
- 9) 使用後、本品を剥がす場合は、まわりの皮膚やカテーテルを押さえながらゆっくりと剥がしてください。剥がれにくい場合、及び粘着剤の残渣が見られる場合は医療用剥離剤を使用してください。



「添文ナビ」アプリを使ってGS1コードから添付文書をご確認できます。

品 番	規 格	入 数	1 梱入数	JAN コード	GS-1 コード
3155160	I.V. 6cm×7.3cm	50 枚 / 箱	20 箱 / ケース	 4 958286 721200	 (01)04958286721200
3155170	ナチュラル 6cm×7cm	50 枚 / 箱	20 箱 / ケース	 4 958286 721217	 (01)04958286721217
3155180	パッド 6cm×7cm	50 枚 / 箱	20 箱 / ケース	 4 958286 721224	 (01)04958286721224



ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
TEL. 06-6942-0451 <https://www.hakuzo.co.jp/>

コンシューマー課 ☎06-6809-4318 阪神営業所 ☎078-262-1634
 東京支店 ☎03-3522-6720 神戸営業所 ☎078-940-8975
 北大阪支店 ☎072-653-4045 広島営業所 ☎082-849-4188
 南大阪支店 ☎0721-20-2900 福岡営業所 ☎092-481-5921
 仙台営業所 ☎022-393-7434 熊本営業所 ☎096-345-2253
 関東営業所 ☎03-5809-4780 札幌駐在所 ☎011-788-8009
 西東京営業所 ☎042-646-0451 沖縄駐在所 ☎098-941-5320
 名古屋支店 ☎052-769-6021
 三重営業所 ☎059-350-3844
 京都営業所 ☎075-603-4826
 大阪中央営業所 ☎06-6943-6118