

手術用照明灯 取扱説明書


(仕様書)

LA-65KX / LA-45KX /LA-20KX




1. 各部の名称及び機能

LA-65KX

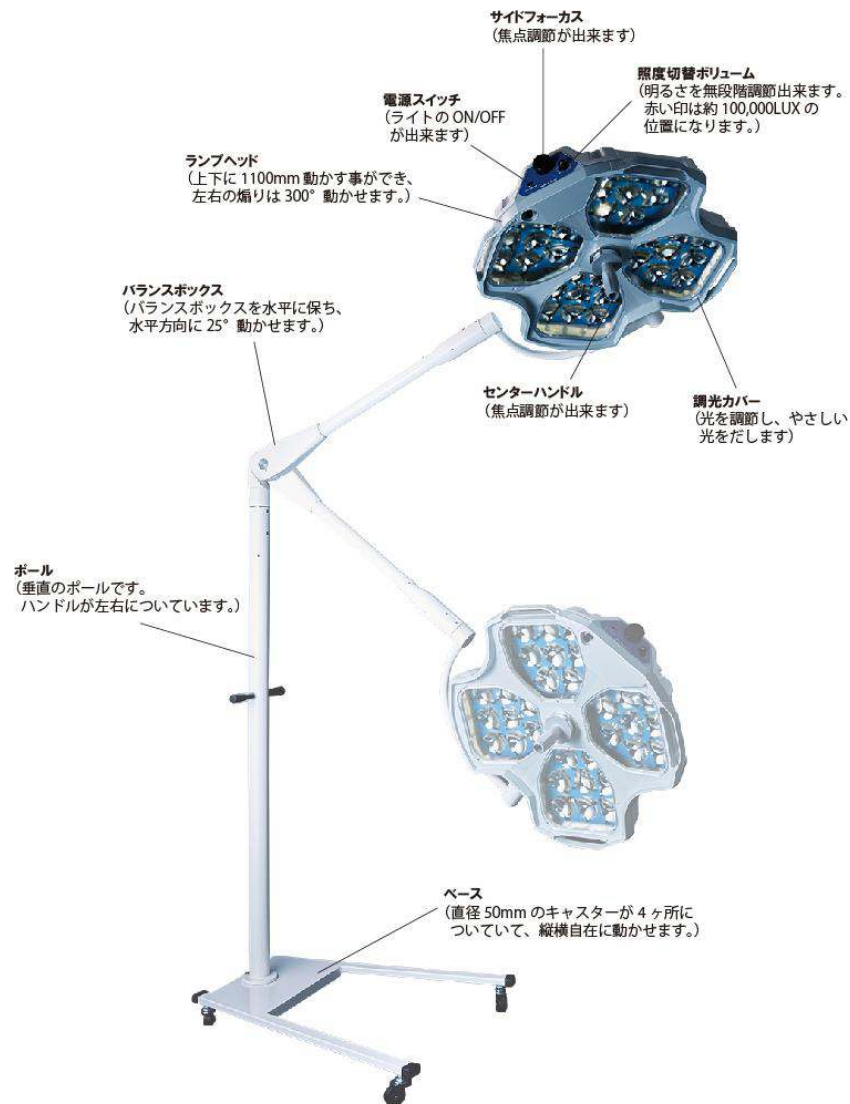

	L A - 6 5 K X
灯数及び灯径	4 灯 65cm
L E D 数	32 個
照度 (1m)	160000LUX
演色指数	Ra97
色温度	4500° K ± 5 %
入力電圧	AC100V 50～60Hz
消費電力	45W
照度切替 (調光)	無段階
重量	約 46kg

LA-45KX

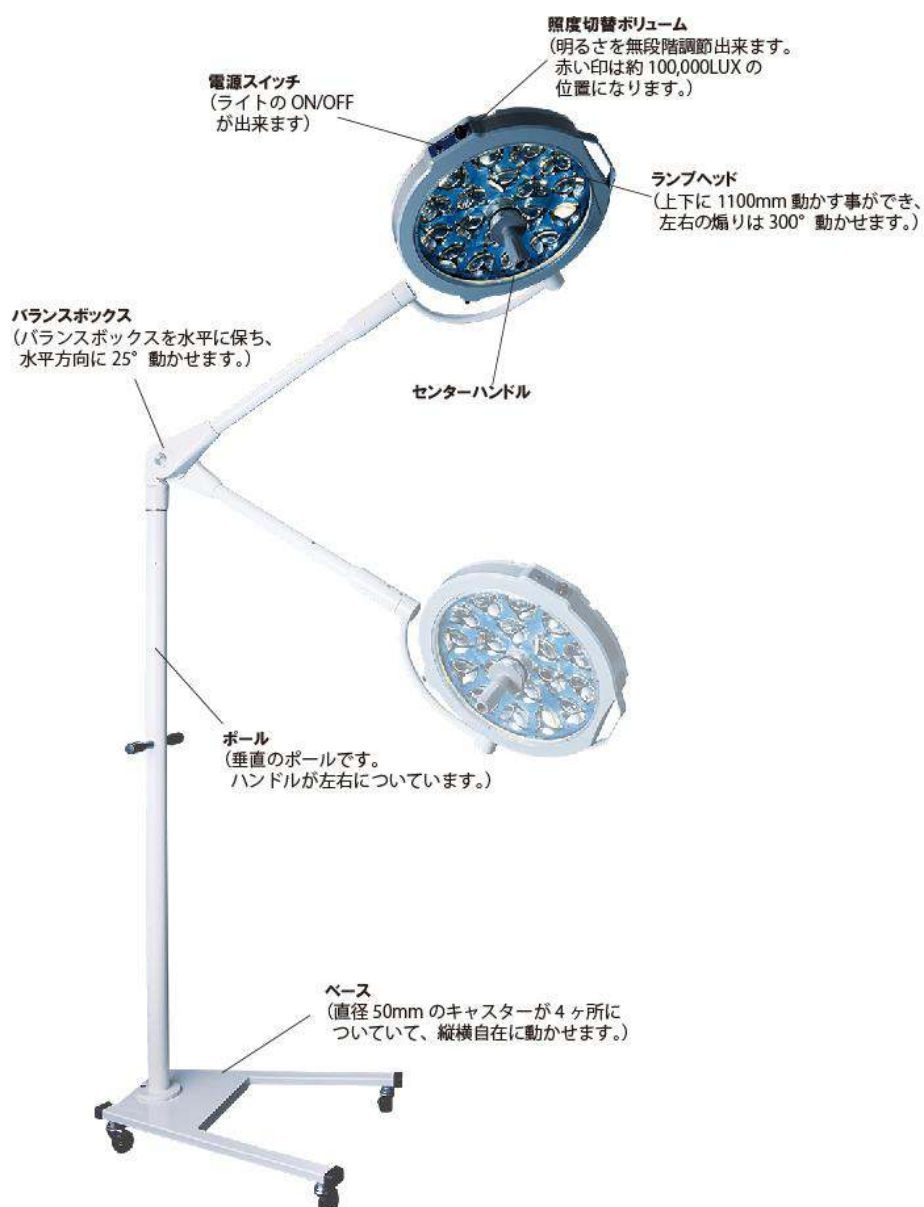

	L A - 4 5 K X
灯数及び灯径	中型 1 灯 45cm
L E D 数	18 個
照度 (1m)	120000LUX
演色指数	Ra97
色温度	4500° K ± 5 %
入力電圧	AC100V 50～60Hz
消費電力	35W
照度切替 (調光)	無段階
重量	約 29kg

LA-20KX



	L A - 2 0 K X
灯数及び灯径	2 灯 58cm
L E D 数	16 個
照度 (1m)	100000LUX
演色指数	Ra97
色温度	4500° K ± 5 %
入力電圧	AC100V 50～60Hz
消費電力	30W
照度切替 (調光)	無段階
重量	約 30kg

2. 操作方法

- (1) 電源スイッチを ON にして電源を入れて下さい。
- (2) 滅菌センターハンドルを使って、照射したい部分にランプヘッドを移動させて下さい。移動の際に、他の器械に接触しないように注意して下さい。
- (3) 調光ボリュームで明るさを調整して下さい。
- (4) 滅菌センターハンドルで焦点を調節して下さい。
- (5) 使用後は電源スイッチを OFF にして電源を切して下さい。

3. 使用上の注意

ミリオンライト照明灯を有効に、しかも安全にご使用いただく為に、次の諸点にご留意下さい。

- (1) 使用しない時は、照明灯の電源スイッチを OFF にして下さい。
- (2) 調光ボリュームは静かに動かして下さい。
- (3) 手術中は照明灯が不用意に他の器械に接触しないよう御注意下さい。
- (4) ぬれた手で照明灯にさわらないようにして下さい。
- (5) 照明灯を動かす時は、ゆっくり操作して下さい。
- (6) 蒸気や可燃ガスを照明灯にかけないようにして下さい。
- (7) 手術中に停電またはライトが点灯しない場合は、適切な処置をして下さい。
- (8) 製品を許可無く改造しないで下さい。改造された製品については、安全性、性能等について保証出来ません。改造内容によっては、法規、規格から外れる場合もあります。
- (9) 製品が故障した場合、移設などを行う場合は必ず当社又は専門の業者に御連絡下さい。

4. 製品の清掃方法

次の方法により、照明灯を常に清掃して下さい。

- (1) 滅菌センターハンドルは取り外して滅菌する事が出来ます。
- (2) ランプヘッド/調光カバーは水拭きして下さい。調光カバーには薬品等は絶対に使用しないで下さい。
- (3) ポールなどの部分はから拭き、もしくはワックス等で拭いて下さい。但し、医療器械であることを考えてワックスの選び方に注意して下さい。

5. 消耗部品

消耗部品は特にありません。故障した場合は医療機器販売業者又はメーカーに御連絡下さい。

6. 日常の点検

週一回又は使用後に点検をし、必要な時にはすぐに使用出来る状態にする事をお勧め致します。

- (1) 照明灯の装置一式の各部分、例えば各回転部及び接続部に異常がないかどうか点検して下さい。
- (2) すべてのボルト、ナット、ネジ等がゆるみがないかどうか点検し、ゆるみがあれば締め付けて下さい。
- (3) 照明灯の位置をゆっくり移動させ、正常に操作出来るかどうか点検して下さい。ランプヘッドを移動させた位置で停止するかどうか点検して下さい。
- (4) スイッチを ON にして、すべての LED 電球が正常に点灯するかどうか点検して下さい。
- (5) 調光ボリュームが正しく作動するか確認して下さい。

7. 長期間使用しなかった場合

長期間使用しなかった場合は、照明灯の検査及び安全性の点検が必要です。

- (1) 日常の点検により、異常又は故障を早期に発見する事が出来ます。
- (2) 使用する前に、照明灯の各部品の清掃をして下さい。
電源スイッチを ON にして 1 時間位放置し、異常が無い事を確認して下さい。

保 証 書

型式名 ：

製品番号 ：

このたび弊社の製品を御買い上げ下さいまして、誠にありがとうございます。
何卒永年ことなく御使用下さいます様お願い申し上げます。

【保証規定】

- (ア) この製品は厳密な検査を経て出荷されていますが、万一故障した場合には無償で修理
致します。(保証期間中)
- (イ) 天災・火災及び御使用上の不注意等による破損、故障は有償修理とさせていただきます。
- (ウ) 保証期間は 年 月 日より1年間です。

株式会社 **ミリオンライト** 
〒124-0014 東京都葛飾区東四つ木 3-47-12
TEL：03(3694)0234 FAX：03(3694)0299
URL：[https:// millionlight.co.jp](https://millionlight.co.jp)



株式会社 **ミリオンライト**

〒124-0014 東京都葛飾区東四つ木 3-47-12
TEL：03(3694)0234 FAX：03(3694)0299
URL：<https://millionlight.co.jp>
millionlight@millionlight.co.jp