

【注意事項】

子供立体マスク ハローキティ 7枚入

【注意】

- ・おもちゃではありません。
- ・ご使用中は必ず保護者の方がお子様から目を離さないようにご注意ください。
- ・本品は有害な粉塵やガス等の発生する場所でのご使用はできません。
- ・本品は使い切り商品です。洗濯による再使用はできません。
- ・マスクが濡れた状態でのご使用は絶対にしないでください。
- ・火のそばでのご使用はできません。
- ・万一、かゆみ・かぶれ・耳が痛くなる等の症状があらわれた場合は直ちにご使用をやめ、医師にご相談ください。
- ・マスクの耳ひもを首にかけてふざけたり、乱暴に遊ばないでください。窒息などの危険があります。
- ・耳ひもを引っ張りすぎると切れるおそれがありますのでご注意ください。
- ・万一、臭いにより気分が悪くなった場合はご使用をおやめください。
- ・睡眠時のご使用はおやめください。
- ・機能性の維持、衛生面から1日1枚のご使用をお勧めします。

- ・お子さまには保護者の方からご使用方法等をご説明ください。

- ・4歳未満、呼吸器に異常がある、着用時に息苦しさをを感じる、自らの意思で着脱で

きない、いずれかに該当するお子様には使用しないでください。

- ・小さなお子さまの手の届かないところに保管してください。

- ・用途以外には使用しないでください。

★マスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。