

【注意事項】

ジェル冷えシート シナモロール いつもいっしょのお友だち 16 枚入

【取扱上の注意】

- ・自分で使うことが困難な方には使用しないでください。
- ・認知症の方、自分で使うことが困難な方への使用時は、口や鼻に貼りつき、呼吸を妨げるおそれがありますので、看護者の監督のもと、十分に注意してご使用ください。

- ・次の部位には使用しないでください。

(1)傷口・湿疹・かぶれ・やけどなど皮膚に異常のある部位。

(2)目および目の周辺や粘膜。

- ・貼った時に冷たすぎると感じた場合は、適切な冷たさになるように調節してご使用ください。

循環器系疾患(高血圧、狭心症、脳こうそくなど)の方は、血流が悪くなることもあるので医師に相談の上使用してください。

- ・メントールや粘着剤に弱い方は使用しないでください。

- ・悪寒を感じている時には使用しないでください。

- ・本品の開封後はなるべく早くお使いください。未使用分は製品の効果を保持するた

め、袋の開封部をしっかりと折り曲げ、外気に触れないように保存してください。

・使用中または使用後、発疹・発赤・かゆみなど、皮ふに異常があらわれた場合は、使用を中止して、医師に相談してください。

・皮膚に汗やパウダー等がついているときは、貼りつきが悪くなりますので、よく拭いてからご使用ください。

・本品は機能および衛生上の点から、1枚1回限りの使用としてください。

・本品は医薬品ではありません。発熱などの治療については医師に相談してください。

・直射日光や高温の場所を避け、なるべく涼しいところに保管してください。

・お子様の手の届かないところに保管してください。

・業務用冷凍庫での保管は避けてください。

・家庭用冷蔵庫・冷凍庫に保管しますと、よりよい冷却効果が得られます。