



エコラテ

ecolatte

elite





このたびはお買い求めいただきありがとうございます。

カッターナイフは使用せず、はさみを使用して商品を破損させないように注意して開封してください。

使用上の注意

- 本品は、生産後すぐに圧縮ロールパックしていますので、開封後にオプティマフォーム（ウレタンフォーム）のにおいがする場合がありますが、次第にうすれていきます。
- 圧縮ロールパックを開封すると 15 分程度で膨らみますが、商品本来の硬さ、サイズまで戻るには、24 時間程度かかります。
- 開封すると、圧縮ロールパックされた状態に戻すことはできません。
- 本品には、頭部、脚部の指定はありません。
- 本品は、通気性に優れておりますが、1 ヶ月に 2 回ほど立て掛けるなどして底面に風を通してください。（ジメジメした状態でご使用、保管するとカビが発生する場合があります。）
- 芯材のオプティマフォームは経年変化により変色する場合がありますが、品質、性能には全く問題はありません。
- マットレスの体圧分散性が損なわれる可能性があるため、上に敷布団や厚手のパッド等を敷いてご使用することをおすすめ致しません。
- 汚れ防止のためにシーツを敷いてご使用いただくことをおすすめします。
- 圧縮ロールパックされた製品を開封すると、芯材のオプティマフォームが側地に沿っていっぱい膨らみます。万一、側地と芯材の間にズレが残って側地にシワがでたり、マットレスが少し湾曲して気になる場合には、側地のファスナーを開いて芯材を取り出し、向きを変えて入れ直すようにしてみてください。
- 側地はファスナーにより取り外し、洗濯することが可能です。家庭用洗濯機をご使用になる場合は以下の方法で洗濯してください。
- 芯材のオプティマフォームは洗濯することはできません。

警告

- ・このマットレスは空気をたくさん含んでおり燃えやすいため、ストーブ、タバコの火等の直火、または温度の高いものに近づけないでください。
- ・側地やロールパックのビニールをかぶって遊んだりすると窒息事故を起こす危険がありますので、ご注意ください。

株式会社 篠原化学

名古屋市昭和区明月町 3-23 【TEL】 052-841-3970