

# アゼアス® 防護服

## 取扱説明書

- 本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- ご使用の前に、本取扱説明書を必ず最後までお読みいただき、十分ご理解の上、正しくお使いください。また、本製品と併用する他の保護具の取扱説明書もよくお読みの上、正しくお使いください。お読みになった後は、製品を廃棄するまで大切に保管し、必要なお読みください。本取扱説明書に記載されている情報は、適宜改訂されますので、常に新しい取扱説明書を参照してください。
- 本取扱説明書は、本製品を正しくお使いいただき、お客様への危害や本製品の損傷を未然に防止するためのものです。本取扱説明書に従わない使用や誤った取扱いにより、お客様が有害物質にばく露し、生命が危険な状態にさらされるおそれや、健康障害をきたすおそれ、製品が損傷するおそれ等があります。弊社では、本製品の不適切な使用に関して、一切の責任を負えないことをあらかじめご了承ください。
- ご使用の前に、本製品が、お客様の用途、使用環境、作業内容等に適合しているかどうかを十分に検討し、安全性を確認した上でご使用ください。
- 本製品や個人用保護具（手袋、長靴／靴・シューズカバー、呼吸用保護具、フードなど）の適切な組み合わせや、どの位の期間本製品がその防護性能や着心地の良さを保ち、過度な熱ストレス（ヒートストレス）がかからぬように特定の作業に着用可能か、また、再使用のために汚れを適切に落とすことが出来るか等についてはご利用者様が判断ください。
- 本製品到着時に、防護性能に悪影響を及ぼす程の縫い目の異常や生地損傷、ファスナー不良等の初期不良があった場合は弊社までご連絡ください。新しい製品と交換いたします。

### ◆安全上のご注意 必ずお守りください。

誤った取扱いをした場合に生じる危害や損害の程度を、次の「危険」「警告」「注意」の3つの警告表示に区分し説明しています。表示と意味をよくご理解のうえ、本文をお読みください。

 <b>危険</b>	取扱いを誤った場合、使用者が死亡又は重傷を負うことがあり、かつその切迫の度合いが極めて高いことを示します。
 <b>警告</b>	取扱いを誤った場合、使用者が死亡又は重傷を負う可能性があることを示します。
 <b>注意</b>	取扱いを誤った場合、使用者が健康を害するかまたは商品の性能に悪影響が生じる可能性があることを示します。

 <b>警告</b>	<b>●使用可能分野</b> <ul style="list-style-type: none"><li>●本製品は、汚れや有害物質から、本製品が覆われた身体部分を防護する目的で設計された防護服です。取り扱う物質の種類や濃度、用途、作業環境、作業時間によっては、本製品よりも優れた防護性能を持った素材または形状（デザイン）が必要となりますので、お客様の責任において本製品が使用目的に適しているかどうかを判断ください。</li></ul>
 <b>危険</b>	<b>●使用不可能分野</b> <ul style="list-style-type: none"><li>●有害なガス・液体・飛沫・極微粒子、生物学的危険物質、放射性汚染物質、電離放射線などの有害物質を取り扱う作業では、有害物質が本製品を浸透／透過して着用者に障害を与えるおそれがありますので、選びになった本製品が作業に適しているかどうかをご確認ください。</li><li>●摩耗や破損のリスクが高い環境下では、使用する環境条件を考慮して使用範囲を決めてください。</li><li>●本製品は、電気作業には使用しないでください。本製品に、絶縁性能はありません。</li><li>●本製品は、可燃性です。火傷のおそれがありますので、火気や高温の近く、又は爆発の可能性のある環境下で使用しないでください。本製品に、耐熱性や防炎性はありません。</li></ul>

 <b>警告</b>	<b>●検査頻度及び検査方法</b> <ul style="list-style-type: none"><li>●使用前に、防護性能に悪影響を及ぼす程の縫い目の異常や生地損傷、ファスナー不良等が無いか確認してください。不備点がありましたら、着用は止めてください。</li><li>●使用中に、本製品が損傷したときまたはすり切れたときは使用を中止し、破棄してください。</li></ul>
 <b>警告</b>	<b>●使用前及び着脱時の注意点</b> <ul style="list-style-type: none"><li>●着用者の身体寸法に適した、十分な動きが確保できるサイズをご使用ください。</li><li>●取り扱う物質の有害性に応じた適切な個人用保護具（手袋、長靴／靴・シューズカバー、呼吸用保護具など）を併用してください。特に、呼吸用保護具が必要な環境では、適切な性能の呼吸用保護具（防じんマスク、送気マスクなど）を併用してください。</li><li>●個人用保護具を併用する際は、手首、足首、顔などの周りを密閉するために、本製品と個人用保護具との接合部（袖口、裾口、フード周りなど）やファスナーフラップ部分などに、不浸透性の粘着テープを使用し、取り扱う有害物質が通過するおそれのあるすき間ができないようテーピングをしてご使用ください。</li><li>●暑熱環境下での作業や過度な作業によって、熱ストレス（ヒートストレス）が高まります。熱ストレス（ヒートストレス）を緩和し、熱中症を防ぐために、着用前に十分な水分補給を行ってください。また着心地の良さを保つために、本製品の下に適切な衣服を着用してください（吸水・速乾性の良い肌着など）。長時間にわたる作業では、適切な頻度で休憩をとり、十分な水分補給を行い、作業負荷の調整、熱中症対策具の併用なども考慮してください。</li><li>●外側に触れないように、外側が内側になるよう丸め込みながら静かに脱いでください。</li></ul>
 <b>注意</b>	<b>●保管方法</b> <ul style="list-style-type: none"><li>●紫外線、直射日光及び風雨を避けることができる場所、高温多湿にならない場所、物理的な損傷（つぶれ、穴あきなど）が起きない場所で保管してください。</li></ul>
 <b>注意</b>	<b>●お手入れ方法</b>       <ul style="list-style-type: none"><li>●洗浄禁止。洗濯禁止。漂白禁止。乾燥機禁止。アイロン禁止。ドライクリーニング禁止。ウェットクリーニング禁止。可燃性のため高熱、火気注意。</li><li>●洗浄／洗濯／漂白／乾燥機／アイロン／ドライクリーニング／ウェットクリーニングをすることにより、生地が収縮する／耐水度が低下する等、本製品の防護性能に影響を与えます。</li></ul>
 <b>警告</b>	<b>●保守基準</b> <ul style="list-style-type: none"><li>●本製品は、1回使用のみのリミテッドユース（使い切り）を目的として設計されています。ユーザーの判断で汚染されていないと判断された場合に限り再使用できますが、損傷、改造又は汚染後は使用出来ません。使用中に本製品が損傷を受けたときやすり切れたときは、使用を中止し、破棄してください。修理は出来ません。</li></ul>
 <b>注意</b>	<b>●廃棄基準及び廃棄の際の考慮するのがよい事項</b> <ul style="list-style-type: none"><li>●物理的損傷（穴があいている、繊維が擦り切れている、毛羽立っている、切れている等）が見られた場合、又は化学物質が付着した場合は、破棄してください。</li><li>●使用後の本製品には、環境中の有害物質が付着しているおそれがあるため、使用後の汚染内容とその度合いによって廃棄方法に制限が生じます。汚染された本製品は、付着している有害物質（汚染廃棄物）と同じ方法で廃棄されるべきであり、国及び各自治体の指示などに従って処理してください。</li></ul>

### ◆製造元

## アゼアス株式会社

〒111-8623 東京都台東区蔵前4-13-7  
TEL. 03-3861-3537

アゼアス® は、アゼアス(株)の登録商標です。

MADE IN JAPAN

165M11-810J