

今までなかった!

CARLISLE
SANITARY MAINTENANCE PRODUCTS

爪と手を一気に洗える!

新しい手洗いの習慣です!

カーライル ネイルブラシ (品番:4002000)



やわらかいのに
きれいに洗えるヒミツ♪

ポイント

1

爪の間の頑固な汚れを落とすハードな黒いブラシを中央に配置。しかも凹んでいるので手指を傷つけません。

ポイント

2

白いブラシ面は広くて柔らか。手指全体を一気に洗えます。

なんと0.2mmの極細
フィラメント使用!




比べてください! 1分でここまできれいになりました。



墨汁をつけた手に
液体せっけん1プッシュで
1分間洗浄

競合他社

液体せっけん
手を揉み洗いした後、
さらにネイルブラシで
指先を洗浄

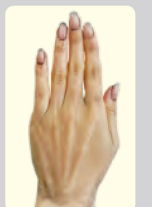

カーライル
ネイルブラシ

液体せっけんを
つけた後、
ネイルブラシのみで
手全体を洗浄



お客様の声

- いつまでも洗ってほしい心地よさ!
まるで高級ボディブラシみたい!!
- 痛くないからきれいになるまでしっかり洗える!
しかも今までより短い時間でピカピカに!!

もっとハードな
使用感が
お好みの方は

こちらをオススメ!



カーライル
ネイルブラシS
(品番:3623900)

お問い合わせ・ご用命は、下記までお気軽に

エー・エム・プロダクツ株式会社 〒154-0011 東京都世田谷区上馬2-14-1 横溝ビル8F TEL.03-5481-9001(代) FAX.03-5481-9004
URL: <http://www.ampro.co.jp>

インフルエンザ&
ノロウイルスの季節到来!!

CARLISLE
SANITARY MAINTENANCE PRODUCTS

ネイルブラシを使って

しっかり 手洗いを!



カーライルの
[ネイルブラシ]は

手になじむソリッドボディに、
手指にやさしい
ソフトポリエステル毛を
採用しています。



正しい手順で手洗いをすれば
感染予防に効果的ね。

手順
1



流水で手指を濡らす。

手順
2



石鹸を適量手のひらに取る。

手順
3



手のひらをこすり合わせてよく泡立てる。

手順
4



カーライルのネイルブラシの中央にある
黒いブラシ部分で爪の間を洗う。

手順
5



ブラシを横に動かして指先を洗う。
*指の関節の汚れもスッキリ落とせます。

手順
6



指の間もブラシを使ってしっかり洗う。

手順
7



両手首を洗う。

手順
8



流水でよくすすぐ。

手順
9



ペーパータオルでよく水気をふき取る。
*蛇口を閉めるときは、ペーパータオルを
使用すると二次汚染が防げます。

ネイルブラシの《清潔な保管方法》もご覧ください。➡

保管の仕方でも大事/ そのネイルブラシ、清潔ですか!?

しっかり保管をして、汚れや細菌の増殖を抑えましょう!

殺菌

使用ごとに殺菌をする。

200ppmに希釈した次亜塩素酸ナトリウムを殺菌層として用意。使用した後に入れましょう。約10分間のつけ置きが効果的です。



酸性タイプの製品と一緒に使う(まぜる)と有害な塩素ガスが出て危険です。使用する際には換気をよくしてください。



保管

清潔な場所できちんと乾燥させる。

殺菌が完了したら細菌の繁殖を抑えるために、ホルダーにかけてよく乾燥させながら保管しましょう。

手洗いの流水がかからない場所にホルダーを設置するのも大事なポイントです。

*カーライルの「ネイルブラシキット(品番:4002100)」ならコード、フック、使用説明書がついてくるので、ネイルブラシが衛生的に保管できます。



洗浄

一日一回洗浄をする。

ネイルブラシは使っていきうちに汚れが蓄積し、細菌が繁殖しやすくなります。一日一回、中性洗剤等で洗浄するだけで細菌の増殖を抑え、清潔を保つことができます。



保管の仕方
大切なのね。

手指にやさしいソフトポリエステル毛を採用したネイルブラシです。



ネイルブラシ

品番	4002000
サイズ	全長:127mm 幅:51mm
毛丈	10/13mm
線径	0.2mm
カラー	ホワイト

ネイルブラシにコード、フック、使用説明書がセットになったキットです。



ネイルブラシキット

品番	4002100
内容	ネイルブラシ(4002000)、コード、フック、使用説明書

お問い合わせ・ご用命は、下記までお気軽に

エー・エム・プロダクツ株式会社 〒154-0011 東京都世田谷区上馬2-14-1 横溝ビル8F TEL.03-5481-9001(代) FAX.03-5481-9004
東京本社 / 札幌駐在所 / 仙台営業所 / 名古屋営業所 / 大阪営業所 / 広島駐在所 / 福岡営業所
URL: <http://www.ampro.co.jp>