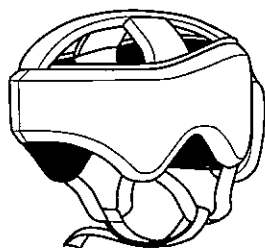
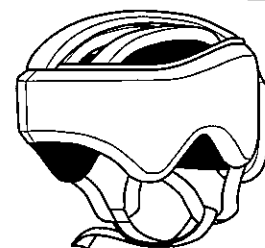
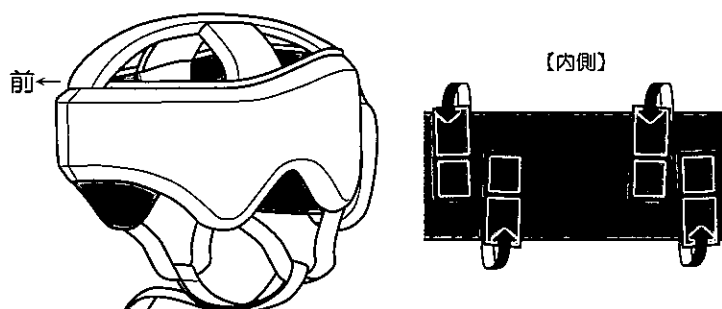
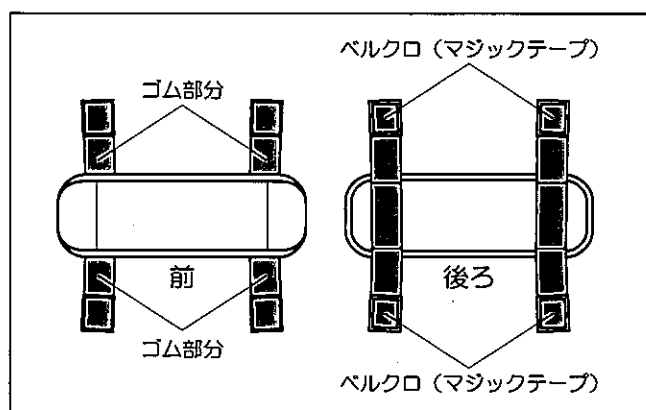


この度は、ヘッドガードフィット専用 頭囲パッドをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本紙は、別売りの弊社頭部保護帽 ヘッドガードフィット (KM-30・400 共通) への取り付け方法について説明しています。当該商品以外への取り付けはできませんのでご注意ください。以下の説明に従い、確実に取り付けてください。



対象製品
・ KM-30

・ KM-400

取り付け方法 (KM-30・400 共通) ※説明図は KM-30 になります

本商品の後ろにある 4ヶ所のベルクロ (マジックテープ) の付いたベルトを頭部保護帽本体の内側の生地に固定して取り付けます。頭部保護帽本体の頭囲であれば任意の部位に取り付けられます。内側の生地以外には取り付けられません。

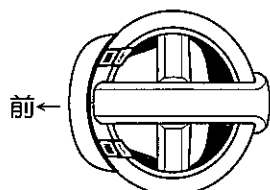
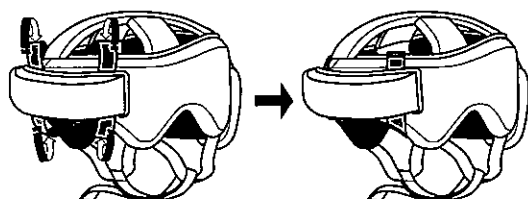


上図の黒い部分に取付ける事ができます。内側で固定する際は頭部保護帽本体の頭頂部やベルトが互いに重ならない様に注意してください。内側の生地以外とは固定できません。



頭部保護帽本体の保護したい部位に本商品を当てがいながら、ベルトを頭部保護帽本体の内側に折り返して固定します。(ゴム部分のテンションで長さを取り付け位置を調整してください。)

前頭部への取り付け例


前から見た図

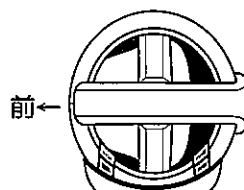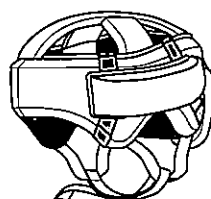側頭部 (左) への取り付け例


前から見た図

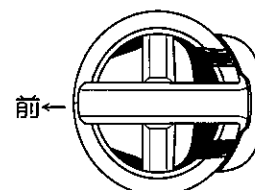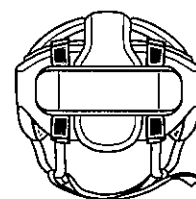後頭部への取り付け例


前から見た図

製品に関するお問い合わせ

キヨタ株式会社 営業本部 福祉用具開発グループ

〒108-0023

東京都港区芝浦 4 丁目 3 番 4 号 田町きよたビル

TEL 03-3798-3617

FAX 03-3798-3618

 URL <http://www.kiyota-and.co.jp>