

# 取扱説明書



対象商品： KM-1000A（ロールタイプ）・B（サファリタイプ）・C（メトロタイプ）  
D（クローシュタイプ）・E（ターバンタイプ）

お買い上げ誠にありがとうございます。  
本説明書を十分お読みいただき、正しくご使用ください。  
また、内容をいつでもご確認いただける様、お読みになられた後も本書を保管してください。


## 外観




A ロールタイプ  
(含 メッシュタイプ)



B サファリタイプ

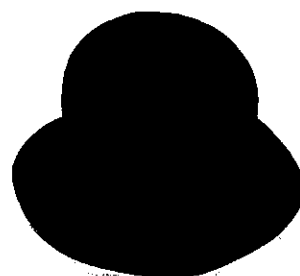

C メトロタイプ

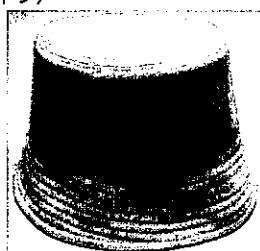

D クローシュタイプ



E ターバンタイプ

■A・C・D・E タイプにはあごひもが付属しています。

● Eタイプはゴムひもとなります。

■内蔵の衝撃吸収材は、Bタイプを除き取外しできません。

## あごひもの取付方法・使い方

### <Aタイプ>

①



②




① 左右いずれかの「あごひもループ」に、あごひもの  
フック側を内側から通し、フックを止めます。

□利き手（もしくは使いやすい側）で左右設定してください。

② 反対側のループ内側からあごひもを通します。

### <C・Dタイプ>

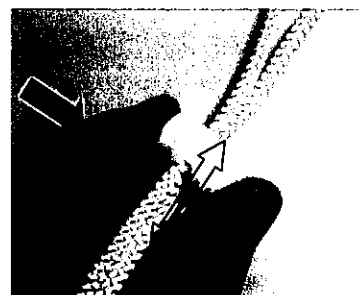

ひもをあごに回し、長さ調節ホルダー  
ロックボタンを押しながら上下に調節し  
ます。

\* 締め過ぎにご注意ください。

裏面に“注意事項”の記載がございます。必ずお読みください。

## ご使用上の注意事項（必ずお読み下さい）



この表示を無視して誤った取扱いをすると  
人もしくは財産が傷害、損害を負う可能性が想定されます

1. 本製品は頭部に対する衝撃を緩和するもので、ケガからの完全保護を保証するものではありません。局所的な高衝撃や保護部の隙間等に衝撃が加わった場合を含め、打突時にケガをする場合がございます。転倒の恐れがある場合は、必ず保護者・管理者が付き添ってください。
2. 「おでかけヘッドガード」をご使用の際、頭に確実に**はめられている事**を確認してください。かぶりかたが不十分ですと、事故の原因になります。
3. サイズは、使用する個人の方に合わせて装着してください。サイズが合わない場合、脱げやすかったり、頭の締め付けがきつく感じられたりする等の不具合が発生する場合があります。
4. あごひも装着の際、Aタイプは、固定ホックが**確実に**はめられている事をご確認ください。あごひもの脱落により、事故の原因となります。C・D・Eの各タイプにつきましても、あご下で確実に締めた上でご使用ください。また、C・D・E各タイプのあごひもは、縫製がほつれた状態で使用しないでください。
5. 「おでかけヘッドガード」を「切る」、「縫う」などの改造を施すことは、製品の機能低下をまねく原因となりますので、絶対に行わないでください。
6. 洗濯／乾燥の際、洗濯機、乾燥機を使用しないでください。（手洗い、日陰干ししてください）縫製がほつれたり、熱により衝撃吸収パッドが溶解する危険があります。
7. 漂白剤や有機溶剤（ベンジン・シンナー等）を使用しないでください。生地の色落ちや傷みが発生したり、衝撃吸収パッドが溶解・変質する場合があります。

### お手入れ方法

- 雨や汗で濡れたまま放置しますと、カビ発生の原因となります。必ず陰干ししてください。
- 汚れた場合、中性洗剤を水に溶かし「手洗い・陰干し」してください。
- 漂白剤は使用しないでください。
- 乾燥機は使用しないでください。（上記注意事項をお読みください）
- メッシュ素材は生地の痛み防止のため、強くこすったり、もみ洗いをしないでください。



手洗い／日陰干し



中性洗剤使用



シンナー・ベンジン  
塩酸・強アルカリ薬品  
使用禁止！

主要素材＝■帽子本体／A・B 共通 各色＝綿 35%、ポリエステル 65%・（メッシュ部＝ナイロン 100%）  
C・D 共通 ブラック／ベージュ／グレー ＝表地：綿 77%、麻 23%、裏地：ポリエステル 100%  
" 共通 フラ／ブラック ＝表地：ウール 90%、ナイロン 10% サイズM(57.5cm)L(59cm)  
" 共通 ツイト／グレー ＝表地：ウール 84%、ナイロン 14%、ポリウレタン 2%  
E ブラック／ブラウン ＝表地：ポリエステル 100% サイズM(55～57cm)L(57～59cm)  
■ 衝撃吸収材／パッド＝ポリエチレンフォーム、裏地＝ポリエステル 100%  
Bタイプ頭頂部パッド＝ポリウレタンフォーム 100%、両面生地貼 ポリエステル 100%

商品お問い合わせ先

キョタ株式会社 福祉住環境事業部 開発グループ  
〒108-0023  
東京都港区芝浦4-3-4  
電話 03-3798-3617 FAX 03-3798-3618