

機械器具 54 医療用捲綿子
一般医療機器 医科用捲綿子 10172000

ドライスワブ


再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は検体採取から培養までが短時間の場合に用いる滅菌綿棒である。


本品は細菌検査材料の採取ならびに輸送を目的とし、キャップ付き綿棒がチューブに入っている。綿棒(スワブ)には品質が均等でpHの影響を受けない化学繊維が使用されている。チューブ側面のラベルには採取した検体についての情報が記入出来るようになっているほか、使用期限、製造番号が記載されている。病院内で病棟または外来診療棟から細菌検査室への検体輸送時に使用する。

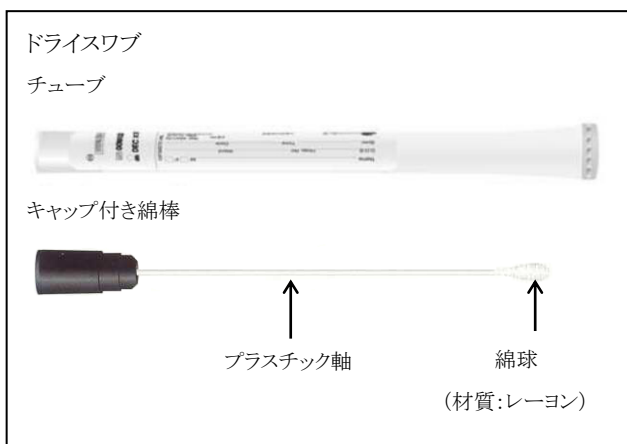


【使用目的又は効果】

本品は、検査のための試料を採取することを目的とした器具である。


【使用方法等】

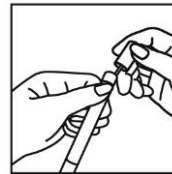


1) 口栓を廻すようにして綿棒を取り出す。

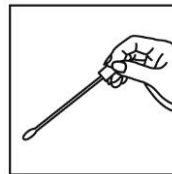

2) スワブで検体を採取する。

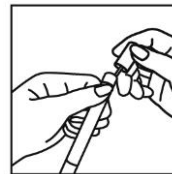

3) 綿棒を元のチューブに戻す。

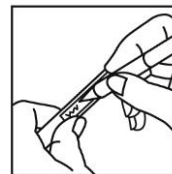

4) ラベルに必要事項を記入する。

【使用上の注意】

- 綿棒のシャフト(軸)はプラスチック製で直角に押し曲げると切断できるので、検査材料の採取中にシャフトの切断が予想されるような部位への使用はしないこと。
- 耳鼻咽喉、鼻腔、小児用には、「プレンスワブENT」ないし「プレンスワブネーザル」を使用すること。
- 細菌検査材料(被検菌を含む)の取扱には十分に注意すること。使用後のチューブ、綿棒はオートクレーブなどで滅菌処理してから廃棄すること。
- 使用前に汚染のないことを確かめてから使用すること。
- 誤って凍結させたものは使用しないこと。
- 検体採取後すみやかに検査すること。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法：5～25℃で保存(凍結しないこと)

使用期限：使用期限はラベルに記載

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売業者>

イワキ株式会社

<https://www.iwaki-kk.co.jp>

<問い合わせ先>

イワキ株式会社

〒114-0003 東京都北区豊島 7-30-17

TEL 03-3913-4148 FAX 03-3913-4149

E-mail bio@iwaki-kk.co.jp

<製造業者>

Medical Wire&Equipment Company (Bath) Limited

メディカル ワイヤー アンド エクイップメント カンパニー

バス リミテッド (イギリス)