

肘用バンド

主な用途：上腕骨外側（内側）上顎炎時の圧迫固定



エルボーギア®



▲商品詳細はこちら

パッド付バンド1本で肘への衝撃をブロック

- 肘に違和感を感じたときに
- 面ファスナーで簡単装着
- さまざまなシーンに



スポーツ・ビジネス、日常のどのシーンにも合うシックなブラック



ベルトが伸びすぎず、しっかり固定できる適度なテンション

自由な位置で接着でき調整しやすい



取り外せて洗濯も可能なパッド

(パッド寸法) 5.5×3.5×厚さ1cm

パッドによりすれにくくしっかり圧迫

左右兼用

装着方法

・例：右肘の外側に違和感のある場合

- 1 ベルトをバックルに通し、先端を折り返して仮留めします。
- 2 ベルトが輪になった状態で腕に通します。
- 3 肘の違和感のある部分の少し手先寄りにパッドを合わせます。
- 4 手を握り、腕に力を入れた状態で適度な圧迫になるようにベルトを引っ張り、面ファスナーを留めます。
- 5 装着完了。ゆるみや位置などを確かめてください。

材質

ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン・EVA（パッド）・プラスチック樹脂（バックル）

規格

商品番号	規格	販売単位	JAN CODE
037631	フリー 4cm×40cm 適応範囲：前腕周囲 19cm~31cm	1枚	4958995376319

・ケース単位…12枚



1枚入



<https://www.taketora-web.com/>

【メディカル事業部】

東日本 〒231-0011 神奈川県横浜市中央区太田町2-23 麻葉メディアビジネスセンター8F
TEL. 045 (680) 0308 (代) FAX. 045 (680) 0312

西日本 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町10-35 江坂南口第二ビル 5F
TEL. 06 (6386) 7217 (代) FAX. 06 (7175) 7101

取扱店