

33cm~42cm
膝頭周囲
適応サイズ



タフシロン 人工筋肉膝サポーター ホールド

医療の現場で用いられている人体を再現したタフシロン®(シリコーン)を筋肉に沿って加工した膝サポーター。メッシュ形状で360度膝を包み込み、着けるだけで膝安定!膝楽らく!

製品特徴

人工筋肉・タフシロン®採用
タフシロン®(シリコーン)が膝蓋骨周囲の筋肉に沿って膝をサポート!固定感がないから動きやすい!

膝蓋骨周囲360度サポート構造
膝蓋骨周囲の6つの大きな筋や腱を包み込み、膝のぐらつきを安定させます。

形状保持ですれにくい!
柔軟素材・タフシロン®(シリコーン)が動きに合わせて追従する為ズレ上がり、ズレ下がりを防ぎます。

岐阜大学と共同研究

本商品は、岐阜大学工学部機械工学科(松下研究室)にて効果検証を行い開発された商品です。

使用上の注意

- 本品は膝部の疾患を治療するものではありません。
- 本品に破損、変形などが見られた場合は使用しないでください。
- 本品は使用方法に従って正しく使用してください。
- 本来の目的以外では使用しないでください。
- 就寝中には使用しないでください。
- 長時間使用するときは適正正しく装着しなおしてください。
- 強く引っ張りすぎるとタフシロン®(シリコーン)加工部に裂けやちぎれが生じる恐れがあります。
- 過度に強く引っ張ったり、爪や鋭利なものでひっかけないようにしてください。
- タフシロン®(シリコーン)加工部に過度な摩擦がかかると、タフシロン®(シリコーン)加工部が摩耗する恐れがあります。

警告

《次の人は使用しないで下さい》

- ①装着部に怪我(骨折、捻挫、靭帯損傷等)や強い痛み、しびれ、腫れ、かぶれ、湿疹などの異常がある人。
- ②末梢血行に障害がある又はあると思われる人。
- ③慢性皮膚炎や、化繊、ゴム素材によるアレルギー体質の人。

使用中または使用後に、次の症状等の異常が生じた場合は直ちに使用を中止し、医師等に相談してください。
症状:腫れ、かぶれ、湿疹、発疹・発赤、かゆみ、うっ血、異常な痛み、むくみ

お手入れ方法

- ・40℃以下のお湯または水で手洗いしてください。
- ・塩素系漂白剤は使用しないでください。
- ・乾燥機の使用はさけてください。
- ・直射日光の当たらない場所に陰干ししてください。タフシロン®(シリコーン)を直接日光に当てると色が変色する恐れがあります。

保管方法

- ・乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
- ・ストーブなどの火気の近く及び高温多湿になる場所で保管しないでください。
- ・本品を保管する際は、直射日光の当たらない、湿気の少ない風通しの良い場所で保管してください。

発売元/株式会社タナック
〒500-8185 岐阜県岐阜市元町4-24 お客様相談室:0120-638-122 (平日9:00~17:00 土日祝休み)
http://www.k-tanac.co.jp

着用方法

- 1 上
赤い刺繍
サポーターの赤い印がある側を上にして装着してください。
- 2
タフシロン®(シリコーン)加工部の中央の円に膝のお皿が入るように装着してください。

紙 内袋
外箱 内袋
日本製

タフシロン 人工筋肉 膝サポーター

岐阜大学
共同研究

ホールド

着けるだけで
膝のぐらつき超安定!



伸縮性シリコーンが
膝を包み込む!



サイズの選び方

イラストの様に膝頭周囲を測ってください。

適応サイズ
膝頭周囲
33cm~42cm

【洗濯表示】

【品質表示】
サポーター布部:
ポリエステル
ナイロン
ポリウレタン

タフシロン加工部:
タフシロン®(シリコーン)

JAN

JIN-002002