

機械器具75 脱疾治療用具
一般医療機器 脱疾治療用ストラップ 30883000

タイヨー脱腸帯

【禁忌・禁止】

- 天然ゴムによるアナフィラキシー症状の既往歴がある人への使用は禁止。

【形状・構造及び原理等】

- ゴムの弾性を利用し、脱疾部を押さえる。



【使用目的、効能又は効果】

- 腹部の脱疾を正常な位置に保持するために押さえる。小児用から大人用サイズがある。

【品目仕様等】

- 外観
ゴム部分、金具部分を点検し、表面は滑らかで汚れや、シミ、キズ、凸凹があってはならない。全品目視にて行う。
- 寸法
ゴム部分、金具部分の誤差は規格寸法の許容範囲内であること。通常目視で行い、必要があればノギスにて測定する。

【操作方法又は使用方法等】

- 仰向けに寝た姿勢で脱腸を腹部の方へ静かに揉み入れ、三角ゴム押圧球でフタをするように押し当て、腰帯を腰回りの寸法に調節し背中から左腰骨(左側脱腸の場合は右腰骨)の上より押圧球上部三ツ羽根金具に引っ掛ける。
股帯を右側腰の位置より股間を通して適切な寸法に調節し、三ツ羽根金具下部の引っ掛けに掛け固定させる。

【使用上の注意】

- 天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがある。このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、医師に相談すること。
シンナーや市販の洗浄液、直射日光は避けること。
幼児及び皮膚の弱い方はガーゼ又はホータイを巻いて使用すること。
症状の改善がみられないときには医師に相談すること。
使用しない場合はベビーパウダー等でまぶしてから冷暗所に保管すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- 直射日光、高温、多湿を避け冷暗所で保管すること。

【包装】

- 1ヶ入り

【添付文書及び文献請求先】

株式会社太陽医療品製作所
TEL. 03-3251-2825 FAX. 03-3251-8693

【製造販売業者の名称及び住所等】

第3種製造販売業者
株式会社太陽医療品製作所
〒101-0035東京都千代田区神田紺屋町38
TEL. 03-3251-2825