

機械器具75 脱疾治療用具
一般医療機器 脱疾治療用ストラップ 30883000

タイヨー痔バンド

【禁忌・禁止】

- 天然ゴムによるアナフィラキシー症状の既往歴がある人への使用は禁止。
- いぼ痔が肛門周囲に出来ている症状の方の使用は禁止。

【形状・構造及び原理等】

- ゴムの弾性を利用し、脱疾部を押さえる。



【使用目的、効能又は効果】

- 肛門部の脱疾を正常な位置に保持するために押さえる。大人用

【品目仕様等】

- 外観
ゴム部分、金具部分を点検し、表面は滑らかで汚れや、シミ、キズ、凸凹があってはならない。全品目視にて行う。
- 寸法
ゴム部分、金具部分の誤差は規格寸法の許容範囲内であること。通常目視で行い、必要があればノギスにて測定する。

【操作方法又は使用方法等】

- 腰帯を腰回りの寸法に合わせ、股ゴムを適度の長さに調節し、押え玉には必要に応じガーゼ等を当て、股ゴムの金具を各々腰帯の引掛金具に掛け調節し使用する。

【使用上の注意】

- 天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがある。このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、医師に相談すること。シンナーや市販の洗浄液、直射日光は避けること。長期間使用しても症状の改善がみられないときには医師に相談すること。使用しない場合はベビーパウダー等でまぶしてから冷暗所に保管すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- 直射日光、高温、多湿を避け冷暗所で保管すること。

【包装】

- 1ヶ入り

【添付文書及び文献請求先】

株式会社太陽医療品製作所
TEL. 03-3251-2825 FAX. 03-3251-8693

【製造販売業者の名称及び住所等】

第3種製造販売業者
株式会社太陽医療品製作所
〒101-0035東京都千代田区神田紺屋町38
TEL. 03-3251-2825