

機械器具55 医療用洗浄器
一般医療機器 鼻用洗浄器 41599000

タイヨーハナシャワー

【禁忌・禁止】

- 天然ゴムによるアナフィラキシー症状の既往歴がある人への使用は禁止。

【形状・構造及び原理等】

- ゴムを押圧することにより弁が動作し、ボトル内を加圧し、その圧力により洗浄液を噴出する。



〈化粧箱入〉

〈ブリスターパック入〉

【使用目的、効能又は効果】

- 鼻の内腔から注入し、粘膜及び鼻の通路を洗浄及び治療する。暖かい温水等の治療薬液を充填する。

【品目仕様等】

- 外観
ゴム部分、樹脂部分を点検し、表面は滑らかで汚れや、シミ、キズ、凸凹があってはならない。全品目視にて行う。

寸法

ゴム部分、樹脂部分の誤差は規格寸法の許容範囲内であること。通常目視で行い、必要があればノギスにて測定する。

【操作方法又は使用方法等】

- ゴム球内に吸入した空気の中弁を通してボトル内に送り、空気の圧力を利用してボトル内の微温湯または水を送水チューブを通し洗浄嘴管先から調節噴出させ洗浄する。

【使用上の注意】

- 天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがある。このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、医師に相談すること。
煮沸消毒は出来ないので使用後は、ぬるま湯で洗浄して、水を切り保管する。
火のそばに置くと軟化し、変形することがあるので注意する。
堅めのブラシでみがくと、キズがついたり不透明になるので注意する。
高い所から落とす等、急激な衝撃を与えると破損するおそれがある。
洗浄水の温度には十分注意し、子供、高齢者、身体の不自由な方ややけど等に注意すること。
子供の目の届かない所に保管すること。
高温、直射日光を避ける。
温度、湿度等、環境によって保管中にも劣化する場合がある。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- 直射日光、高温、多湿を避け冷暗所で保管すること。

【包装】

- ブリスターパック 1ヶ入り
紙箱 1ヶ入り

【添付文書及び文献請求先】

株式会社太陽医療品製作所
TEL. 03-3251-2825 FAX. 03-3251-8693

【製造販売業者の名称及び住所等】

第3種製造販売業者
株式会社太陽医療品製作所
〒101-0035東京都千代田区神田紺屋町38
TEL. 03-3251-2825