

機械器具55 医療用洗浄器
一般医療機器 手動式生体用洗浄器 34630000

タイヨーポリチェル球

【禁忌・禁止】

- 天然ゴムによるアナフィラキシー症状の既往歴がある人への使用は禁止。

【形状・構造及び原理等】

- ゴムの弾力を利用し、洗浄液を吸入、排出する。



【使用目的、効能又は効果】

- 体の一部に適用する液体を噴出し、衛生状態を維持又は治療の一環として用いる。

【品目仕様等】

- 外観
ゴム部分、樹脂部分を点検し、表面は滑らかで汚れや、シミ、キズ、凸凹があってはならない。全品目視にて行う。

寸法

ゴム部分、樹脂部分の誤差は規格寸法の許容範囲内であること。通常目視で行い、必要があればノギスにて測定する。

【操作方法又は使用方法等】

- 指先でゴム球を押圧し中の空気を抜き、指をゆるめ洗浄液を吸入し、再度の押圧により液を噴出し洗浄する。

【使用上の注意】

- 天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがある。このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、医師に相談すること。
洗浄水の温度には十分注意し、特にお子様、高齢者、身体のご不自由な方のご使用にはやけど等に気をつけること。
使用後は水道水で洗浄し、よく水を切り陰干しすること。特に薬液等の使用後はよく洗い流すこと。
高温、直射日光等を避ること。
温度、湿度等、環境によって保管中にも劣化する場合がある。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- 直射日光、高温、多湿を避け冷暗所で保管すること。

【包装】

- 1ヶ入り

【添付文書及び文献請求先】

株式会社太陽医療品製作所
TEL. 03-3251-2825 FAX. 03-3251-8693

【製造販売業者の名称及び住所等】

第3種製造販売業者
株式会社太陽医療品製作所
〒101-0035東京都千代田区神田紺屋町38
TEL. 03-3251-2825