

類別:医療用品(医04)整形用品  
一般医療機器 液体包帯 JMDN 33584000

## プロシル

### 【禁忌・禁止】

- ・開いている傷口や深い刺し傷には使用しないこと。
- ・本品は未滅菌なので、無菌管理が必要な部位には使用しないこと。

### 【形状・構造及び原理等】

#### [構造]

本品は、皮膚の傷口(ケロイド、肥厚性瘢痕)の保護を目的として使用する、スティック状で塗るタイプの液体包帯である。

#### [主成分]

主要化合物:ポリオルガノシロキサン

固体形成:オクチルドデカノール

### 【使用目的又は効果】

皮膚の傷口を保護するために使用する、液体、半液体、又は粉末及び液体を組み合わせた材料である。

### 【使用方法等】

1. 適用皮膚部位をきれいに洗浄し、乾燥させます。
2. 適用皮膚部位全体に、本品をまんべんなく塗ります。
3. 毎日、塗った場所を清潔な布またはティッシュペーパー等で取り除いて、露出した皮膚部位に新しく塗りなおしてください。
4. 8～12 週間の間、もしくは適用皮膚部位に変化が見られなくなるまで、毎日何度かこのプロセスを繰り返してください。

### 【使用上の注意】

#### [重要な基本的注意]

1. 本品の使用中に、発赤、炎症や過敏症(アレルギー反応)などの皮膚の異常が見られた場合には、使用を中止し、医師に相談してください。
2. 感染がみられる傷には使用しないでください。
3. 外用にのみ使用してください。

### 【保管方法及び有効期間等】

1. 涼しい場所で、直射日光を避け保管すること。
2. 推奨保管温度:13℃～35℃。
3. 使用期限はラベルに記載(自己認証による)。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:ザイコア・インターナショナル・インク DSセンター  
電話番号 022-353-7245

製造業者:Biodermis Corporation (アメリカ合衆国)

#### 問い合わせ先

ザイコア・インターナショナル・インク

電話番号 03-6457-8379 FAX 番号 03-6457-8399

Email info@ziecor.com