

aisen [プロフェッショナルシリーズ]

# 内視鏡洗浄用 スポンジ

品番 イエロー:GP141 ピンク:GP140



## 商品の特徴

☞ 軟質ウレタンフォーム素材で、洗浄対象物を傷付けることなく、ソフトに洗浄できます！




**女性の手にもしっかり馴染むサイズ感！**

【サイズ】 外径60mm、内径8mm、長さ100mm、30mmCFカット

【カラー】 イエロー、ピンクの2色展開！

【素材】 軟質ウレタンフォーム

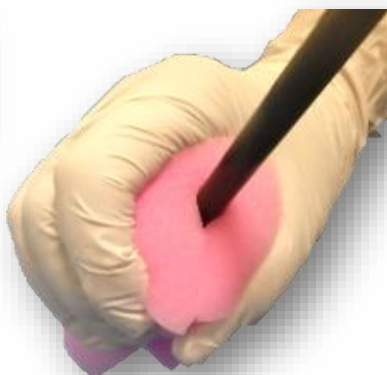

V字カット部分を軟性内視鏡のユニバーサルコード部に挟み込むことで、強い力を加えなくても確実に洗浄できます！レンズ部や操作部もスポンジを変えずに、フラット部分でラクラク洗浄！

## こんな問題・悩みを解消！

- ✓ 一般的なフラットスポンジでは、コードや筒状の器材を洗浄する際、どうしても隙間ができてしまう・・・  
⇒本製品ではこの問題を解消し、器材へ密着させた洗浄が行えます！




- ✓ 一般的なフラットスポンジでは、一方の面がざらつきのある素材となっている場合があり、その部分でレンズ等のデリケートな部分を傷付けてしまう・・・


⇒本製品ではこの問題を解消し、V字カット部分の背面にフラット部分を備え付けてある上、全面ソフト素材のため、ざらつき部分での傷付けを気にせず洗浄が行えます！




## 更にこんな器材・用途にも！

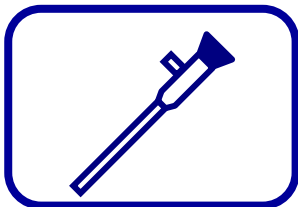


硬性内視鏡の洗浄

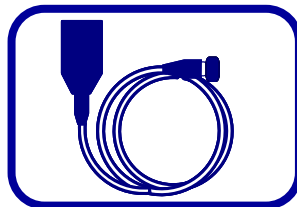

コード系器材の洗浄

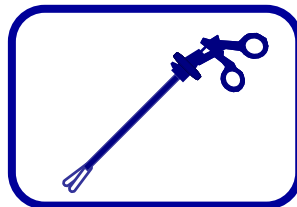

ラパロ鉗子の洗浄

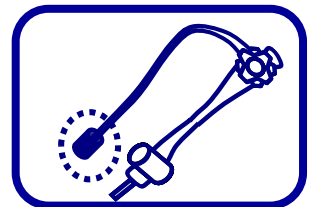

軟性内視鏡における  
保管時の先端保護

### 【使用上の注意点】

- ・ 毎日頻回に使用する場合は、1週間を目安として交換することをお勧めします。
- ・ 使用後は水気を切り、自然乾燥させて下さい。変色・劣化の原因に繋がる為、次亜塩素酸Na等の消毒剤への浸漬は行わないで下さい。
- ・ 洗浄対象物を傷つける可能性がありますので、固形物が付着している場合は、それらを取り除いてから使用して下さい。
- ・ 火気周辺での使用・保管は行わないで下さい。
- ・ 本来の用途以外（人体等）には使用しないで下さい。

内視鏡洗浄用スポンジ GP1411I0- / GP140ピソク  
材 質：ポリウレタンフォーム  
入 数：1I0-30個 / ピソク30個  
生産地：日本