

固定ベルト 万能ベルト

取扱説明書

※本品を正しくお使い頂くために、
ご使用前に本書をお読みください。
※内容をご理解頂き、記載事項・
使用上の注意をお守りください。



Takerora.

【各部の名称/材質】



【使用方法】

1. あらかじめ長さを調整したベルトを固定が必要な場所に通します。
2. バックル(メス)にバックル(オス)を「カチッ」という音がするまで差し込みます。



3. ベルト部分を上下・左右に引っ張り、バックルがきちんと留まっているかを確認してください。

【バックルの外し方】

1. バックル(メス)がベルトに繋がっている方向から専用共通キーを矢印の方向に差してください。
2. 専用共通キーに押し出されるように、バックル(オス)が外れます。



【使用上の注意】

- 本品を用いることにより、ベルトで留める対象物本来の機能が低下または滅失することによる二次的な損失については、責任を負うものではありません。
- 本品は特定の拘束を目的としたものではなく、使用者の責任と判断において固定を任意に行えるものです。
- 本品は医療事故を防止することを担保したものではありません。使用者の責任と判断のうえ、使用してください。

ご使用の際は、ご家族や専門家とご相談の上、正しくお使いください。
ご使用者の症状や状況に応じ、適宜安全をご確認の上、適切なケアをお選びいただきます。

【安全上の注意 (ご使用の際には必ずお守りください)】

- ・ご使用時は定期的にベルトおよびバックルに異常がないか確認してください。
- ・ご使用状況により、ベルトにほつれや破れが起きた場合やバックルに異常がおきた場合、思わぬ事故を招いてしまう恐れがありますので、定期的にほつれや破れの有無を点検しご使用ください。また、ほつれや破れがある場合はご使用を中止し、すみやかに交換してください。
- ・バックル部分に指や手をはさまないようにご注意ください。
- ・バックルを外す時には専用共通キーを必ずご使用ください。それ以外の方法で解した場合、破損することがあります。
- ・ご使用者の症状や状況に応じ、適宜安全をご確認の上、ご使用ください。

【使用例】



株式会社 竹虎。

URL <http://takerora-web.com/>
TEL 0120-094-315
(朝9時～17時 土日祝日を除く)

