

組成・成分表示








側地／表地 ポリエステル76%、
ナイロン24%(旭化成フュージョン®使用)
裏地 ポリエステル100%
詰め物／ポリエステル綿、ポリスチレンビーズ
(ミニはポリエステル綿のみ)

保管および取扱上のご注意

●定期的に風通しの良い日陰で乾燥させることをお勧めします。

洗濯方法

●本品は丸洗いでできます。お洗濯の際は下記の洗濯表示をお守りください。

	洗濯機は使用できません。液温40°C以下で、優しく手洗いしてください。
	酸素系漂白剤は使用できますが、塩素系漂白剤は使用できません。
	タンブル乾燥はできません。
	風通しのよい日陰で、平干ししてください。
	アイロン掛けはできません。
	ドライクリーニングはできません。
	ウエットクリーニングはできません。

手絞りの場合は弱く、遠心脱水の場合はネットに入れて短時間(30秒程度)脱水してください。

種類と規格

コンフィット

種類	商品コードNo.	規格		1袋入数
		サイズ	重量	
ジャンボ	19661	約83cm×83cm	約2.5kg	1コ
ピロー	19671	約40cm×90cm	約1.0kg	1コ
ウェーブ	19681	約65cm×75cm	約1.0kg	1コ
プーマラン(大)	19691	約50cm×90cm	約1.1kg	1コ
プーマラン(小)	19692	約44cm×74cm	約0.7kg	1コ
スティック(大)	19701	約20cm×60cm	約0.4kg	1コ
スティック(小)	19702	約20cm×40cm	約0.25kg	1コ
ミニ	19711	約30cm×50cm	約0.3kg	1コ

●別売の《コンフィット専用 撥水カバー》を併用いただくことで、本品に汚れが付きにくく、よりお使いいただきやすくなります。








コンフィット専用 撥水カバー

種類	商品コードNo.	規格(サイズ)	1袋入数
ジャンボ	19721	85cm×112cm	1枚
ピロー	19731	43cm×115cm	1枚
ウェーブ	19741	67cm×113cm	1枚
プーマラン(大)	19751	80cm×105cm	1枚
プーマラン(小)	19752	68cm×97cm	1枚
スティック(大)	19761	22cm×90cm	1枚
スティック(小)	19762	22cm×63cm	1枚
ミニ	19771	30.5cm×73cm	1枚

素材:ポリエステル100%

※使用中または使用後に発疹、かゆみ、痛みなどの異常を感じた時は直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。
※直射日光に長時間さらさないでください。変質の原因になります。

コンフィット専用 撥水カバーの洗濯方法

	液温40°C以下で、洗濯してください。
	酸素系漂白剤は使用できますが、塩素系漂白剤は使用できません。
	タンブル乾燥はできません。
	風通しのよい日陰で、吊り干ししてください。
	アイロンは150°Cを限度として掛けてください。
	ドライクリーニングはできません。
	ウエットクリーニングはできません。

手絞りの場合は弱く、遠心脱水の場合はネットに入れて短時間(30秒程度)脱水してください。

ALCARE

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825
www.alcare.co.jp

1612-2

for Best Care

ALCARE

コンフィット Comfit

ポジショニングピロー

Positioning Pillow

取扱説明書

- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、商品の特性を十分に理解してからご使用ください。
- 常に、この取扱説明書をお手元に置き、必要に応じてお読みください。

はじめに

《コンフィット》は体位保持、体圧分散、緊張緩和に適したクッションです。豊富な種類であらゆる状況に対応し、組み合わせることで、より理想的な環境を作り出します。安全にお使いいただくために、用途以外の使用はせず、この取扱説明書に従いご使用ください。

使用上のご注意

- *医療、介護向けの場合は、理学療法士や看護師などの指導を受けてご使用ください。
- ⚠ 警告……人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
- 注 意……人が軽傷を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

警告

- 本品を顔にかぶせたり、口に入れたりしないでください。窒息するおそれがあります。


注意

- 使用中または使用後に発疹、かゆみ、痛みなどの異常を感じた時は直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。
- 火または温度の高いものに近づけないでください。火災の危険があります。
- 詰め物を取り出さないでください。
- ハサミやナイフ、カッターなど鋭利なものを近づけないでください。破損の原因になります。
- 無理な力(強く握る、強く引っ張る、強くねじる等)を加えないでください。破損の原因になります。
- 高温のもの(ドライヤー、ストーブ、アイロン等)および低温のもの(ドライアイス等)に近づけないでください。変質の原因になります。
- 直射日光に長時間さらさないでください。変質の原因になります。


お客様相談室 ☎ 0120-770-175
(土・日・祝日を除く 午前9:00~午後5:30)
www.alcare.co.jp

使用例


■ブーメラン(大)

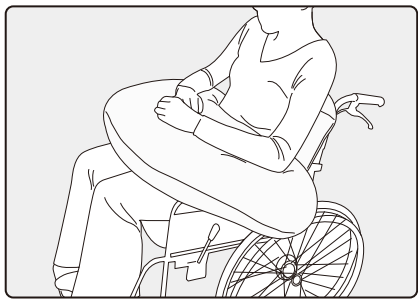


■ブーメラン(大)

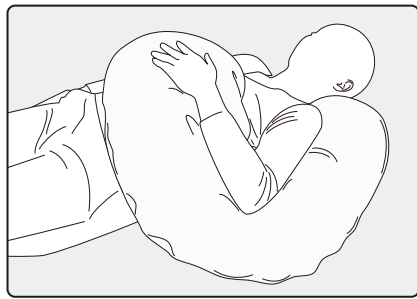


■ウェーブ

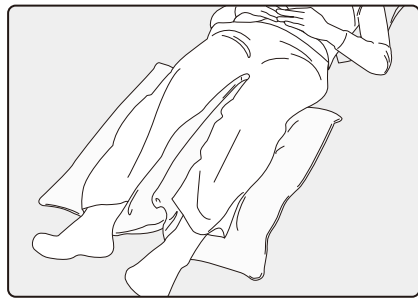


■スティック(小)
2個

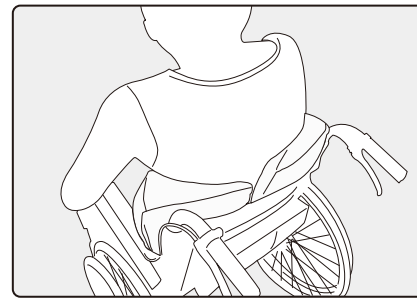


■ブーメラン(大)

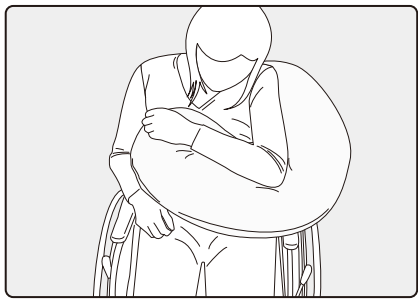


■ブーメラン(大)

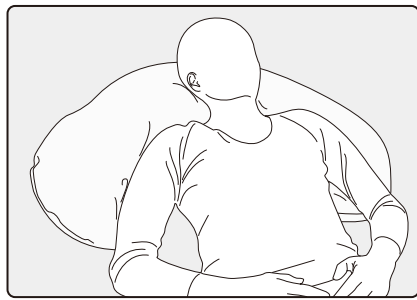


■ブーメラン(大)
■ミニ

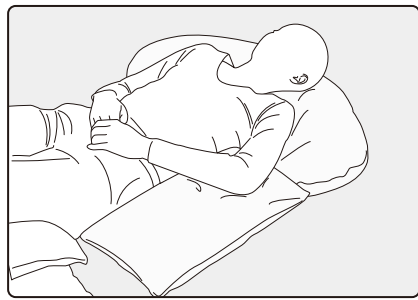


■ピロー
■ブーメラン

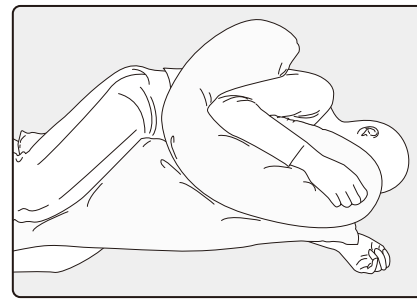


■ピロー

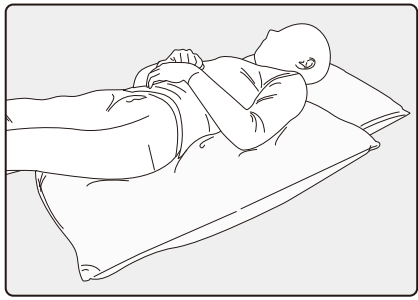


■ピロー

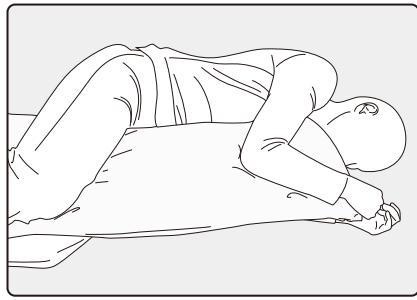


■スティック(大)
■スティック(小)

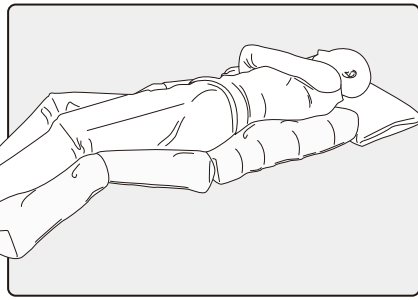

■ジャンボ
■ブーメラン(小)
■ウェーブ
■スティック

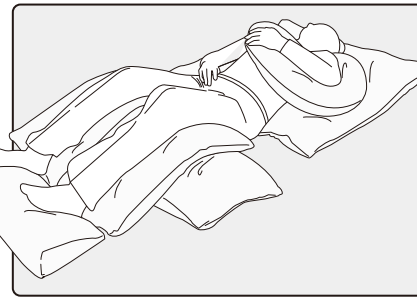

■ジャンボ

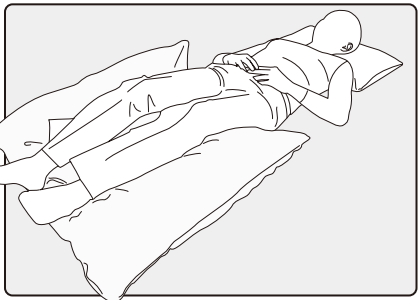

■ジャンボ

