

軽量マグネシウム合金製 歩行補助器具


MgウォーカーⅡ型キャスター付

サイズ：S・M

取扱説明書

このたびは「MgウォーカーⅡ型 キャスター付」をお買い求めいただきありがとうございます。ご使用前にはこの取扱説明書をよく読んで、正しく安全にお使いください。

- この説明書は、必要な時にすぐ取り出せるように、大切に保管してください。
- 当商品に関するお問い合わせは、当社(裏面記載)もしくはお買い求めの販売店にご連絡ください。

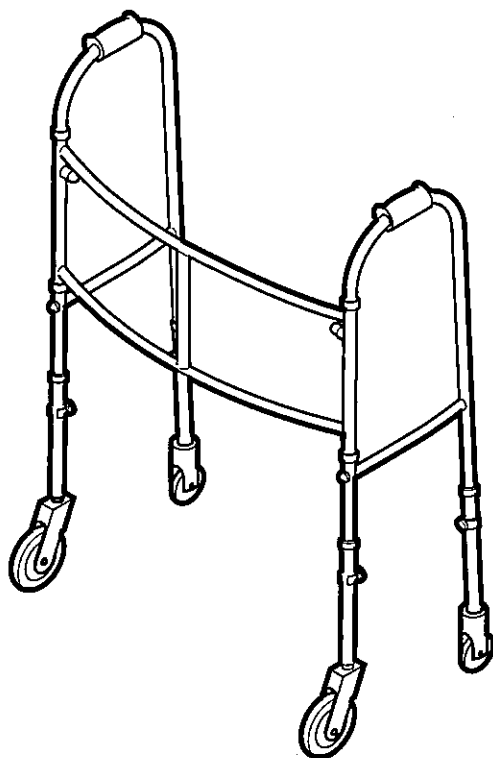

■用途


- 屋内の段差の無い床面で使用する歩行補助器具です。
- 両手で身体を支えることができる人、杖無しで自立歩行できる人がより安定して歩行できるように補助的に使用するための器具です。
- 歩く練習を行なう補助になります。
- 歩く時のバランスを補います。(安定性を高める)

■特徴

- 4点式のため、安定して荷重をかけられます。
- キャスター付のため、持ち上げずに移動させることができます。
- 軽量マグネシウム合金製です。
- 高さ調整ができます。
- インサートロックピンとロックナットで固定できます。
- 滑りにくい特殊グリップを採用。
- 後キャスターにブレーキ機能が付いています。

製造販売元 田辺プレス株式会社

各部の名称

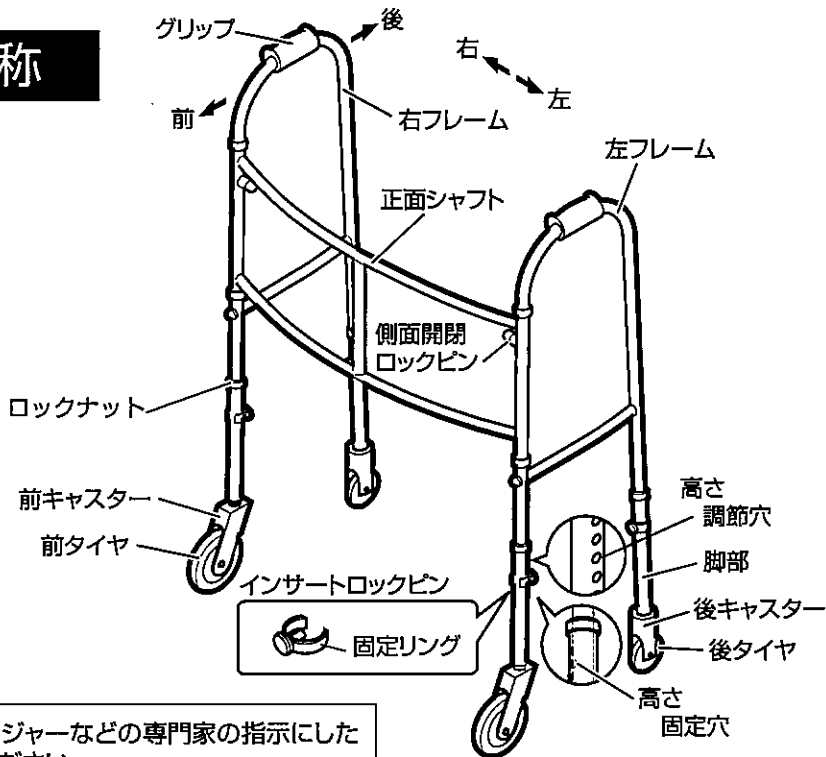

● 医師、ケアマネージャーなどの専門家の指示にしたがって使用してください。


警告 死亡又は重度の障害を負う可能性など重大な事故に至る場合があります。

- 脚先のキャスターの4点全部が水平に接地できない場所では使用しないでください。
- 垂直耐過重(200kg)を超えた力をかけないでください。
- 段差や斜面のあるところでは使用しないでください。(図-1)
- 敷物の上など、車輪が引っかかるような柔らかな床面では使用しないでください。(図-2)
- 濡れた床面など滑りやすい場所では使用しないでください。(図-3)
- 敷居など、車輪がはまり込むような場所では使用しないでください。(図-4)
- グリップ以外のところを持って使用しないでください。
- キャスターや車輪に異物を巻き込まないようにしてください。(図-5)


注意 ケガや器具損傷の原因となります。

- 上に乗らないでください。
- シャフト、脚部に横方向からの力をかけないでください。(図-6)
- 正面シャフトに荷重をかけないでください。(図-7)
- 火気に近づけないでください。
- 暖房器具の近く、直射日光が当たる場所、自動車内など高温になるところに置かないでください。(図-8)
- 氷点下などの低温になるところに置かないでください。
- 子供の遊び道具にしないでください。
- 振り回さないでください。
- 本書記載以外の用途には使用しないでください。

(図-1)

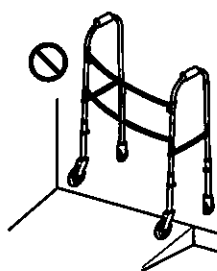


(図-2)

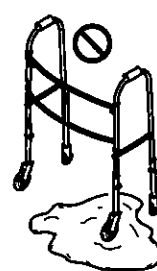

(図-3)




(図-4)

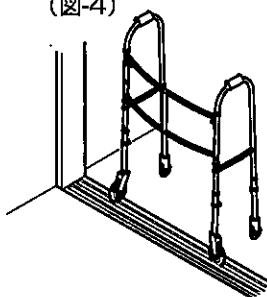


(図-5)




(図-6)

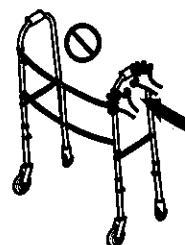

(図-7)

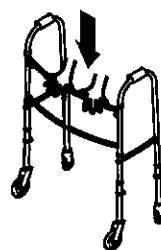

(図-8)

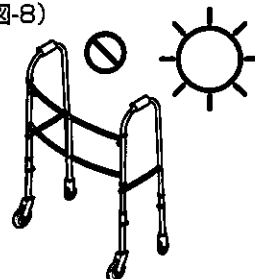

異常を感じた場合は、使用を中止し、当社又はお買い求めの販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、ケガや器具損傷などの原因となります。

■ご使用前の準備

●使用前にガタつき、シャフト・フレームのキズ、キャスター、車輪など各部に異常がないことを確認してからお使いください。

1. 左右のフレームを開きます。
2. 身体に合った高さに調節します。
3. インサートロックピンが確実に高さ調節用固定穴に入り固定されていることを確認します。
4. ロックナットが確実に締め付けられていることを確認します。

●左右フレームの開き方 (図-9)

1. 折りたたまれた状態より左右のフレームをゆっくりと左右に開きます。
2. 左右の開閉ロックピンが「カチッ」と音がして、開閉ロックピンが引き込まれロックされたことを確認します。

⚠ 注意 ケガや器具損傷の原因となります。


フレーム開閉ロックピンや開閉するフレームに、指や手を挟まないように気をつけてください。

●高さの調節方法


1. ロックナットを右に1回転させゆるめます。(図-10)
2. インサートロックピンを引き抜きます。(図-11)
3. シャフトをスライドさせ、高さを調節し、高さ調節穴の位置を合わせます。(図-12)
4. 合わせた高さ調節用固定穴にインサートロックピンを差し込み、「カチッ」と音がして、シャフトに固定させます。(図-13)
5. ロックナットを左に回して確実に締め付けます。(図-14)

⚠ 注意 ケガや器具損傷の原因となります。


●ロックナットは1回転以上ゆるめないでください。

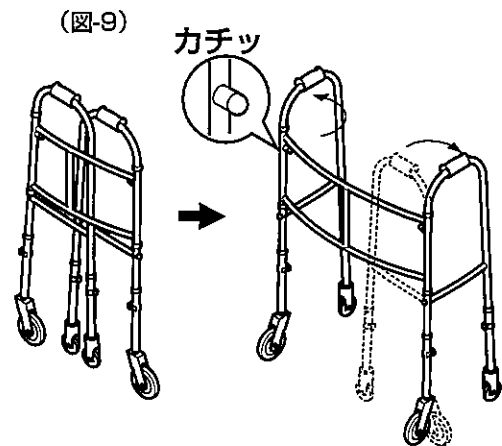


(図-10) ロックナットをゆるめます(1回転)

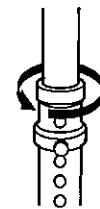


(図-11) インサートロックピンを引き抜きます

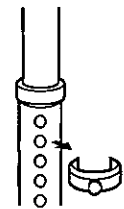


(図-12) 高さ調整穴の位置を合わせます

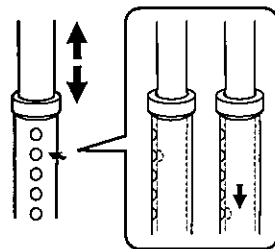

(図-13) インサートロックピンを差し込みます

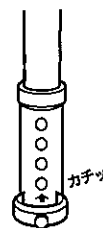

(図-14) ロックナットを締めます

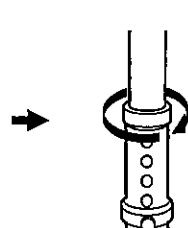

■使用方法

- 1.上方向から両手で左右のグリップをしっかりと握ります。
(図-15)
 - 2.本体を押し、肘が伸びきらない範囲で前方に移動させます。
(図-16)
 - 3.左右に均等に真上方向から体重をかけます。
 - 4.身体を支えながら足を前に移動します。(図-17)
- ※真上から体重をかけると、後キャスターが少し沈み込み、車輪が固定され、ブレーキを掛けた状態になります。



医師、ケアマネージャーなどの専門家の指示にしたがって使用してください。

■お手入れ方法

- 1.水分や汚れを拭き取ります。(図-18)
- しつこい汚れは、薄めた中性洗剤に浸した布を固くしぼって拭き取ります。その後、洗剤分等を乾いた布でよく拭き取ります。



注意 本体損傷の原因となります。

- 金属製のわし、ブラシなどは使わないでください。
- 磨き成分の入った洗剤、漂白剤は使わないでください。
- シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。



- グリップ、キャスター、車輪は磨耗したり、破れる等破損した場合は使用を中止し、新しい部品と交換してください。
- 交換用の部品は、当社またはお買い求めの販売店でご購入ください。

■保管方法

- 1.お手入れ方法に従った後、左右のフレームを閉じます。
- 2.室内の湿気の少ない、風通しのよいところに保管してください。

●フレームの閉じ方


- 1.左右の開閉ロックピンを引き左右のフレームが動くことを確認します。(図-19)
- 2.左右のフレームを内側に折りたたみます。(図-20)

仕様


品名:軽量マグネシウム合金製歩行補助器具「MgウォーカーⅡ型キャスター付」
材質:【フレーム・シャフト・脚部】マグネシウム合金、アルミニウム、溶接、
【グリップ】エラストマ樹脂、【キャスター】マグネシウム合金、【タイヤ】(前後とも)エラストマ樹脂、【インサートロックピン】真ちゅう樹脂、【ロックナット】アルミニウム【側面開閉ロックピン】真ちゅう樹脂
重量:(約)【S】2.35kg、【M】2.50kg
寸法:(約)【S】横幅 36.5cm、奥行(展開時)46.0cm、(折りたたみ時)11.0cm、高さ 68.0~75.0cm
【M】横幅 44.0cm、奥行(展開時)48.0cm、(折りたたみ時)11.0cm、高さ 74.5~87.5cm
垂直耐加重:(約)(4点接地時)200kg

※上記仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。


(図-15)

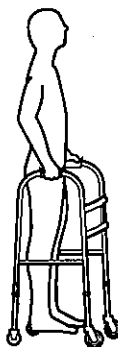


(図-16)

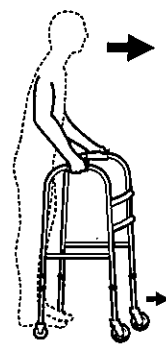


(図-17)

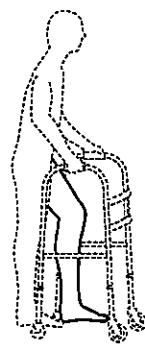


(図-18)

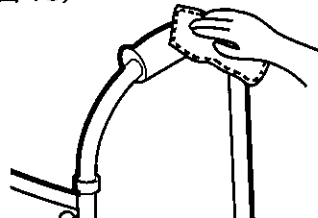

(図-19)

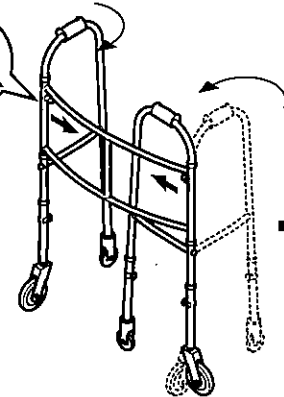

(図-20)

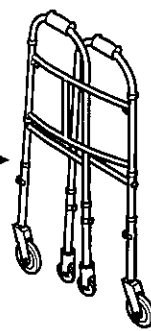

【保証規定】別途添付の保証書をご覧ください。

■製造販売元

田辺プレス株式会社

〒955-0814 新潟県三条市金子新田984-21
電話: 0256-32-1492 FAX: 0256-35-8095
e-mail: tbpress@ginzado.ne.jp

2012.02