

あなたの健康とともに

**M** Matoba Electric  
Manufacturing Co.,Ltd

# プロ技の 全身マッサージで、 からだココロの トリートメント。

自らの体重をかけることにより、横になるだけで全身をマッサージ、  
指圧の効果が得られます。


筋肉のこりをほぐし、血行の促進や新陳代謝を促すことで、  
疲労回復及び神経痛・筋肉痛の緩和等に効果があります。



M A S S A G E R E L A X A T I O N

## ROLLER COMFORT PRO


ローラーコンフォートプロ

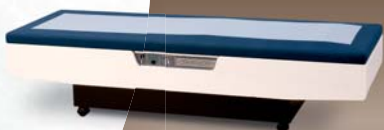

ブルー



ブラウン

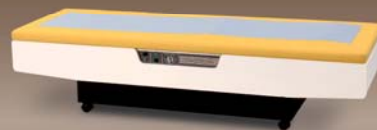

イエロー



商品企画、設計、製造まで一貫して自社生産にこだわった国産品

日本製

# 首筋から足首まで全身くまなくマッサージ。

様々な「こだわり」が、極上のリラックスタイムを生み出す。

- ◎手の甲サイズの「大径ローラー」でプロ並みのマッサージ効果を追及。
- ◎お好みの強さを選べる3段階調節。
- ◎スイッチを入れてタイマーをセットするだけの簡単操作。
- ◎質実剛健なボディで高い安全性と耐久性。
- ◎キャスター付きなので移動もらくらく。
- ◎気になるマッサージ機の動作音を大幅にカットし、とっても静かな使用感。

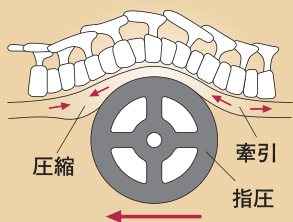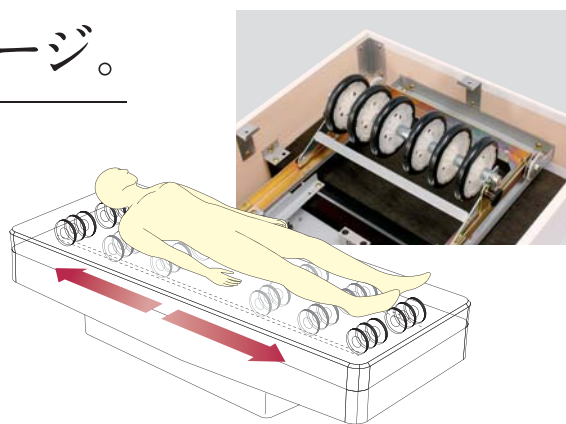

## ローラーコンフォートプロの特長

圧縮・牽引・指圧を繰り返しながら移動する大径ローラー内蔵で、全身をくまなくマッサージ。自らの体重や圧迫による指圧効果で、血行を促進し、疲労回復、筋肉痛の緩和にも効果的です。ローラーの高さを3段階に調節することにより、お好みの強さでご使用いただけます。

MESSAGE RELAXATION

## Roller Comfort Pro ローラーコンフォートプロ

### ■ご使用方法

#### ■動かす場合

1. 操作パネルにある電源スイッチが「切」であることを確認した上で、電源プラグをコンセントに差し込んでください。
2. 電源スイッチを「入」にしてください。電源が入りパイロットランプが点灯します。
3. タイマーツマミを廻し30分の範囲内で、お好みの時間にセットしてください。

5分以下のセットは、いったん10分以上に巻き上げてからツマミを戻してセットしてください。




#### ■停止する場合

1. タイマーツマミを「切」の位置に戻してください。ローラーが定位置に戻り電源が切れ動作が停止します。タイマーのセット時間が終了すると、ローラーが一定位置に戻り自動的に電源が切れ動作が停止します。続けて使用したい場合は、タイマーツマミをお好みの位置にリセットしてください。

2. 全て停止完了したことを確認後、電源スイッチを「切」にしてください。パイロットランプが消灯後、電源プラグをコンセントから抜いてください。

#### ■効果的なご使用方法

本体中央部にゆったりとリラックスした状態で寝てください。ローラーが背骨を中心に指圧をおこないます。

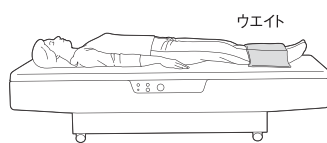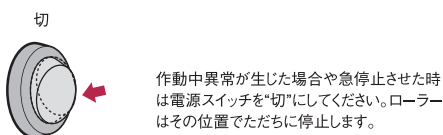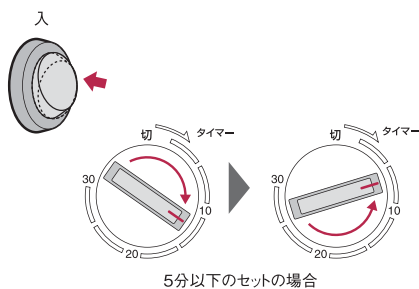

付属品のウエイトをモモあるいはスネのあたりにのせると、ローラーで足元が浮かない様になり、マッサージ効果が高まります。

### ■仕様

◎販売名:ローラーベットのファインII ◎商品名:ローラーコンフォートプロ ◎医療機器承認番号:22000BZX00166000 ◎分類:管理医療機器 ◎類別:機械器具(79) 指圧代用器 ◎一般的な名称:家庭用ローラー式指圧代用器 ◎製造国:日本 ◎電気代(無負荷時):30.375円/月(1日30分) 新料金目安単価27円/kWh(税込) ◎定格電圧:AC100V ◎定格周波数:50/60Hz ◎消費電力:75W ◎定格時間:30分 ◎タイマー時間:30分 ◎ローラストローク:約950mm ◎ローラ移動時間:頸足動作間約23秒 ◎ローラ高さ調節:3段階(手動) ◎安全装置:タイマー/過負荷停止装置/過熱防止装置

#### <商品本体規格>

◎本体:幅67×長さ196×高さ46cm ◎重量:約62kg

※改良のため一部仕様を予告なく変更することがあります。

### ⚠安全に関するご注意

ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

※次の人は、**使用しないでください。**

◎医師からマッサージを禁じられている人 例:血栓(塞栓)症、重度の動脈けいゆう(瘤)、急性静脈けいゆう(瘤)、各種皮膚炎及び皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む。)など◎急性の頸椎ねんざ(むちうち症)の疑いのある人。

※次の人は、**使用前に医師に相談してください。**

◎心臓に障害のある人◎ペースメーカー等電磁障害を受けやすい体内植込型医用電気機器を使用している人◎悪性腫瘍のある人◎妊娠初期の不安定期又は出産直後の人◎糖尿病等による高度な末梢循環障害による知覚障害のある人◎皮膚に創傷のある人◎骨粗しょう症の人・脊椎の骨折、捻挫、肉離れなどの急性疼痛性疾患の人◎治療部位に異常(感染症、創傷など)のある人◎体温38℃以上(有熱期)の人 例:急性炎症症状(倦怠感、悪寒、悪寒、血圧変動など)の強い時期にある人・衰弱している人◎安静を必要とする人や著しく体調のすぐれない時◎脊椎(せきつい)に異常のある人・背骨が曲がっている人◎腱鞘炎の人◎その他、医療機関で治療中の人やかつて治療を受けた部位に使用するとき上記以外に身体に特に異常を感じている時◎使用しても効果が現れない場合

※特定の病気をもちでない場合でも、高齢者や骨が弱いと思われる方は使用前に医師に相談してください。

※お子様や自分で意思表示ができない人や身体の不自由な人に使用させないでください。また、お子様やペットを本体の周辺で遊ばせたり、本体の上のせたりしないでください。事故やケガの原因になります。

## 的場電機製作所はこれからも皆様の健康のために。

株式会社の的場電機製作所は1962年設立以来、小型精密モーターの開発に真摯に取り組む、その技術は健康機器・医療機器の分野へ広がっています。

ローラーマッサージ機(SRシリーズ)に於いては、1983年の製造開始から現在に至るまでたくさんのお客様にご愛用頂き、販売実績は200万台を数えます。

皆様の健康のために、これからも今まで以上に意識して本当の「ものづくり」に専念していきます。

製品に関するお問合せ、ご相談は当店です。

製造販売業者



株式会社 的場電機製作所

本社:〒350-1101 埼玉県川越市越場2627  
TEL 049-231-2255 FAX 049-231-6789  
URL <http://www.matoba.co.jp>

製造販売業許可番号 11B2X00062