

Mepore®

ミポア

ミポアは、通気性のある不織布にパッドを付した接着性ドレッシングです。溶媒を使用していないウオーターベースのアクリル系の粘着剤を使用しているため、皮膚にやさしく、確実に固定できます。

簡便な貼付システム

- 簡単に除去できる剥離紙付きなので、容易な貼付が可能

柔軟性に富む通気性のある不織布


- 快適な装着感

非固着性の創部接触面

- ドレッシング交換時の疼痛の緩和

溶媒を使用していないウオーターベースのアクリル系の粘着剤

- 皮膚にやさしく、確実な固定が可能

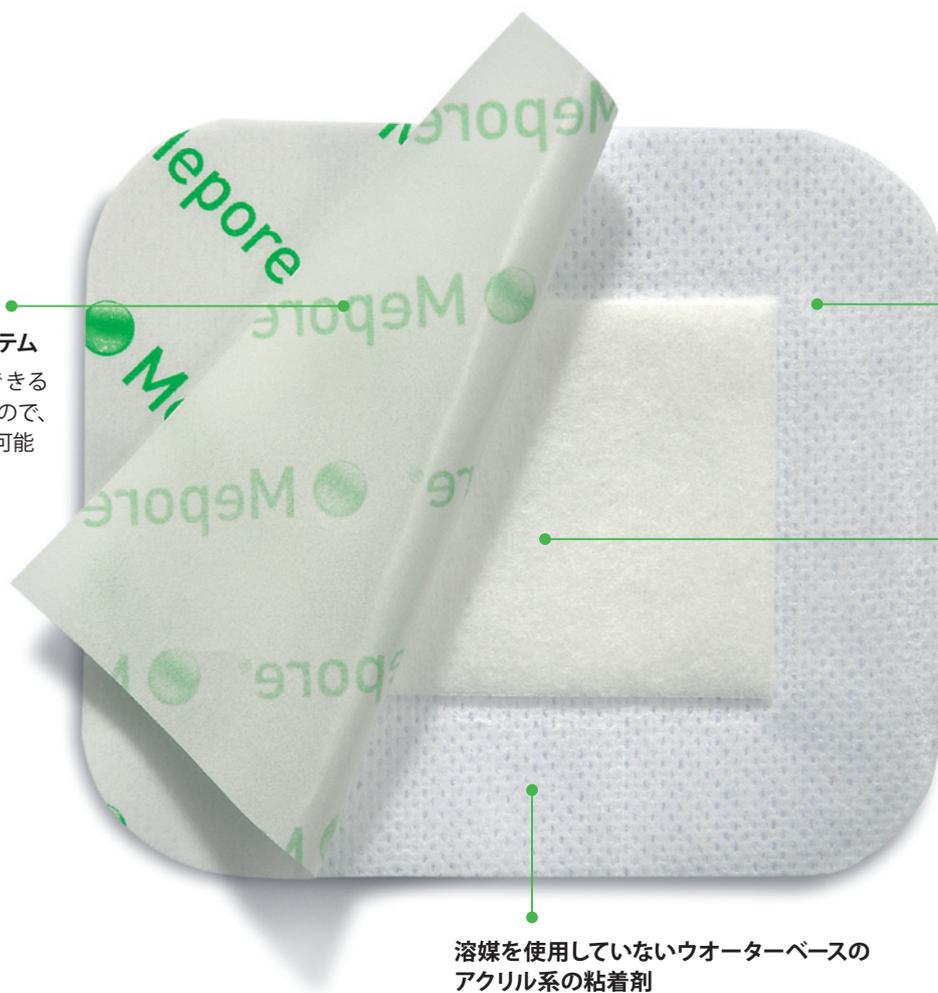

特徴と利点

- ウォーターベースのアクリル系の粘着剤を使用しているため、皮膚にやさしく、確実に固定できます。
- 創部接触面が固着しにくい構造になっているので、ドレッシング交換時の疼痛リスクを軽減します。
- 通気性があるので、浸軟リスクを軽減します。
- 不織布は柔軟性に富み、快適な装着感を提供します。
- 撥水性の不織布なので、液体や血液のストライク・スルーを防ぎます。

使用方法

- (1) 創部に大きさに応じ、周辺皮膚も十分に覆うことが出来る適切な製品サイズを選びます。〈図1〉
- (2) 本品の剥離紙の重なった片方を取り除きながら、本品の接着面をやさしく創部・穿刺部へ押し付けてください。〈図2〉
- (3) 剥離紙を完全に除去し、本品を完全に密着させて下さい。〈図3〉

〈図1〉



〈図2〉



〈図3〉



一般医療機器 救急絆創膏 届出番号:13B1X10015WC0001

製品番号	製品サイズ (cm)	パッドサイズ (cm)	枚/箱
670800	6 x 7	3 x 4	60
670900	9 x 10	4.5 x 6	50
671000	9 x 15	4.5 x 10	50
671100	9 x 20	4.5 x 15	30
671200	9 x 25	4.5 x 20	30
671300	9 x 30	4.5 x 25	30

EOG滅菌済 再使用禁止

「使用方法及び使用上の注意」等については添付文書をご参照ください。

製造販売業者

メンリッケヘルスケア株式会社

ウンドケア事業部
〒160-0023

東京都新宿区西新宿6-20-7 コンシェルシア西新宿タワーズ ウェスト
TEL:03-6914-5005
FAX:03-5909-1142

販売元

松吉医科器械株式会社

〒113-8520
東京都文京区湯島3-14-9 湯島ビル3F
TEL:03-5816-8819
FAX:03-5816-8825

