


# Mepore® Film&Pad

## ミポア フィルム パッド

ミポア フィルム パッドは、非固着性パッドに水蒸気透過性ポリウレタンフィルムを付した吸収パッド付フィルムドレッシングです。フレーム状の貼付システムにより、創部に容易に貼ることができます。また、貼付時の違和感も少なく患者様が快適に過ごすことができます。

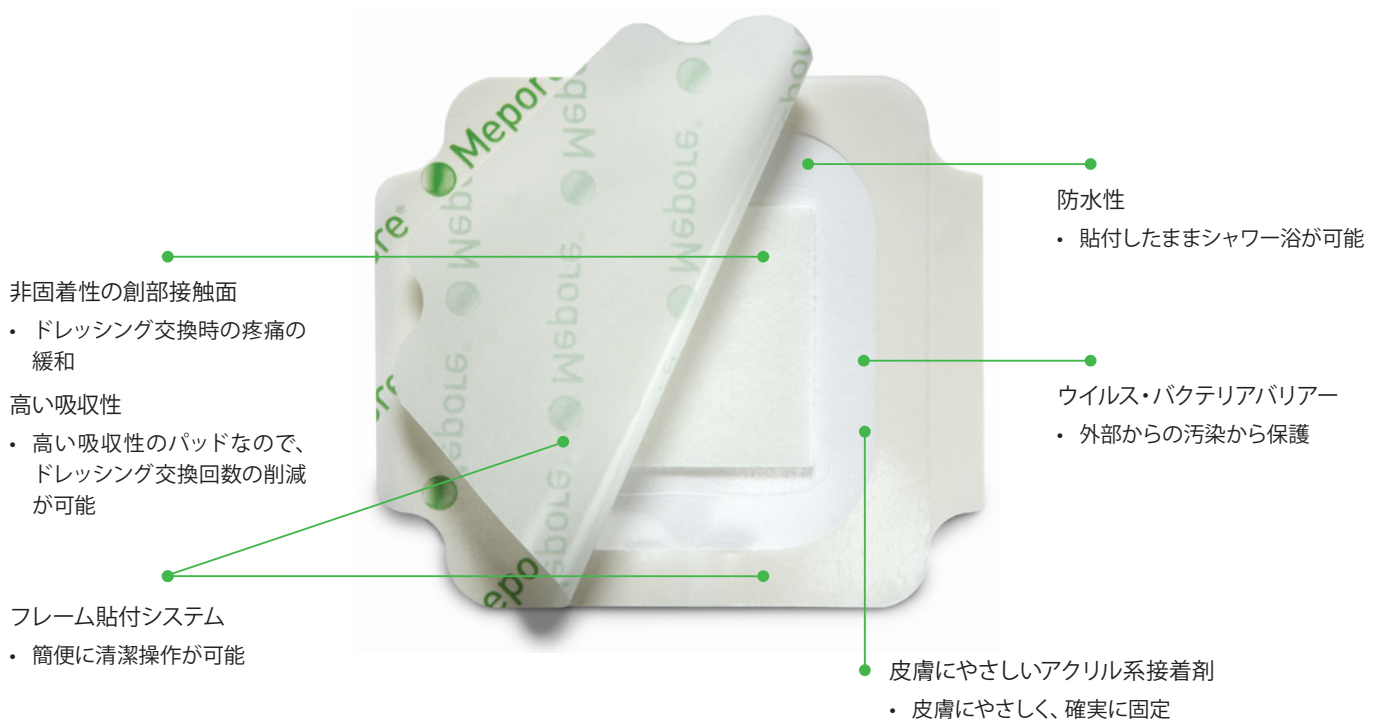


## 特徴と利点

- ・ 創部接触面が固着しにくい構造になっているので、創部への固着のリスクを軽減します。
- ・ 通気性を確保しつつ、水を通さない防水性を備えているので、貼付したままシャワー浴ができ、長期貼付も可能です。
- ・ フレーム状剥離紙の貼付システムにより、簡単に清潔操作ができます。
- ・ 外部からのウイルスや細菌を通さないので、二次感染のリスクを軽減します。
- ・ 透明フィルムを通してパッドの浸出液吸収状態や周囲皮膚の状況を観察できます。
- ・ 身体の屈曲部に貼付しても、なじんで密着します。
- ・ 皮膚にやさしいアクリル系粘着剤は、固定力にも優れています。

## 使用方法

- (1) 創部の大きさに応じ、周辺皮膚も十分に覆うことが出来る適切な製品サイズを選んでください。本品を引っ張った状態で貼付しないでください。〈図1〉
- (2) 本品を優しく創部・穿刺部に押し付け、フレーム状剥離紙とタブ状の紙を剥がします。〈図2〉
- (3) 本品を貼付後、完全に密着させます。〈図3〉

〈図1〉

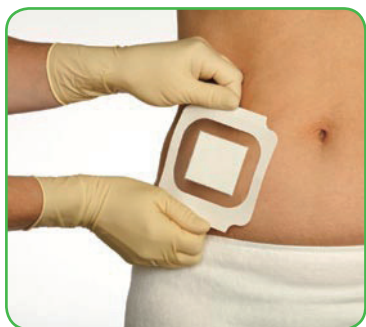

〈図2〉



〈図3〉



一般医療機器 救急絆創膏 届出番号:13B1X10015WC0003

製品番号	製品サイズ (cm)	パッドサイズ (cm)	枚/箱
275100	4 x 5	1.5 x 2.5	85
275200	5 x 7 (楕円)	2.5 x 4	85
275300	5 x 7	2.5 x 4	85
275400	9 x 10	4.5 x 4	30
275500	9 x 15	4.5 x 10	30
275600	9 x 20	4.5 x 15	30
275700	9 x 25	4.5 x 20	30
275800	9 x 30	4.5 x 25	25
275900	9 x 35	4.5 x 30	25

EOG滅菌済 再使用禁止

「使用方法及び使用上の注意」等については添付文書をご参照ください。

## 製造販売業者

メンリッケヘルスケア株式会社

ウンドケア事業部

〒160-0023

東京都新宿区西新宿6-20-7 コンシェルシア西新宿タワーズ ウェスト

TEL:03-6914-5005

FAX:03-5909-1142

