

アルケアだから実現できた、 足関節固定のための新しいスタイル。

独自形状のキャストステー + 専用のステーカバー

1955年、国産の石膏ギブス「スピードギブス」の開発、製造に
成功して以来、ギブス固定の製品開発と改良を重ねてきたアルケアの提案する、
新カテゴリーのカバー付きキャストリングシステム。
コンセプトは「Wearable Cast ～ギブス固定のストレスフリーを目指して～」。
開発にあたりギブス使用者への調査を行い、ギブスへの不満や悩みを分析。
それらを解決するために、新たな視点で
アルケアの持つ技術を融合し生まれました。

患者さんと医師にうれしい、
キャストリングの新しいカタチ


Fit Cure

【フィットキュア】

カバー付きキャストリングシステム

Wearable Cast

～ギブス固定のストレスフリーを目指して～

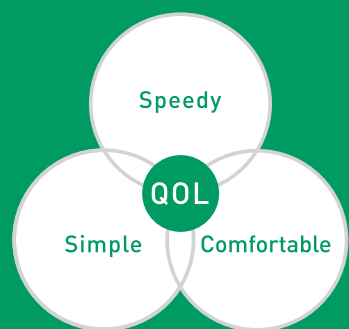

Fit: ぴったり合う、適合する + Cure: 治療する、硬化する

使用手順

1

2

3

4

5

6

アルミパックを開封し、キャストステーを取り出します。

キャストステーの内側(印字がない面)に水をつけ芯材をよく濡らします。

印字面を上側にしてキャストステーポケットにキャストステーを挿入し、フラップに収納します。同様にもう片方のキャストステーを挿入します。

凸面を外側にします。
フラップ

内外果パッド

すねベルト
足首ベルト
甲ベルト
クロスベルト(外側)
クロスベルト(内側)

内外果パッドの上にくるぶしが当たるように、ステーカバーを両側から覆います。

固定する肢位を保持しながら、①甲ベルト、②足首ベルト、③すねベルト、④クロスベルト(内側)、⑤クロスベルト(外側)の順にとめます。

ステーカバーを装着したらモールディングします。



フィットキュア®・アングル Fit Cure-Ankle

種類	商品コード No.	規格		1箱入数	メーカー希望 小売価格(税抜き)
		甲周囲	セット内容		
LL	19911	27.5～29.5cm	キャストステー： 左右各1枚 ステーカバー： 1コ	1セット	¥7,000
L	19912	25.0～27.5cm			
M	19913	22.5～25.0cm			
S	19914	20.0～22.5cm			

一般医療機器/医療機器届出番号：13B1X00207000067

サイズの選定方法

- 健足の甲周囲を基準としてお選びください。
- 甲周囲(足首のつけねから足先方向に約5cmの周径)を測ってください。

※2つのサイズにまたがる場合は、小さいサイズをお選びください。

ALCARE

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825
www.alcare.co.jp

- 本カタログの内容は2019年3月現在のものです。
- 商品の仕様、デザインおよび価格は、改良や経済状況の変動などにより予告なく変更することがあります。
- 本カタログに掲載の写真は、実際の色とは多少異なる場合がありますので、ご了承ください。

お問い合わせ：コールセンター

フリーダイヤル **0120-770-863** 土・日・祝日を除く
午前 9:00～午後 5:00



この印刷物は、EPAのシグナチャー基準に適合した
地球環境にやさしい印刷方法で作成されています
EPA 環境省印刷物環境配慮マーク
<http://www.e3pa.com>

for Best Care **ALCARE**

フィットキュア®・アングル Fit Cure-Ankle



もっと簡単に
つけられること。
もっと快適に
すごせること。

カバー付きキャストリングシステム
Casting System with Cover

いままでのスプリント固定に代わる、 足関節固定の進化したカタチ。

足の形状に合わせた **キャストステー** + **ステーカバー** だから、
その人にフィットしたギプス固定がすぐに行えます。



プレカットのキャストステー 専用のステーカバー キャストステーをステーカバーに挿入。 ステーカバーを装着してモールドニング。



キャストステー + ステーカバーで 的確な固定とADLの両立。



スプリント固定の包帯巻きに比べ、 専用ステーカバーが処置と着脱の手間を軽減。



「水濡れ」「蒸れ」のストレス低減に向けて、高速乾・高通気の生地を使用しています。

