

皮下埋込型ポート用
針刺し防止機能付フーバー針

PerfuSafe2

パーフセーフ2

CT 24.1 bar
350 PSI


- 針刺し防止機能付きの皮下埋込型ポート用フーバー針です。
- 抜針時、針刺し防止機能は簡単4つのステップで作動します。
抜針時、廃棄時の針刺しのリスクを低減します。

つまむ


押さえる

引き上げる

クリック

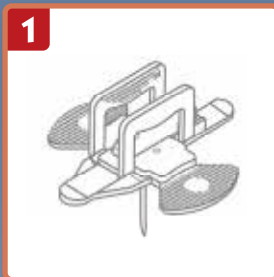


上部ウィングをつまみ、
把持します。

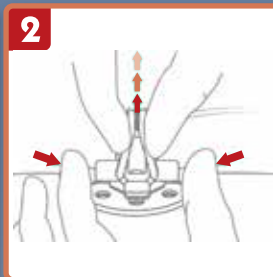

上部ウィングを把持しな
がら下部ウィングをしっ
かり押さえます。





下部ウィングを押さえな
がら上部ウィングを真っ直
ぐ引き上げます。

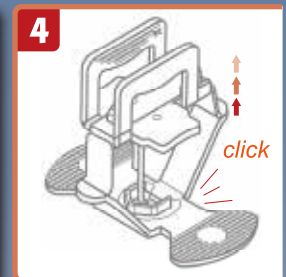


「カチッ」というクリック
音で作動完了です。

● ローププロファイルのデザイン




針刺し防止機能がついていながらローププロファイル（薄型）のデザインですので
ドレッシング材等での固定操作がスムーズにおこなえます。

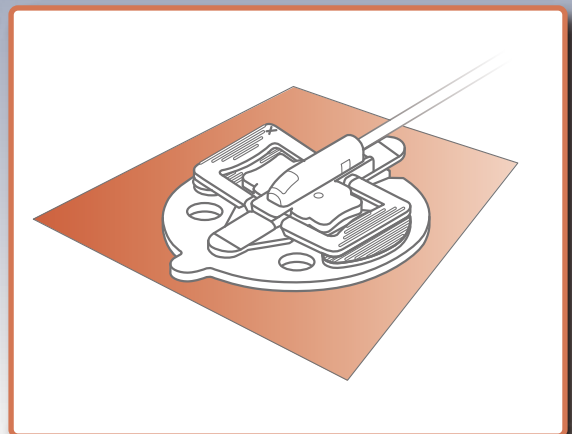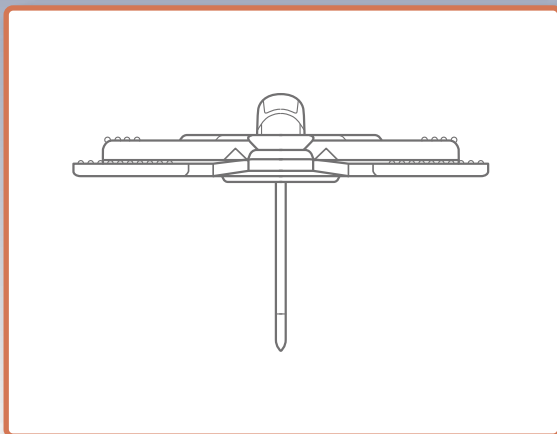

● デザインのひとつひとつに
ビゴンのアイデアが集結しています。

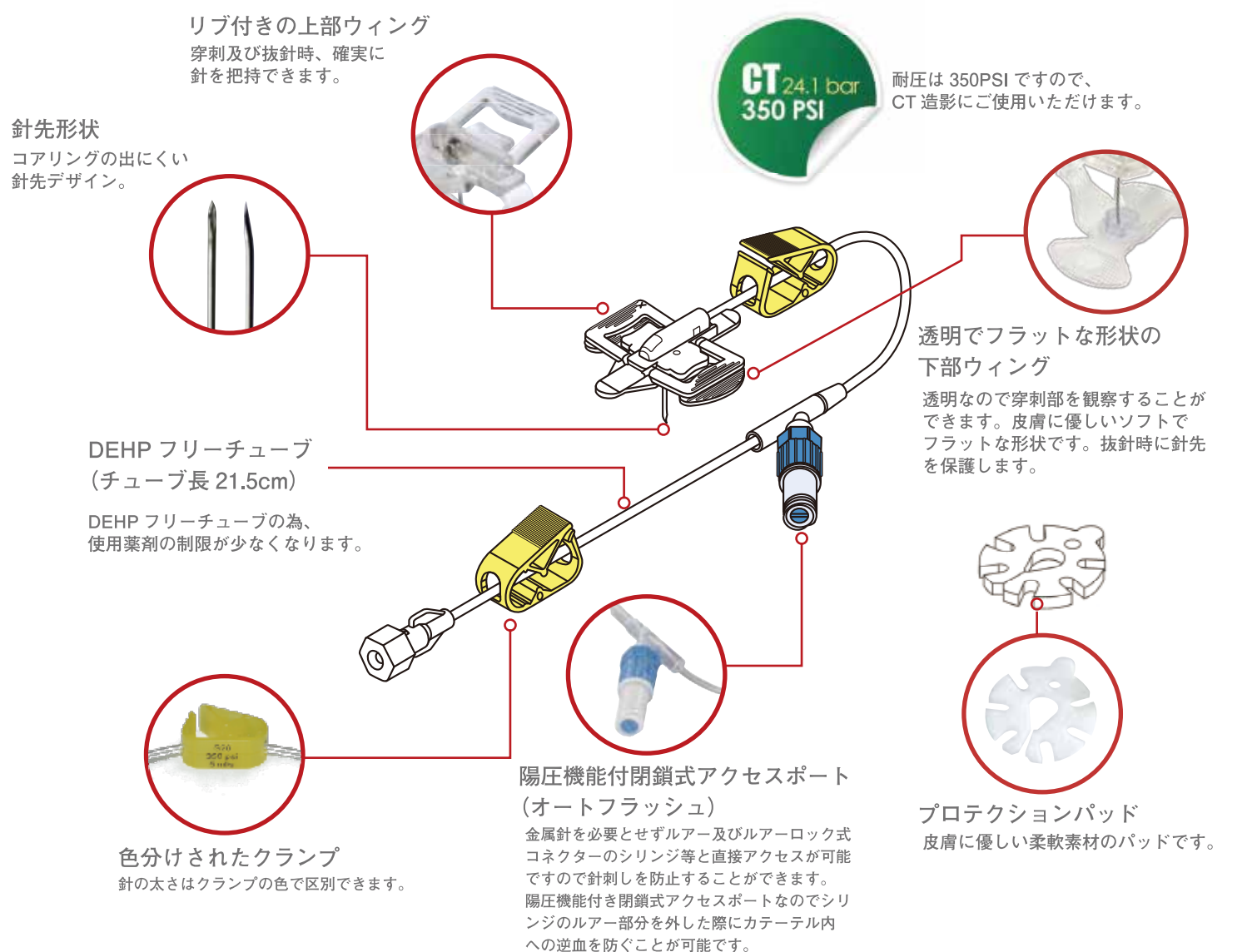

*イラストは Y サイト / オートフラッシュ付き 20G 製品です。

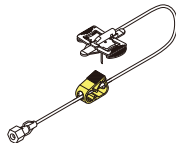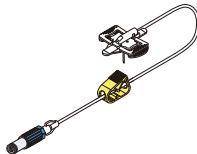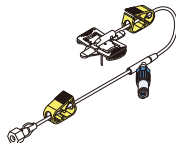製品一覧表			製品コード				
針の太さ (ゲージ)	クランプの色	針の長さ	チューブタイプ			耐圧	販売単位
			ストレート	ストレート オートフラッシュ付き	Y サイト オートフラッシュ付き		
20G	イエロー	15mm	5249.915	5249.916	5250.915	350psi	10 本 / 箱
		20mm	5249.920	5249.921	5250.920		
		25mm	5249.925	5249.926	5250.925		
22G	ブラック	15mm	5249.715	5249.716	5250.715		
		20mm	5249.720	5249.721	5250.720		
		25mm	5249.725	5249.726	5250.725		
							

* 改良のため仕様は予告なく変更させていただく場合があります。ご了承下さい。
* ご使用前に添付文書を必ずお読みください。

販売名: ビゴン パーフェーフ 2
医療機器認証番号: 224AMBZX00005000

製造販売元
株式会社ビゴン・ジャパン
大阪市中央区平野町 4 丁目 6 番 3 号 大明ビル 5 階
www.vygon.co.jp