

ETIQUETTE  
PACK

エチケットパックシリーズ

# エチケットカップ®

男女兼用

- MDC-10 -



## 特 長

従来の紙コップの不安感、抵抗感を少なくし、  
採尿をより易しくスムーズに行えます。  
集尿時のはね・飛びを極力防ぎます。  
(特にご年配の方のご使用にご好評いただいております。)

### ( POINT 1 )

※従来の紙コップと比べ不安感を少なくし  
スムーズな採尿が行なえます。

### ( POINT 2 )

※体にフィットしやすい立体形状。

### ( POINT 3 )

※検尿時の抵抗感の軽減に役立ちます。

### ( POINT 4 )

※集尿時の跳ねや飛散を極力防ぎます。

## 使い方


1. エチケットカップの<sup>ぜんご</sup>前後  
(とがった方が<sup>まえ</sup>前)を  
<sup>たし</sup>確かめて<sup>きよくぶ</sup>局部に<sup>ちよくせつ</sup>直接あて  
<sup>さいによう</sup>がって採尿してください。



2. 尿量は<sup>にようりよう</sup>半分<sup>はんぶん</sup>以上か、  
<sup>かんごし</sup>看護師の<sup>しじ</sup>指示に  
<sup>したが</sup>従ってください。



3. 採尿後、尿の入った  
エチケットカップを<sup>してい</sup>指定の  
<sup>ばしょ</sup>場所に<sup>お</sup>置いてください。

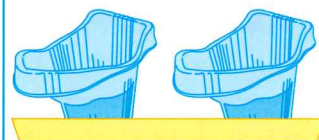

|     |                                                                                                                                                                                |                |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| 商品名 | MDC-10 エチケットカップ                                                                                                                                                                |                |  |
| 用 途 | 男女兼用検尿容器                                                                                                                                                                       |                |  |
| 入 数 | ケース                                                                                                                                                                            | 600(小箱/100×6箱) |  |
|     | 小箱                                                                                                                                                                             | 100(小袋/ 50×2袋) |  |
| 製造元 | <div>株式会社 北原産業</div> <div>東京都中央区新富1丁目13番26号(新富TTビル)</div> <div>TEL. (03) 5541-7366(代)</div> |                |  |