

ETIQUETTE
PACK

エチケットパックシリーズ

エチケットキャップ®

- MDC-20 -

女性専用



特 長

従来の紙コップ上部に装着していただくだけで、お体にフィットし、検尿の抵抗感を少なくし、集尿時のはね・もれを極力防ぎます。
(特に、若い方のご使用にご好評いただいております。)

(POINT 1)

※従来使用の紙コップにアソートするだけの簡単使用。

(POINT 2)

※体にフィットしやすい立体形状。

(POINT 3)

※検尿時の抵抗感の軽減に役立ちます。


(POINT 4)

※集尿時の跳ねや飛散を極力防ぎます。

使い方

1.

エチケットキャップを
紙コップの上部に
しっかりセットします。

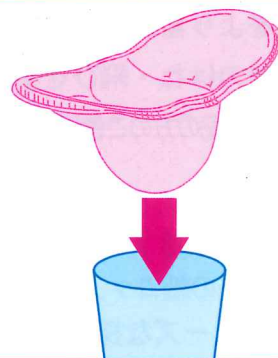


2.

紙コップを手で持ち、
エチケットキャップを局部に
あてがって採尿してください。
※尿量は看護師の指示に従ってください。



3.

採尿後、エチケットキャップを
紙コップから外し、尿の入った
紙コップを指定の場所に
置いてください。

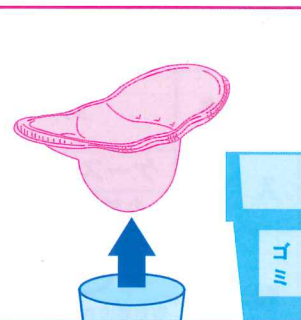

商品名	MDC-20 エチケットキャップ	
用 途	女性専用検尿容器	
入 数	ケース	1,200 (小箱/200×6箱)
	小箱	200 (小袋/100×2袋)
製造元	 株式会社 北原産業 東京都中央区新富1丁目13番26号(新富TTビル) TEL. (03) 5541-7366(代)	