




エレファドレープシリーズ

● エレファドレープ 吸水 / 防水タイプ

EOG 滅菌済

吸水・防水タイプの滅菌ドレープになります。吸水性の良いспанレース不織布と成形されたPEフィルムを薄いホットメルトで貼り合わせた素材です。高吸水性で非常に柔らかく、かつ、完全防水の優れた吸水ドレープです。

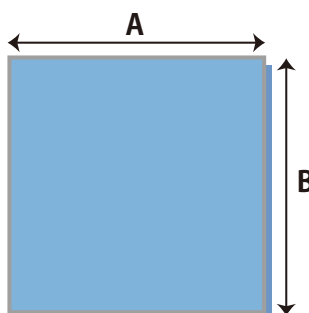


品番	規格	サイズ (Acm×Bcm)	ケース入数
●3183001	HZ-606	60cm×60cm	50枚×4箱(200枚)
●3183002	HZ-909	90cm×90cm	50枚×2箱(100枚)
●3183012	HZ-912	90cm×120cm	50枚×2箱(100枚)
●3183003	HZ-1212	120cm×120cm	50枚×2箱(100枚)

● エレファ器械台カバー 吸水 / 防水タイプ

EOG 滅菌済

器械台用の滅菌ドレープになります。2種類あり、サイズに応じてお選びすることができます。仮固定用テープ付きです。

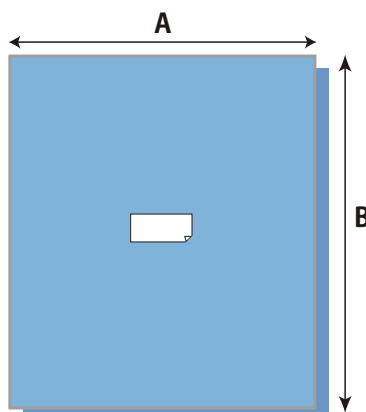

品番	規格	サイズ (Acm×Bcm)	テープ付	ケース入数
●3183004	HZKC-1215	120cm×150cm	テープ付	25枚×2箱(50枚)
●3183005	HZKC-1518	150cm×180cm	テープ付	20枚×2箱(40枚)

2016年10月改訂(第3版)(新記載要領に基づく改訂)
2012年3月改訂(第2版)

届出番号 27B1X0011400014

医 04 整形用品
一般医療機器 単回使用汎用サージカルドレープ 35531000

手術・処置用不織布覆布

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 天然ゴムを使用したドレープの場合は、天然ゴムアレルギーが判明している患者に使用しないこと(アレルギー性症状を起こす恐れがある)

【形状・構造及び原理等】

組成; 不織布及び不織布 - ポリエチレンフィルムの貼り合せ品
形状・構造等; 全体サイズ(60cm×60cm、200cm×300cm等)及び穴ずれ防止の粘着テープ又は粘着性フィルムドレープ貼り合せによって種類は異なる。

【使用目的又は効果】

手術時に手術部周辺を覆う不織布製品で手術部を清潔に保つ為に使用される。

【使用方法等】

本品はディスポーザブル製品であり、再使用はできない。

- 1) 滅菌包装に破れ等の損傷又は水ぬれがないことを確認する。
- 2) 滅菌包装を開封し、無菌的に取り出す。
- 3) 消毒した手術部周辺を覆う。

【使用上の注意】

- 1) 使用前に必ず滅菌包装に破れ等の損傷又は水濡れがないことを確認する。
- 2) 使用前には本品の破損箇所、その他欠陥がないことを確認すること。
- 3) 粘着テープ又は粘着性フィルムドレープをはがす際には、皮膚よりゆっくりとはがすこと。また、はがす際には押さえている手をこまめに粘着境界部に移動し、皮膚に緊張をかけないように配慮すること。
- 4) 本品の使用により、かぶれ等の皮膚障害が生じた場合、アレルギー性症状を起こした場合には、直ちに本品の使用を中止し、適切な処置をすること。

- 5) 高齢者等で皮膚が弱い方の場合、粘着テープ又は粘着性フィルムドレープの貼付時・剥離時には、注意が必要である。特に皮膚に緊張をかけないようにすること。皮膚が引っ張られて炎症を起こすことがある。
- 6) 包装開封後は直ちに使用し、使用後は感染防止に留意し、安全な方法で廃棄すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- ・直射日光、水ぬれ、高温・多湿の環境を避けて保管すること。
- ・傾斜、振動、衝撃(運搬時を含む)等を避けて安定した状態で保管すること。
- ・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管すること。

2. 有効期間

- ・包装に表示している使用期限欄を参照のこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : 株式会社メディテックジャパン
住 所 : 大阪市中央区久太郎町2丁目2番7号
山口興産堺筋ビル6階
電 話 : 06-7711-6060(代)
製 造 業 者 : 株式会社メディテックジャパン

【販売業者の氏名又は名称及び住所】

販 売 業 者 : ハクゾウメディカル株式会社
住 所 : 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
電 話 : 06-6942-0451(代)

※添付文書が必要な際は、各営業にお問い合わせください。

品番	規格	サイズ・規格	1梱入数	JANコード
3183001	HZ-606	60cm×60cm	50枚×4箱	4 958286 701417
3183002	HZ-909	90cm×90cm	50枚×4箱	4 958286 701424
3183012	HZ-912	90cm×120cm	50枚×4箱	4 958286 706603
3183003	HZ-1212	120cm×120cm	50枚×4箱	4 958286 701431

品番	規格	サイズ・規格	1梱入数	JANコード
3183004	HZKC-1215	120cm×150cm	25枚×2箱	4 958286 701448
3183005	HZKC-1518	150cm×180cm	20枚×2箱	4 958286 701455

●エレファドレープ



●エレファ器械台カバー



ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
TEL. 06-6942-0451 <http://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業課 ☎06-6809-4318 神戸営業所 ☎078-940-8975
東京支店 ☎03-3522-6720 広島営業所 ☎082-849-4188
北大阪支店 ☎072-653-4045 四国営業所 ☎0875-52-6900
南大阪支店 ☎0721-20-2900 北九州営業所 ☎093-617-3911
仙台営業所 ☎022-393-7434 福岡営業所 ☎092-481-5921
西東京営業所 ☎042-646-0451 熊本営業所 ☎096-345-2253
三河営業所 ☎0564-54-5447 札幌駐在所 ☎011-788-8009
三重営業所 ☎059-350-3844 盛岡駐在所 ☎019-613-2176
京都営業所 ☎075-603-4826 北陸駐在所 ☎076-225-8013
大阪中央営業所 ☎06-6943-6118 山陰駐在所 ☎0859-30-2193
阪神営業所 ☎078-262-1634 沖縄駐在所 ☎098-941-5320