

創傷保護用吸収パッド

**ハクゾウ**

一般医療機器

# 滅菌ラップキュアドレッシング

滅菌済

HAKUZO STERILE WRAP CURE DRESSING

固着しにくいフィルムと吸収性コットンシートを組み合わせた  
EOG滅菌済の創傷保護用吸収パッドです。

**50袋入**



50mm×50mm

100mm×100mm

## 製品特長

### 使用方法



1 取り出し口のミシン目を破り滅菌袋を取り出します。



2 滅菌袋を開封し、創傷面などに製品をあててください。

### 適用範囲

◎比較的浸出液の少ない創傷。

※浸出液の多い創傷には適用できません。

### 対象施設

◎医療・介護施設


◎在宅 など

### 1 固着しにくいフィルム使用

パッドの表面には、患部とくっつきにくいポリエチレンフィルムを使用しています。

### 2 湿潤環境

穴あきのポリエチレンフィルムにすることにより、浸出液をコットンシートが吸収し、患部を適度な湿潤状態に保持します。

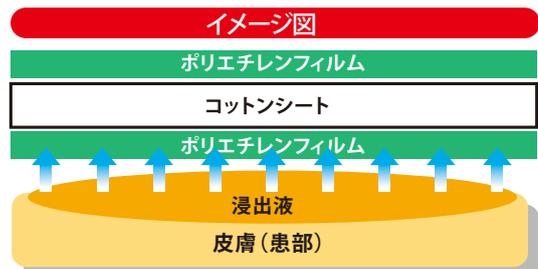

### 3 滅菌済

1枚ずつEOG滅菌されていますので、清潔にご使用頂けます。また、2種類からお選び頂けます。




# ハクゾウ滅菌ラップキュアドレッシング

再使用禁止

**【禁忌・禁止】**  
・再使用禁止

**【形状・構造及び原理等】**

パッド: 脱脂綿の両面にポリエチレンフィルム。

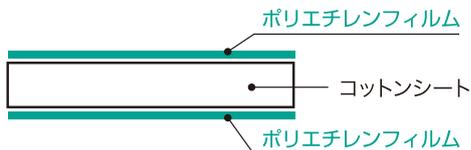

**【使用目的又は効果】**

創傷面の保護

**【使用方法等】**

傷口を清潔にして、パッドを傷口にあてて、絆創膏などで固定する。

**【使用上の注意】**

- ・重要な基本的注意
- 1.パッドが汚れたり水にぬれた時は、新しいものに貼りかえること。
- 2.本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。
- 3.本品の使用により発疹、発赤、かゆみ等の症状が現れた場合には使用を中止すること。
- 4.包装開封後、速やかに使用すること。

**【保管方法及び使用期間等】**

- 1.保管方法  
水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。
- 2.有効期間  
本品の容器若しくは被包に記載  
【自己認証(自社データ)による(使用期限参照)】

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

・製造販売業者  
東洋化学株式会社  
〒529-1606 滋賀県蒲生郡日野町寺尻1008  
TEL 0748-52-5780

・販売業者  
ハクゾウメディカル株式会社  
大阪市中央区徳井町2丁目4番9号  
<http://www.hakuzo.co.jp/>  
TEL 06-6942-0451(代)

添付文書をお求めの場合は下記サイトからダウンロード頂くか、弊社営業までご連絡ください。  
<http://www.hakuzo.co.jp/>

品番	写真	規格	包装	1梱入数	JANコード
3155131		50mm × 50mm	50袋/箱	12箱	4 958286 705576
3155132		100mm × 100mm	50袋/箱	12箱	4 958286 705583

※詳細は各営業にお問い合わせください。

未滅菌タイプも販売しています。

ロールタイプなので自由な長さにカットできます。

ロール状になっているので、患部にあったサイズにカットできます。

箱に定規を印刷しています。(最大8cmまで)

## ハクゾウ 創傷保護用吸収パッド 一般医療機器 未滅菌 ラップキュアドレッシング



1巻入  
幅75mm×全長5m



1巻入  
幅150mm×全長5m



### ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号  
TEL. 06-6942-0451 <http://www.hakuzo.co.jp/>

- |                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| 本社営業部 ☎06-6809-4318  | 京都営業所 ☎075-603-4826   |
| 東京支店 ☎03-3522-6720   | 大阪中央営業所 ☎06-6943-6118 |
| 北大阪支店 ☎072-653-4045  | 広島営業所 ☎082-849-4188   |
| 南大阪支店 ☎0721-20-2900  | 四国営業所 ☎0875-52-6900   |
| 神戸支店 ☎078-976-8901   | 北九州営業所 ☎093-617-3911  |
| 仙台営業所 ☎022-399-7091  | 福岡営業所 ☎092-481-5921   |
| 西東京営業所 ☎042-646-0451 | 熊本営業所 ☎096-345-2253   |
| 三河営業所 ☎0564-54-5447  | 沖縄駐在所 ☎098-941-5320   |
| 三重営業所 ☎059-350-3844  |                       |