


# 今日も頑張れる 俺のサポーター 1日バリバリ！仕事をこなせる！

背面の立体形状 EVA により、  
働く人の腰の動きにフィットする  
全く新しい腰サポーター！

立体形状の  
EVAが  
腰回りを  
がっちりサポート

前面1か所で  
装着簡単

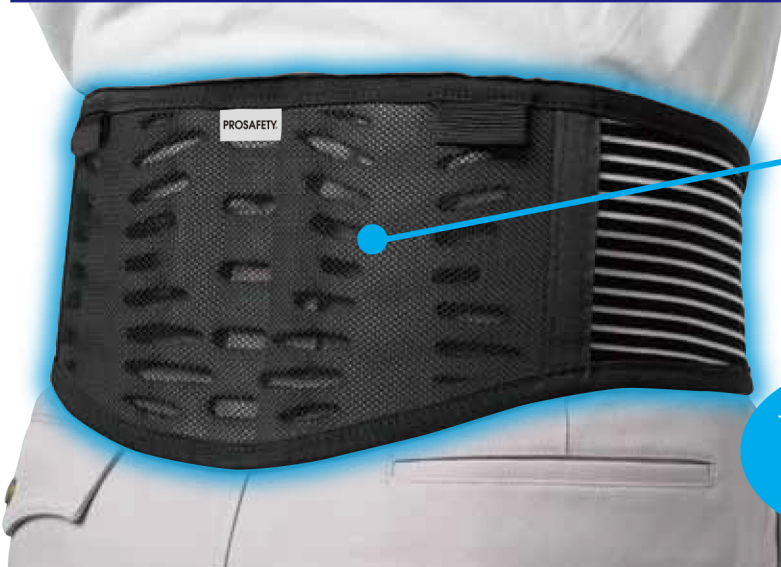


立体形状のため腰に沿い  
ぴったりフィット！



ゴムベルトの幅を狭くしているので  
お腹まわりスッキリ！

### サイズの選び方


図のようにへそ周りを測って、適応サイズ内の商品をお選びください。2つのサイズに該当する人は、大きい方をおすすめします。

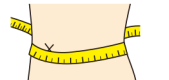

M	へそ周り 73~90cm
L	へそ周り 83~100cm
LL	へそ周り 93~110cm



### 装着方法

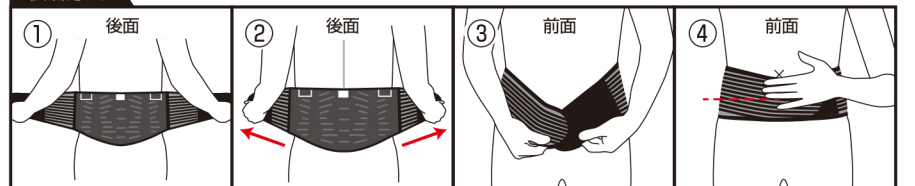

腰に対して PROSAFETY® 反射ネームが表側上になるようにして片手ずつゴムベルトを持ちます。

腰全体を覆うように上下位置を合わせ PROSAFETY® 反射ネームが体中央の背骨位置と合うように左右位置を合わせ左右のゴムベルトを引っ張ります。

左側のマジックテープ®B面を前に引き、マジックテープ®A面を重ねて装着します。締付け具合を調整したい場合はマジックテープ®の定める位置を調整してください。

上下左右の装着位置を整えます。へそ下から指3本位下(丹田)にゴムベルトの中心が位置するように装着してください。

品名	サイズ	色	品番	JAN
PROSAFETY® 今日も頑張れる 俺のサポーター	腰用 M	黒	MPRO-11	4902993169404
	腰用 L	黒	MPRO-12	4902993169411
	腰用 LL	黒	MPRO-13	4902993169428

生地：ポリエステル / 発泡 EVA      ゴム：ナイロン / ポリウレタン      マジックテープ®：ナイロン

MADE IN CHINA