

# ずれ止め吸水シート（ディスポタイプ）

## ご使用前に必ずお読みください

- 中身のこぼれや漏れの原因となるため、本品をハサミ等でカットせずに使用してください。
- 本品はたべられません。
- 本品を広げる際に激しく振ると、中身が偏り汚れやモレの原因となりますのでご注意ください。
- 本品が汚れた場合は、早めに交換してください。

※すれ防止面（裏面）が接触する部分の素材によっては、ずれ止め効果が十分に発揮できない場合があります。

## ご使用方法

- 折りたたんでいる本品を広げてください。
- 不織布面を上にして、できるだけしわが残らないように敷きます。

## 保管方法

- 高温多湿・火気付近を避け、直射日光の当たらない場所に保管してください。

## 使用後の処理方法

- 本品をトイレに流さないでください。配水管等を詰まらせる原因となります。
- お住まいの地域によって処理方法が異なる場合があります。その場合は各自治体の処理方法に従って処理してください。

### 品質表示

品名	ずれ止め吸水シート（ディスポタイプ）（100枚入り）
サイズ	レギュラー 約33cm×約45cm
素材	不織布、吸水紙、綿状パルプ、高分子吸収体、PEフィルム、ホットメルト

販売元

**MEDICAL  
CRAFTON**  
メディカルクラフトン株式会社

〒701-0203 岡山県岡山市南区古新田 1125  
TEL 086-282-1770 FAX 086-282-1246