

ニチバンの極低刺激性テープ  
**SKINERGATE™**

スキナゲート™は『安全』『安心』『快適』に貢献する、肌へのやさしさを追求したニチバンの医療用巻絆創膏の総称です。

“安全”… 肌にやさしい粘着剤ではがす時の痛みをおさえます。

“安心”… 高い皮膚粘着力で固定がしっかり行えます。

“快適”… 通気性が高く、肌のムレをおさえます。

粘着性布伸縮包帯

# スキナゲート™ ガチット/ベージュ

SKINERGATE™ GACHITT / SKINERGATE™ GACHITT BEIGE

医家向品



## 「高固定」と「皮膚へのやさしさ」を両立しました

### 粘着剤にオイル成分を配合!

高い固定力

はがす際の痛みを軽減

繰り返し貼付する部位でも安心して使用可能




# 高い固定性を保ちながら、皮膚への刺激を軽減しました。

## 高い固定力


粘着剤がやわらかいため、皮膚の凹凸にしっかりなじみ、短時間でもしっかりとした固定力を発揮します。当社従来品と比較しても同程度の皮膚粘着力があります。

貼付中のイメージ

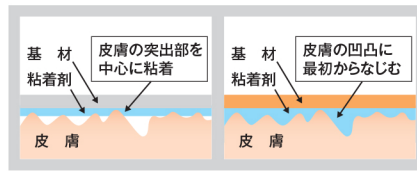

皮膚粘着力


N/15mm

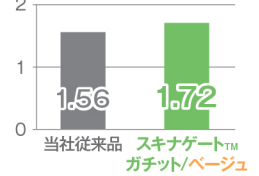


## はがす際の痛みを軽減

粘着剤がやわらかいため、テープをはがす際に皮膚が引っ張られにくいので、痛みを軽減します。

テープはく離時のイメージ

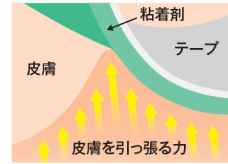

当社従来品

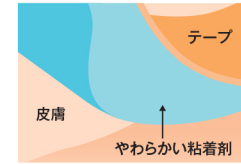

スキナゲート™ ガチット/ベージュ

## 繰り返し貼付する部位でも安心して使用可能


当社従来品と比較して角質はく離量は約半分です。同じところに何回もテープを貼る場合でも安心して使用できます。

角質はく離量の比較



約80%

当社従来品

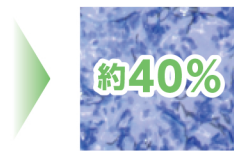

約40%

スキナゲート™ ガチット/ベージュ

\*はがしたテープに付着した角質細胞(藍色部分)

## こんなシーンにガチット貼り



ドレーンチューブの固定に



圧迫止血に



膀胱留置カテーテルの固定に

### 用途

○カテーテル、チューブ、シーネの固定 ○止血処置における圧迫固定

### 使用上の注意

- 皮膚かぶれの原因となりますので、引っ張って伸ばした状態で貼らないでください。
- 傷口には直接貼らないでください。
- 使用中、発疹・発赤、水泡、皮膚はく離、かゆみ等の症状があらわれた場合は使用を中止してください。
- 使用中、水に濡れると皮膚やカテーテル、チューブなどに粘着剤が残ることがありますので、濡らさないように使用してください。
- はがす時は、皮膚を傷めないよう体毛の流れに沿ってゆっくりはがしてください。



TMは商標です。

### スキナゲート™ ガチット

<規格>

品番	サイズ	1箱	JANコード
SGG12	12mm×5m	24巻	4987167092702
SGG25	25mm×5m	12巻	4987167092719
SGG38	38mm×5m	8巻	4987167092726
SGG50	50mm×5m	6巻	4987167092733
SGG75	75mm×5m	4巻	4987167092740
SGG100	100mm×5m	3巻	4987167092757

### スキナゲート™ ガチットベージュ

<規格>

品番	サイズ	1箱	JANコード
SGGB25	25mm×5m	12巻	4987167092764
SGGB38	38mm×5m	8巻	4987167092771
SGGB50	50mm×5m	6巻	4987167092788
SGGB75	75mm×5m	4巻	4987167092795
SGGB100	100mm×5m	3巻	4987167092801

● 日本製  
MADE IN JAPAN

ニチバン株式会社

〒112-8663 東京都文京区関口 2-3-3 ホームページ <https://www.nichiban.co.jp/>