

ニチバンの極低刺激性テープ
SKINERGATE™

スキナゲート™は『安全』『安心』『快適』に貢献する、肌へのやさしさを追求したニチバンの医療用巻絆創膏の総称です。

“安全”… 肌にやさしい粘着剤ではがす時の痛みをおさえます。

“安心”… 高い皮膚粘着力で固定がしっかり行えます。

“快適”… 通気性が高く、肌のムレをおさえます。

全方向伸縮性粘着包帯

スキナゲート™ピタット

SKINERGATE™PITATT

医家向品



あらゆる方向へ伸縮し、皮膚にやさしく、しっかり固定

貼付中の皮膚へのストレスを軽減

皮膚へ密着し、高い固定力を実現

ムレにくく、皮膚の浸軟を防ぐ



貼付中の皮膚へのストレスを軽減

柔軟性のある基材を採用しているため、あらゆる方向にテープが伸縮し、皮膚のどんな動きにも追従します。それにより、皮膚へのストレスを軽減します。



あらゆる方向にテープが伸縮、皮膚のどんな動きにも追従

皮膚へ密着し、高い固定力を実現

柔軟性の高い基材と固定性に優れたアクリル系粘着剤により、皮膚へしっかりと密着します。チューブ類などの固定にも向いています。



ガーゼ固定


チューブ固定

ムレにくく、皮膚の浸軟を防ぐ


透湿性が高く、長時間貼っていてもムレにくいので、浸軟を防ぎ、皮膚刺激を抑えます。

透湿性比較イメージ図

■ 当社従来品（不織布タイプ）

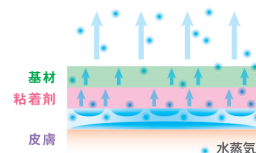

■ スキナゲート™ピタット

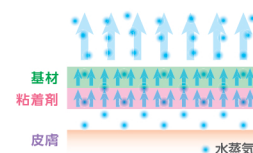

こんなシーンにピタット貼り



マーゲンチューブの固定に



末梢静脈カテーテルの固定に



屈曲部位のガーゼ固定に

用途

- ガーゼ固定 ○カテーテル、チューブ固定 ○透析時の回路固定

使用上の注意

- 個装のフィルムをずらしてテープから外してください。
- 伸ばした状態で貼ると皮膚刺激の原因となります。
テープを伸ばさずに貼ってください。
- 傷口には直接貼らないでください。
- 体動が激しい場合やテープに負担がかかり過ぎるとはがれることがあります。
- 使用中は、固定のズレやテープのはがれについて十分観察し、必要に応じて補強してください。
- 使用中、発疹・発赤、水疱、皮膚はく離、かゆみ等の症状があらわれた場合は使用を中止してください。
- はがす時は、皮膚を傷めないよう体毛の流れに沿ってゆっくりはがしてください。

スキナゲート™ピタット

<規格>

品番	サイズ	1箱	JANコード
SGP25	25mm×5m	12巻	4987167089887
SGP50	50mm×5m	6巻	4987167089894
SGP75	75mm×5m	4巻	4987167089990



TMは商標です。

日本製
MADE IN JAPAN

ニチバン株式会社

〒112-8663 東京都文京区関口 2-3-3 ホームページ <https://www.nichiban.co.jp/>