

ハイコロールTM使用例

保護したい部位に合わせて誰でも簡単に使用できます。

防水テープにハイドロコロイド粘着剤がついたテープです。
背面のすべりがよく、衣類などとすれてもはがれにくいので、皮膚の保護に最適です。



脊椎部の骨突出部に




耳介部に



関節拘縮で擦れる皮膚に



胃ろう周囲皮膚に

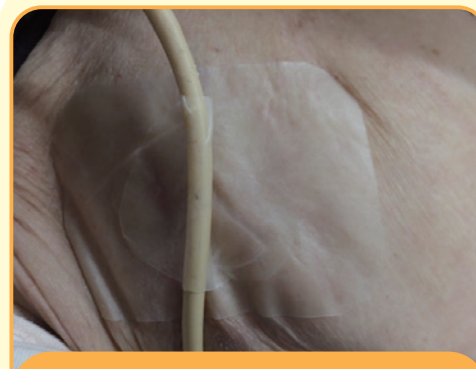

尿留置カテーテル固定に



下腿部の骨突出部に




ストーマ外周部皮膚に



骨突出部に(外踝)




尾骨部の骨突出に

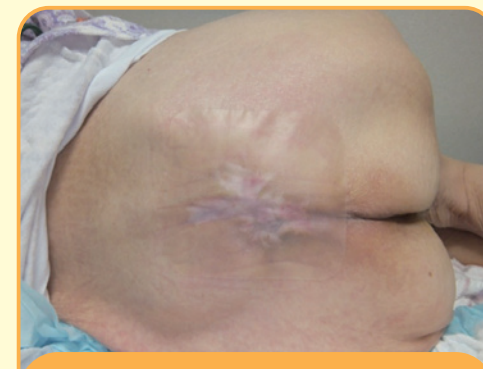

褥瘡既往部位に


貼り方のコツ

テープの角を面取りすると
はがれにくくなります

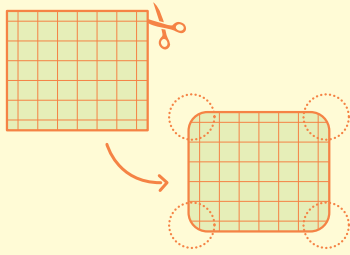


外踝に貼るときは…


中央を残し、切れ込みを入れます
切れ込みを入れた部分を重ねることで
ぴったりと貼ることができます

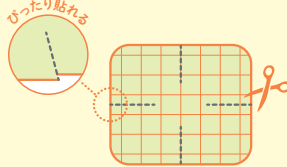

仙骨部に貼るときは…

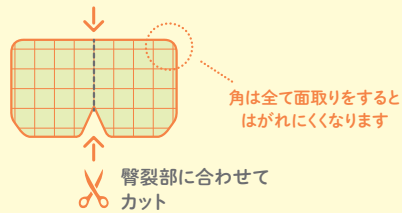

胃ろう周囲の
皮膚の保護に貼るときは…

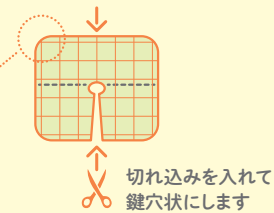

注意点

テープは引っ張って貼らず、
やさしくなじませるように貼ってください
未滅菌品のため、傷口には貼らないでください。
テープが汚れたら貼り換えてください。



実寸大サイズ


※手触りはイメージです。

100mm幅

25mm幅



50mm幅

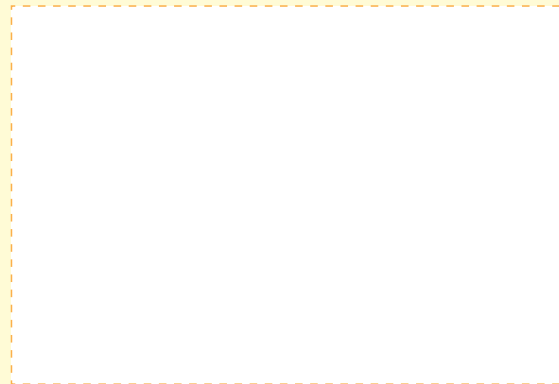

ハイコロール™規格



品番:HCR25
サイズ:25mm×5m 1箱:1巻
標準価格/箱(税別):1,800円
JANコード:4987167092276



品番:HCR50
サイズ:50mm×5m 1箱:1巻
標準価格/箱(税別):3,400円
JANコード:4987167092283



品番:HCR100
サイズ:100mm×5m 1箱:1巻
標準価格/箱(税別):6,200円
JANコード:4987167092290

TMtrademark

ニチバン株式会社

〒112-8663 東京都文京区関口2-3-3
<https://www.nichiban.co.jp/>

お問い合わせ・サンプル依頼はこちらから

※製品ページ下部にあります
資料請求・サンプル請求のページより承ります。



日本製
MADE IN JAPAN
SEN23713CSC